

Wie führt man ein Update bei Grid durch?

Grid wird kontinuierlich weiterentwickelt, um neue Funktionen, Inhalte und Fehlerbehebungen bereitzustellen. Daher empfehlen wir immer, Grid auf dem neuesten Stand zu halten.

Grid 3

Wenn dein Gerät mit dem Internet verbunden ist, sucht Grid bei jedem Start nach Updates. Falls ein Update verfügbar ist, wirst du eine Benachrichtigung oben rechts im Fenster sehen. Tippe auf das Symbol, um das Update zu starten.



Du kannst manuell nach Updates suchen, indem du Smartbox Update verwendest. Das Smartbox Update-Programm findest du im Startmenü.

Grid for iPad

Grid for iPad wird automatisch aktualisiert, wenn dein Talk Pad mit dem Internet verbunden ist.

Du kannst manuell nach Updates suchen, indem du den App Store öffnest und die Grid for iPad App aktualisierst.