

Wie funktionieren ElevenLabs-Stimmen mit Grid?

Die ElevenLabs-Stimme wird verwendet, wenn:

- Sie eine „Sprechen“-Zelle auswählen.
- Sie den Chat-Schreibbereich auswählen, sofern dieser so eingestellt ist, dass er beim Auswählen spricht.
- Sie eine Kommunikationszelle (eine Schreibzelle oder eine Wortlistenzelle) auswählen und sich auf dem Grid kein Chat-Schreibbereich befindet.
- Sie einen „Jetzt sprechen“-Befehl verwenden.

Die ElevenLabs-Stimme wird *nicht* verwendet, wenn:

- Sie eine Kommunikationszelle auswählen und „Sprechen beim Tippen“ aktiviert ist, während Sie Sätze im Chat-Schreibbereich erstellen.
- „Sprechen beim Tippen“ erlaubt Grid, während der Texterstellung zu sprechen. ElevenLabs unterstützt derzeit kein „Sprechen beim Tippen“, daher wird in diesem Fall die auf dem Gerät gewählte Stimme verwendet.

Beispiele für die Verwendung mit verschiedenen Smartbox-Grids:

Fast Talker und Text Talker

- Die ElevenLabs-Stimme wird verwendet bei den Nachrichten-Zellen, beim Auswählen der Sprechen-Zelle oder beim Auswählen des Chat-Schreibbereichs (wenn dieser so eingestellt ist, dass er beim Auswählen spricht).
- Die ElevenLabs-Stimme wird *nicht* verwendet für Chatverlauf, Wortvorhersagen oder beim Erstellen eines Satzes mit Satzzeichen.

Aphasia Duo

- Die ElevenLabs-Stimme wird verwendet, wenn Wörter oder Phrasen ausgewählt und anschließend die Sprechen-Zelle ausgewählt wird.
- Die ElevenLabs-Stimme wird *nicht* verwendet, wenn Sie sich auf einem Grid mit einem Chat-Schreibbereich befinden und Wörter oder Phrasen auswählen, um eine Nachricht zu erstellen.

Super Core

- Die ElevenLabs-Stimme wird verwendet, wenn Sie die Sprechen-Zelle oder den Chat-Schreibbereich auswählen.

- Die ElevenLabs-Stimme wird *nicht* verwendet, wenn Sie Wörter oder Phrasen auswählen, um eine Nachricht zu erstellen.

Voco Chat

- Die ElevenLabs-Stimme wird verwendet, wenn Sie Wörter oder Phrasen ausgewählt und anschließend den Chat-Schreibbereich auswählen, um sie sprechen zu lassen.
- Die ElevenLabs-Stimme wird *nicht* verwendet, während Sie Wörter oder Phrasen auswählen, um eine Nachricht zu erstellen.