

Wie kann ich die Abtastfrequenz von Evo anpassen?


Die Evo-Augensteuerungskamera kann mit einer Abtastrate von 30 Hz oder 60 Hz betrieben werden.

Die Abtastrate gibt an, wie viele Kamerabilder pro Sekunde erfasst werden. Standardmäßig ist der Wert auf 30 Hz eingestellt.

So änderst du die Abtastrate:

Gehe zu

Grid-Menü → Einstellungen → Augensteuerung → Kamera und passe dort das Sampling-Rate-Dropdown nach Bedarf an.

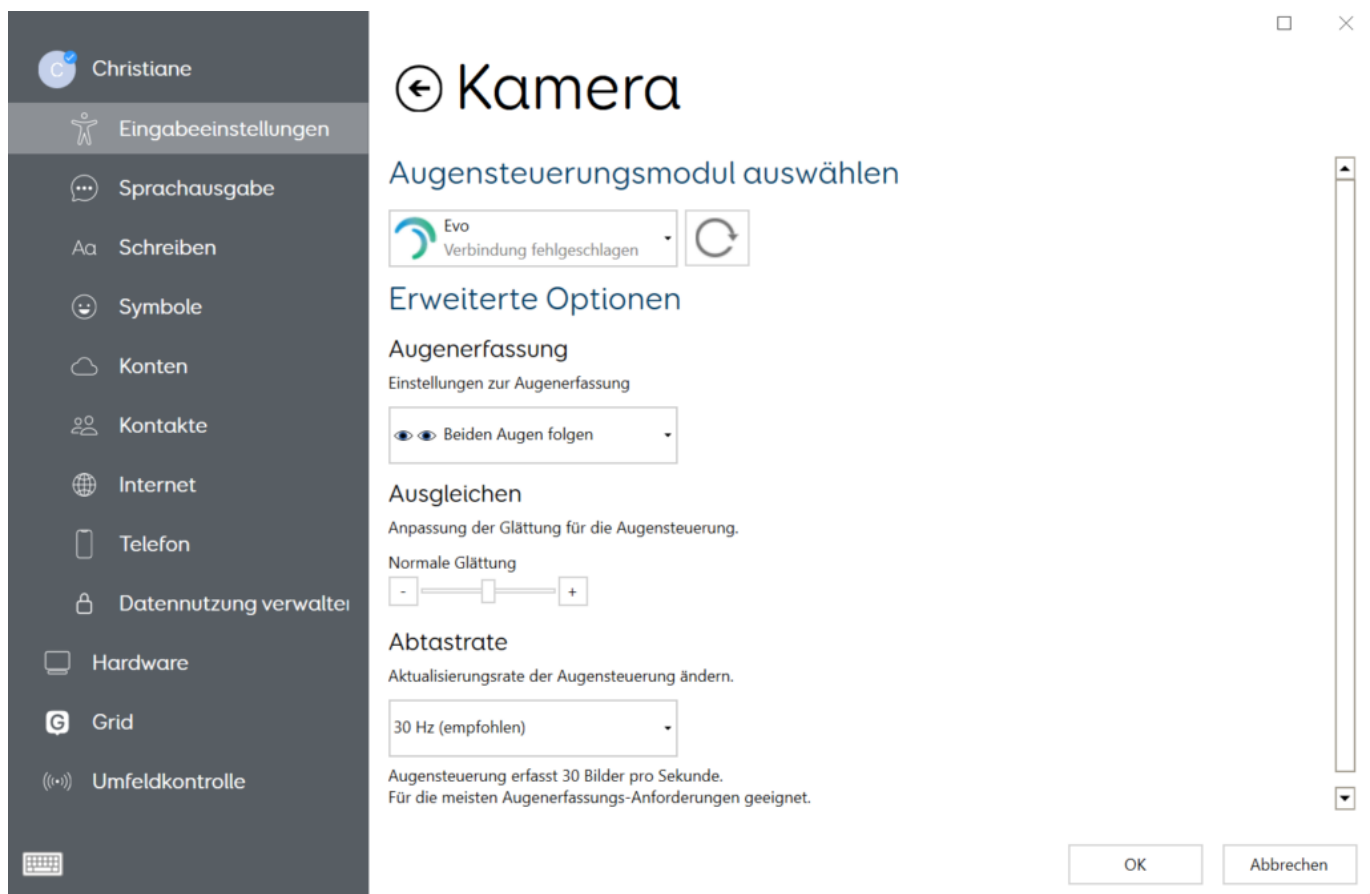

Die meisten Nutzer:innen der Augensteuerung können 30 Hz problemlos verwenden.

Eine Abtastrate von 60 Hz sorgt dafür, dass der Blick schneller wiedererkannt wird, wenn er kurz verloren geht.

Allerdings kann 60 Hz die Akkulaufzeit des Geräts negativ beeinflussen.