

Wie kann ich einen effektiven Smart Prompt erstellen?

Der verwendete Prompt kann einen großen Einfluss darauf haben, wie passend die Antworten sind. Es kann notwendig sein, den Prompt auf eine bestimmte Weise zu formulieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Es wird dringend empfohlen, die Prompts mehrfach zu testen. Smart Prompt arbeitet mit einem KI-Dienst, der jedes Mal unterschiedliche Ergebnisse liefern kann.

Ein klares Ziel haben

Beschreiben sie genau, was sie erreichen möchten. Seien sie dabei so konkret wie möglich. Zum Beispiel:

„Erkläre, wie UK-Modelling mit elektronischen UK-Geräten funktioniert. Gehe davon aus, dass der Leser nur geringe Vorkenntnisse zu Unterstützte Kommunikation hat.“

Kontext und Rollen angeben

Beschreibe die Situation und gib dem KI-Dienst eine Rolle. Kontext hilft dabei, passendere Antworten zu erzeugen. Zum Beispiel:

„Du hilfst dabei, eine Geschichte für ein Kind im Alter von 4 bis 6 Jahren zu schreiben.“

Struktur definieren und Grenzen festlegen

Geben Sie an, wie die Antworten aufgebaut sein sollen und welche Regeln gelten. Wenn die Antworten ein bestimmtes Sprachniveau oder eine bestimmte Länge haben sollen, erwähnen

sie das im Prompt. Zum Beispiel:

- „Verwende eine freundliche, einfache Sprache auf Grundschulniveau.“
- „Verwende keine Fachbegriffe.“
- „Antworten sollen nicht länger als drei Sätze sein.“
- „Antworten sollen einzelne Wörter sein.“

Beispiele geben

Wenn sie Antworten in einem bestimmten Stil möchten, geben sie ein Beispiel vor. Zum Beispiel:

„Gib wichtige Wörter – Nomen und Verben – zu einem Thema an. Wenn das Thema z. B. ‚Strand‘ ist, könnten die Wörter ‚Sand‘, ‚Meer‘, ‚schwimmen‘, ‚graben‘ sein.“

KI zur Unterstützung nutzen

Nutzen sie KI-Dienste, um sie beim Schreiben ihres Prompts zu unterstützen. Wenden sie die oben genannten Tipps an und lassen sie sich Vorschläge geben. Sie können die KI auch nutzen, um einen Prompt weiter zu verbessern, bis man das gewünschte Ergebnis erhält.

Testen und wiederholen

Testen Sie Ihren Prompt mehrfach, um zu sehen, wie gut er funktioniert. Überprüfen Sie, ob die gewünschten Ergebnisse erreicht werden, und passen Sie den Prompt bei Bedarf an.