

Wochenkalender in GoTalk NOW

Im kommenden Jahr alle wichtigen Termine im Blick behalten. Kein Problem mit unserem Seitenset in GoTalk NOW. Erstellen Sie Ihren individuellen Wochenkalender/Wochenplan und bestücken diesen mit Daten, besonderen Tagen und Terminen. Außerdem enthält das Seitenset Felder zur Kommunikation über den Kalender und die enthaltenen Aktivitäten, z.B. „Was machen wir heute?“ oder „Ich freue mich auf ...“.



So geht's:

- Laden Sie die ZIP-Datei von unserer Seite auf einen PC oder ein Notebook herunter, auf dem „iTunes“ installiert ist.
- Nun verbinden Sie Ihre Kommunikationshilfe, z.B. Talk Pad mit GoTalk NOW über das USB-Kabel mit dem Computer.
- Öffnen Sie „iTunes“ und klicken Sie dort auf Ihr iPad (kleines graues Kästchen links vom blau markierten Wort „Mediathek“ in der oberen Zeile). Klicken Sie dann in der Leiste links auf „Dateifreigabe“. Anschließend machen Sie einen Doppelklick auf „GoTalk NOW“ bzw. „GoTalk Start“.
- Wenn sich die Ansicht geöffnet hat, ziehen Sie das gespeicherte Seitenset hinein. Dies geht ganz einfach per „Drag and Drop“: Klicken Sie die Datei mit der linken Maustaste an

und halten Sie diese gedrückt, dann lässt sich die Datei mit der Maus verschieben.

- Das Seitenset ist nun in der App „GoTalk NOW“ gespeichert und kann dort verwendet werden.