



Predictable - Datensicherung

Durch die Verwendung der Funktion „Kategorien“ lassen sich in der Oberfläche Predictable schnell eigene Phrasen übersichtlich anordnen. Um die von Ihnen häufig verwendeten Floskeln und deren Anordnung zu sichern, bietet Predictable die Möglichkeit zur Erstellung eines Backups, das via Email oder im gemeinsamen Netzwerk versandt und im Notfall wieder eingespielt werden kann, damit Ihre persönlichen Daten und angepassten Einstellungen nicht verloren gehen.

HINWEIS: Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit dem Internet verbundensein. Sie können eine Verbindung über WLAN herstellen, indem Sie diese Funktion in den allgemeinen Einstellungen aktivieren (siehe auch „Spickzettel Rehataalkpad und Letterpad“).

So geht´s:

Backup speichern

1. Starten Sie die Oberfläche Predictable und gehen Sie in die „Einstellungen“ (Zahnrad in der unteren Zeile der Tastatur). **HINWEIS:** Für den Fall, dass Sie die „Einstellungen“ ausgeblendet haben, verlassen Sie die Oberfläche durch 1x Drücken des „Homebuttons“ (stellen Sie hierzu ggf. den geführten Zugriff aus; vgl. „Spickzettel Rehataalkpad und Letterpad“), dann gehen Sie in die IOS „Einstellungen“ → „Predictable“ und schieben den Regler „Einstellungen - Knopf anzeigen“ auf „Ein“. Starten Sie die Oberfläche erneut.
2. Drücken Sie unter „Einstellungen speichern und zurücksetzen“ auf „Jetzt sichern“.
3. Geben Sie in dem sich öffnenden Feld einen Namen für Ihre Sicherung ein und bestätigen Sie mit „OK“.

Backup über gemeinsames Netzwerk an Computer senden

1. Starten Sie die Oberfläche Predictable und gehen Sie in die „Einstellungen“ (Zahnrad in der unteren Zeile der Tastatur).
2. Dann wählen Sie „Backup von iDevice an Computer“ und schieben den Regler auf „ON“. Oberhalb des Reglers erscheint jetzt Ihre Netzwerkadresse (z.B: <http://192.120.9.3:321>).
3. Tippen Sie diese in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers und bestätigen Sie mit „Enter“.
4. Nun wird die Predictable-Sicherungsseite geöffnet. Wählen Sie auf der rechten Seite unter „Downloaden Backup“ Ihre entsprechende Sicherungsdatei und geben Sie den Speicherort für die Datei an.

Backup via E-Mail an Computer senden

Schritt 1: E-Mail einrichten

1. Verlassen Sie die Kommunikationsoberfläche durch 1x Drücken des „Homebuttons“ (Stellen Sie hierzu ggf. den geführten Zugriff aus; vgl. „Spickzettel Rehataalkpad und Letterpad“).
2. Gehen Sie dann in die „Einstellungen“ → „Mail, Kontakte, Kalender“ → „Account hinzufügen“.
3. Wählen Sie den entsprechenden Anbieter, bei dem Ihre bestehende Emailadresse angelegt ist (für gmx.de, web.de oder t-online.de wählen Sie „Andere“).



4. Fügen Sie einen E-Mail-Account hinzu, indem Sie die geforderten Daten in die Abfrage eintragen (Name = Name, unter dem ausgehende Nachrichten versandt werden sollen; E-Mail = das bestehende E-Mail-Konto, über das die Nachrichten versandt und empfangen werden sollen; Kennwort = Ihr Kennwort zur Abfrage des bestehenden E-Mail-Kontos).
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „weiter“. Die Verbindung wird hergestellt und das Abfragefenster ausgeblendet.

Schritt 2: Backup via E-Mail an Computer senden

1. Starten Sie die Oberfläche Predictable und gehen Sie in die „Einstellungen“ (Zahnrad in der unteren Zeile der Tastatur).
2. Wählen Sie anschließend „Backup - Wiederherstellen“. Ihre Sicherungsdateien werden alphabetisch geordnet angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Briefumschlag neben der zu verschickenden Datei. Das Mailprogramm öffnet sich. Geben Sie über die Tastatur die Emailadresse an, an die die Sicherung gemailt werden soll und bestätigen Sie mit „senden“.
4. Speichern Sie die Sicherungsdatei aus der Mail auf Ihrem Rechner.

Backup einspielen

1. Starten Sie die Oberfläche Predictable und gehen Sie in die „Einstellungen“ (Zahnrad in der unteren Zeile der Tastatur).
2. Wählen Sie „Backup von iDevice an Computer“ und schieben Sie den Regler auf „ON“. Oberhalb des Reglers erscheint Ihre Netzwerkadresse (z.B: <http://192.120.9.3:321>).
3. Tippen Sie diese in die Adresszeile Ihres Internet-Browsers und bestätigen Sie mit „Enter“.
4. Nun wird die Predictable-Sicherungsseite geöffnet. Wählen Sie auf der linken Seite unter „Hochladen Sichern“ den Button „Durchsuchen“. Markieren Sie Ihre Sicherungsdatei in dem von Ihnen ausgewählten Ordner und klicken Sie auf „Öffnen“.
5. Gehen Sie danach auf „Einreichen“ - die Datei ist nun auf dem Letterpad verfügbar.
6. Klicken Sie am Letterpad in der Maske „Verbinden iDevice zum Computer“ auf „Fertig“.
7. Wählen Sie in den Einstellungen „Backup wiederherstellen“ und anschließend den Button mit den kreisförmig angeordneten Pfeilen zur Wiederherstellung.
8. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „Ja“ - das Backup kann nun verwendet werden.