



**Grid** for iPad

Gebrauchsanleitung

Smartbox

# Grid sicher verwenden

**Grid for iPad kann zwar zur Kommunikation im medizinischen Umfeld genutzt werden, es ersetzt aber keinen Notruf!**

Grid ist nicht dazu ausgelegt, eine medizinische Beurteilung des Benutzers vorzunehmen.

[thinksmartbox.com/safety](https://thinksmartbox.com/safety)

## Grid und Ihre Daten

Grid for iPad speichert keine Benutzerdaten online ohne Ihre Zustimmung. Alle Daten zu Ihren soziale Medien- und E-Mail-Konten werden lokal gespeichert und nie weitergegeben.

Wenn Sie ein Konto in Grid for iPad anlegen, werden Ihnen mehrere Datenschutzeinstellungen angeboten. Mit Ihrer Erlaubnis kann Grid for iPad den Chatverlauf aufzeichnen und Standortdaten für die Wort- und Phrasenvorhersage verwenden. Diese Daten werden immer lokal gespeichert und werden nicht an Smartbox gesendet.

[thinksmartbox.com/privacy](https://thinksmartbox.com/privacy)

Document: Grid for iPad - Manual - DE - C  
Language: German  
Based on: Grid for iPad - Manual - UK - A  
Date of issue: March 2025

Copyright © 2025 Smartbox Assistive Technology

Willkommen zu

# Grid for iPad



Software für die Unterstützte  
Kommunikation (UK) mit Symbolen und Text

Smartbox

## 1. Erste Schritte

1.1	Der erste Start	10
1.2	Leitfäden und Ressourcen für Seitensets	12
1.3	Lernen Sie Grid kennen	14
1.4	Willkommen in Meine Seiten	16
1.5	Das Meine Seiten-Menü	17
1.6	Zugriff auf Einstellungen in Grid	18
1.7	Ihre Stimme auswählen	19
1.8	Seitensets	21
1.9	Ihre ersten Seitensets auswählen	22
1.10	Andere Sprachen	23
1.11	Online Grids	24
1.12	Das Seitenset-Menü	25
1.13	Online Grids	26
1.14	Wörter finden	28
1.15	Ihre Seitensets teilen	30

## 2. Bearbeitungsmodus

2.1	Einleitung	34
2.2	Wie Seitensets angeordnet sind	35
2.3	Ein leeres Seitenset einfügen	36
2.4	Auf die Bearbeitung vorbereiten	38
2.5	Der Bearbeitungsbildschirm	39
2.6	Änderungen speichern	40
2.7	Ein Feld erstellen	41
2.8	Leeres Feld erstellen	52
2.9	Felder auswählen	53
2.10	Mehrere Felder erstellen	55
2.11	Ein Feld verschieben	56
2.12	Feldgröße anpassen	57
2.13	Einem Feld Befehle hinzufügen	58
2.14	Andere Feldtypen	62
2.15	Feldeigenschaften	64
2.16	Feldeigenschaften verwenden	65
2.17	Feldeigenschaften überschreiben	67
2.18	Seitenset	73
2.19	Grid	76
2.20	Randleiste des Seitensets	83
2.21	Optionen	87
2.22	Seitenset-Einstellungen	91

## 3. Einstellungen

3.1	Benutzer	96
3.2	Zugriff	98
3.3	Sprachausgabe	100
3.4	Sprachaufnahmen	104
3.5	Schreiben	108
3.6	Symbole	114
3.7	Konten	116
3.8	Webseite	118
3.9	Seitenset	120
3.10	Einkäufe	121
3.11	Hilfe	122
3.12	Über	123
3.13	iPad OS-Einstellungen	125

## 4. Support

4.1	iPad OS-Einstellungen	130
4.2	Aktualisierung von Grid for iPad	132
4.3	Unterstützung	133
4.4	Sicherheitshinweise	134
4.5	iPad Systemanforderungen	136



# Über diese Anleitung

Dieser Leitfaden besteht aus vier Abschnitten



## Erste Schritte

Sind Sie ganz neu bei Grid for iPad? Hier geht's los! Dieser Abschnitt erläutert die Grundlagen der Verwendung von Grid.



## Bearbeitungsmodus

Hier lernen Sie den umfangreichen Bearbeitungsmodus von Grid for iPad kennen, von kleinen Änderungen bis hin zum Erstellen und Gestalten von Feldern.



## Einstellungen

Detaillierte Beschreibungen aller Einstellungen, die in Grid for iPad konfiguriert werden können.



## Support

Hinweise zu Support und Wartung Ihrer Grid for iPad - App

Konzepte und wichtige Punkte sind **fett** hervorgehoben.

Links zu Websites sind **orange** hervorgehoben.

Sie können eine PDF-Version dieses Handbuchs unter **thinksmartbox.com** herunterladen

## Aktualisierung der Gebrauchsanleitung

Bei Bedarf werden Dokumente wie z.B. diese Gebrauchsanleitung aktualisiert.

Sie finden die aktuellsten Versionen der Dokumentation auf **thinksmartbox.com** zum Download.

# 1

# Erste Schritte


**Sind Sie ganz neu bei Grid for iPad? Hier geht's los! Dieser Abschnitt erläutert die Grundlagen der Verwendung von Grid.**

1.1	Der erste Start	10
1.2	Leitfäden und Ressourcen für Seitensets	12
1.3	Lernen Sie Grid kennen	14
1.4	Willkommen in Meine Seiten	16
1.5	Das Meine Seiten-Menü	17
1.6	Zugriff auf Einstellungen in Grid	18
1.7	Ihre Stimme auswählen	19
1.8	Seitensets	21
1.9	Ihre ersten Seitensets auswählen	22
1.10	Andere Sprachen	23
1.11	Online Grids	24
1.12	Das Seitenset-Menü	25
1.13	Online Grids	26
1.14	Wörter finden	28
1.15	Ihre Seitensets teilen	30

Lesen Sie das Handbuch genau durch und machen Sie sich mit der Bedienung Ihres iPads und des iPad OS-Betriebssystems vertraut.



- 1 Wählen Sie zuerst das **Grid Icon** auf dem **Startbildschirm des iPad**.
- 2 Wenn Sie Grid for iPad zum ersten Mal starten, werden Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihres Benutzerprofils geführt.
- 3 Dies beginnt mit der Erstellung Ihres **Smartbox-Kontos** (Sie können sich anmelden, wenn Sie bereits eines haben).
- 4 Sie wählen dann Ihre Sprach-, Sprach- und App-Einstellungen aus.
- 5 Sie werden zu **Meine Seiten** weitergeleitet, von hier aus können Sie Ihre Seitensets hinzufügen

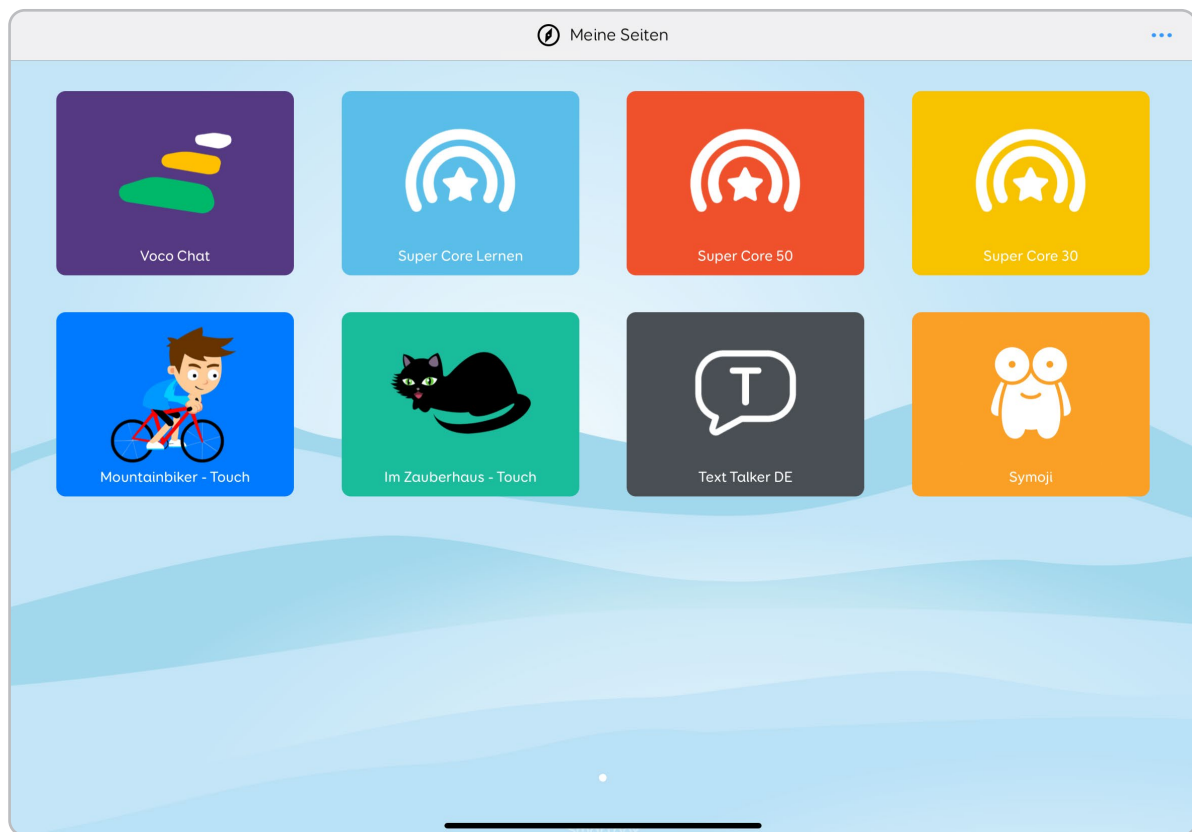

Meine Seiten mit einer Auswahl an Seitensets

## Grid zur Unterstützten Kommunikation (UK) verwenden


Grid unterstützt eine ganze Bandbreite an Bedürfnissen, vom Spracherwerb mithilfe eines wissenschaftsbasierten Vokabulars wie Super Core, bis hin zum Erstellen schneller Sätze mit einer textbasierten Tastatur.

Wählen und individualisieren Sie viele Stimmen und Inhalte, um den für Sie persönlich passenden Kommunikationsstil zu finden.

## 1.2

# Leitfäden und Ressourcen


Das ist nur ein Teil Ihrer Reise mit Grid. Wir bieten Ihnen viele Leitfäden und Werkzeuge zu den Inhalten von Grid, sowie viele Tipps und Tricks für Ihre Kommunikation mit Grid.

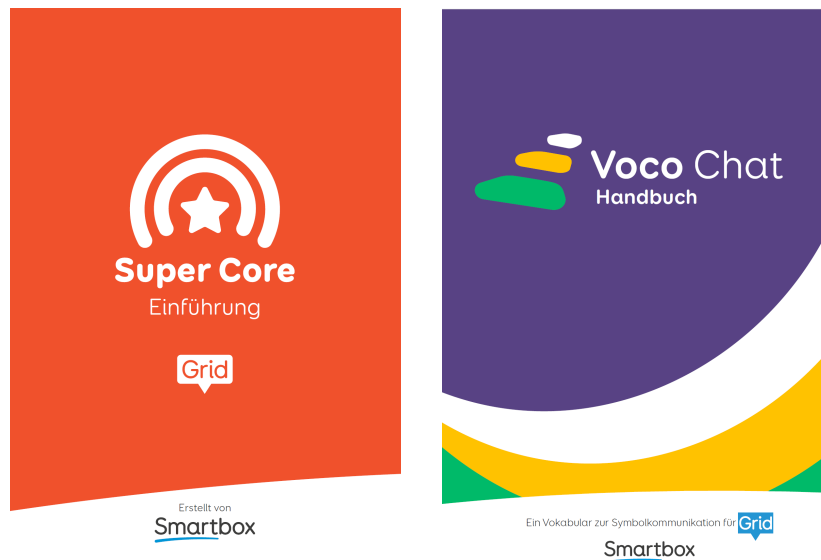

Wir haben eine Reihe von Leitfäden und Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, unsere Seitensets kennen zu lernen und zu erkunden.

Jeder Leitfaden beinhaltet tiefere Informationen über den Aufbau und die Nutzung des Seitensets.

Öffnen Sie das Seitenset in Grid for iPad, bei dem Sie den Leitfaden anschauen möchten, und wählen Sie Optionen-Einstellungen-Seitenset-Dokumentation anschauen.

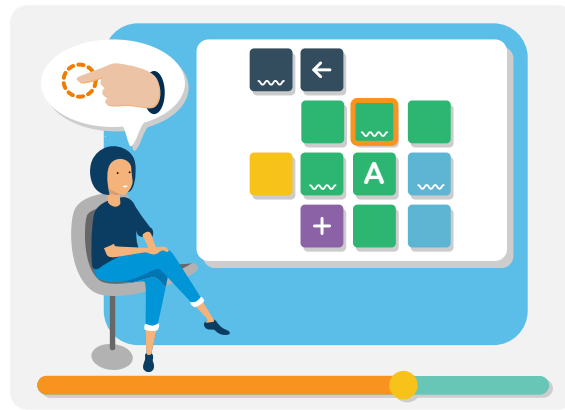

## Webinare und Tutorials

Sie finden Webinare und Tutorials auf unserem YouTube-Kanal:

[thinksmartbox.com/youtube](https://thinksmartbox.com/youtube)

## 1.3

# Lernen Sie Grid kennen

## Benutzerprofil

Ihr Benutzerprofil speichert all Ihre Seitensets, Präferenzen und andere Einstellungen.



## Meine Seiten

Dies ist Ihr Startbildschirm, auf dem Sie Ihre Seitensets finden.







# 1.4

## Willkommen in Meine Seiten

**Meine Seiten** zeigt **all Ihre Seitensets** an. Wenn Sie eines auswählen, wird es geöffnet.

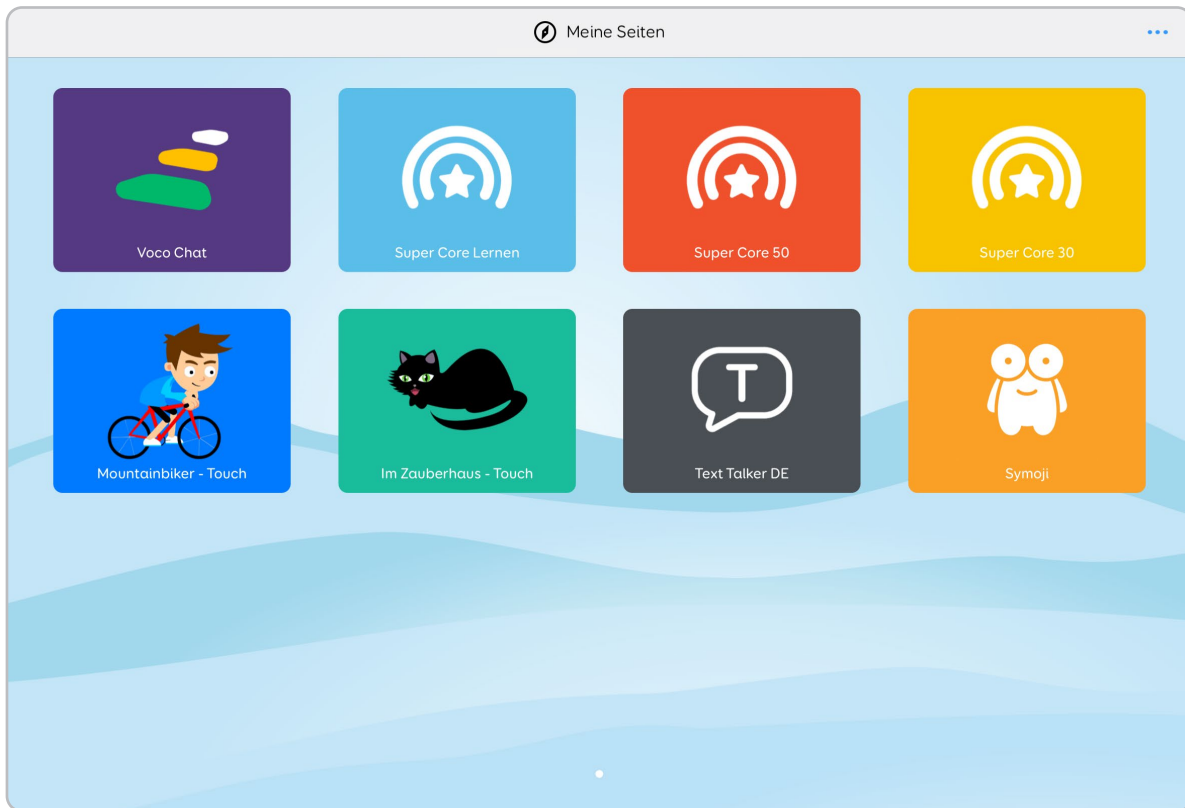


**Meine Seiten sind voll zugänglich**, d.h. Sie können mit der eingestellten Ansteuerungsmethode Seitensets auswählen und zwischen den Seitensets navigieren.

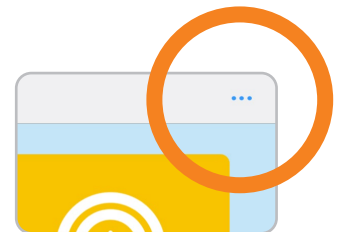

Das Menü kann für **weitere Optionen** geöffnet werden.


Um von einem Seitenset aus zu **Meine Seiten** zurückzukehren, wählen Sie **Menü - Meine Seiten**.

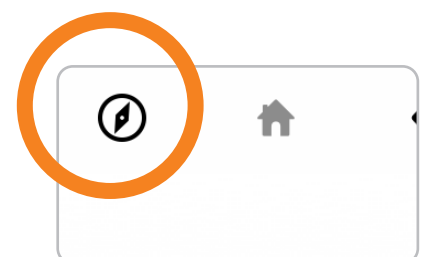



## Seitensets hinzufügen

Das Fenster Seitensets hinzufügen öffnen.

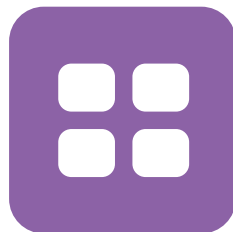

## Seitensets anordnen

Sie können neu sortieren, Ordner erstellen und Seitensets aus Meine Seiten entfernen.



## Seitensets freigeben

Das Fenster Seitensets freigeben öffnen.



## Einstellungen

Zugriff auf Ihre Grid-Einstellungen.

## 1.6

# Zugriff auf Einstellungen in Grid

Grid unterstützt eine Reihe an Ansteuerungsmethoden.

Grid kann standardmäßig per Touch gesteuert werden. Weitere Ansteuerungsmethoden können in den **Einstellungen der Bedienungshilfen für iPad** konfiguriert werden.

Jede Ansteuerungsmethode bietet eine ganze Reihe an Einstellungen und Optionen, die für Ihre Bedürfnisse optimiert werden können.

## Touch-Zugriff

Interagieren Sie direkt mit Grid über den Touchscreen Ihrer Kommunikationshilfe. Sie können für bessere Genauigkeit auch eine **Fingerführung** einsetzen. In den iPad Einstellungen passen Sie an, wie Grid auf Ihre Berührung reagiert.

## Schalter-Zugriff

Schließen Sie Schalter per Bluetooth oder USB Port an. Grid kann so konfiguriert werden, dass es Ihre Seitensets auf mehrere Arten scannt. Sie können auch mehrere Schalter anschließen.

## Zugriff über Mauszeiger


Die Ansteuerung über Mauszeiger umfasst eine ganze Reihe von Geräten, vom Trackball bis zum Head-Tracker, die alle einen Mauszeiger auf dem Bildschirm steuern können.

# 1.7

## Ihre Stimme auswählen




Grid bietet Ihnen über **200 Stimmen in 32 Sprachen zur Auswahl**. Zu finden sind sie unter Einstellungen - Sprachausgabe. Wählen Sie im Dropdown-Menü Länder die gewünschte Stimme und ggf. den Dialekt.

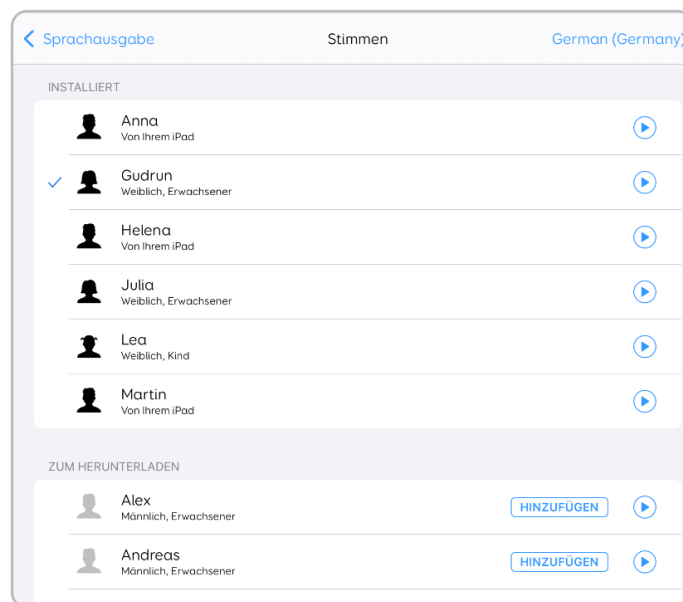


Drücken Sie auf **Abspielen**, um sich die jeweilige Stimme anzuhören.



Wenn eine Stimme ausgegraut ist, können Sie sie auf Ihr Gerät herunterladen, indem Sie auf **Hinzufügen** tippen (Internetverbindung erforderlich).

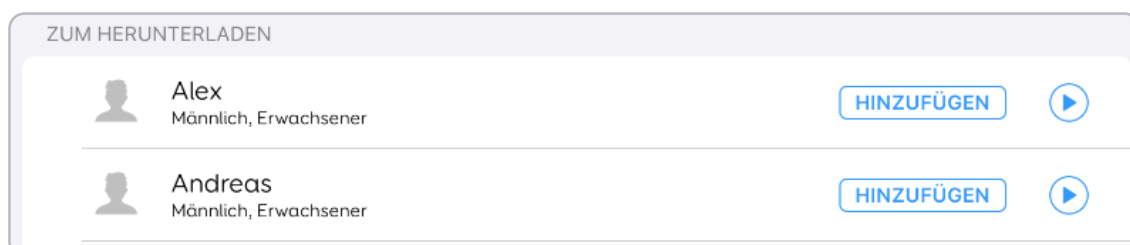

Sie können unter **konfigurieren** die **Geschwindigkeit** und **Tonhöhe** jeder Stimme anpassen und die **Lautstärke** für sich personalisieren.

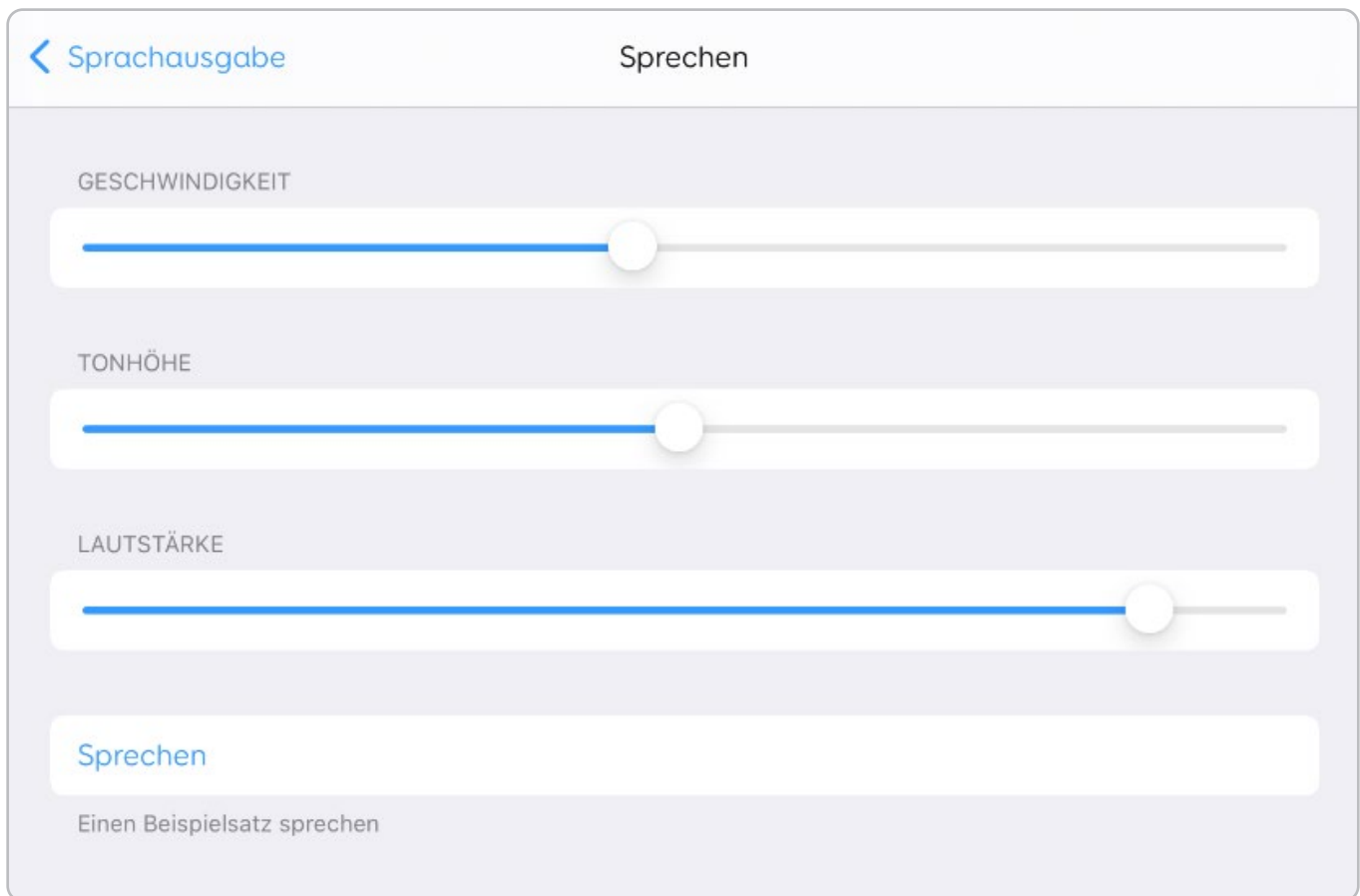

Menü zum Anpassen der ausgewählten Stimme

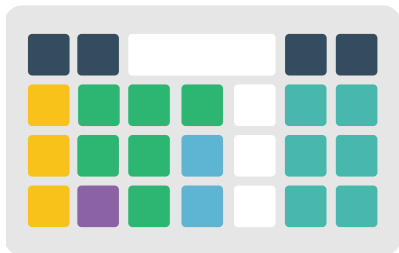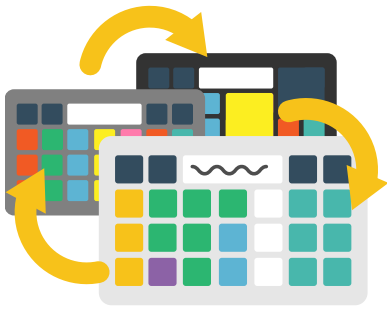

## Seitenset

Ein Seitenset ist eine **Gruppe von Seiten**, die miteinander verbunden sind. Jedes Seitenset ist für eine spezielle Aufgabe gedacht, z.B. Symbolkommunikation.

## Seiten

Eine Seite besteht aus **Zeilen und Spalten, diese wiederum aus Feldern**. Jede Seite kann mit verschiedenen Zugriffsmethoden gesteuert werden.

## Felder

Felder können **Worte, Botschaften, Symbole und viele weitere Funktionen beinhalten**.

Zu vielen unserer Seitensets gibt es Leitfäden und Handbücher für den Einstieg, aber auch Tipps zu ihren Funktionen.

Diese finden bei geöffnetem Seitenset unter Optionen-Einstellungen-Seitenset-Dokumentation anschauen.

Beim ersten Öffnen von **Meine Seiten** werden Sie auf den Bildschirm **Seitensets hinzufügen** verwiesen, um die ersten Seitensets hinzuzufügen.

## Symbolkommunikation




Symbolbasierte Seitensets können zum Erkunden des **Kernwortschatzes** oder **zum Bilden von Sätzen** verwendet werden. Wörter werden zur leichtern Erkennung mit Bildern angezeigt. Dazu zählen Super Core, Voco Chat und Scripo.

## Textkommunikation



Textbasierte Seitensets bieten eine Reihe von **Tastaturlayouts** und zusätzliche Funktionen wie Sprachaufnahmen. Dazu zählen Text Talker , Fast Talker und Clavis.

## Interaktives Lernen

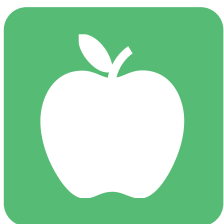

Unterhaltsame Aktivitäten, die zur Einführung von Ursache und Wirkung sowie Entscheidungsfindung und zur Erkundung des Zugangs mithilfe von Animationen und Spielen verwendet werden können.

## Barrierefreie Apps




Surfen Sie im Web, nutzen Sie Notizen oder verwenden Sie Social Media.

## 1.10

# Andere Sprachen


Einige Seitensets sind in mehreren Sprachen verfügbar. Vom Startbildschirm aus kann man im Menüpunkt **Seitenset hinzufügen** am unteren Bildschirmrand die gewünschte Sprache auswählen.

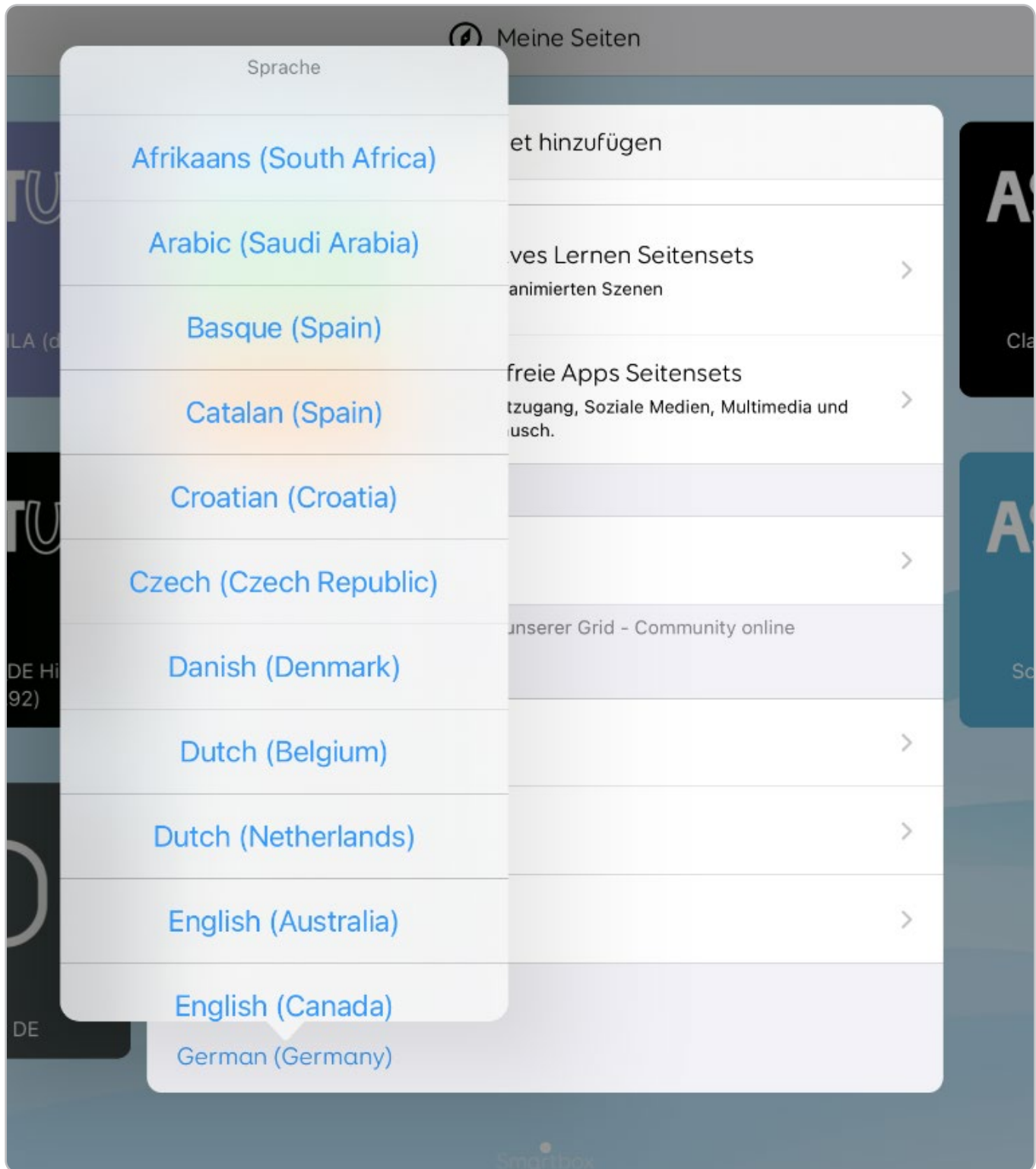

## 1.11

# Online Grids

Online Grids bietet Seitensets für eine riesige Bandbreite an Aufgaben. Es gibt hunderte Seitensets von unserer globalen Nutzer-Community.

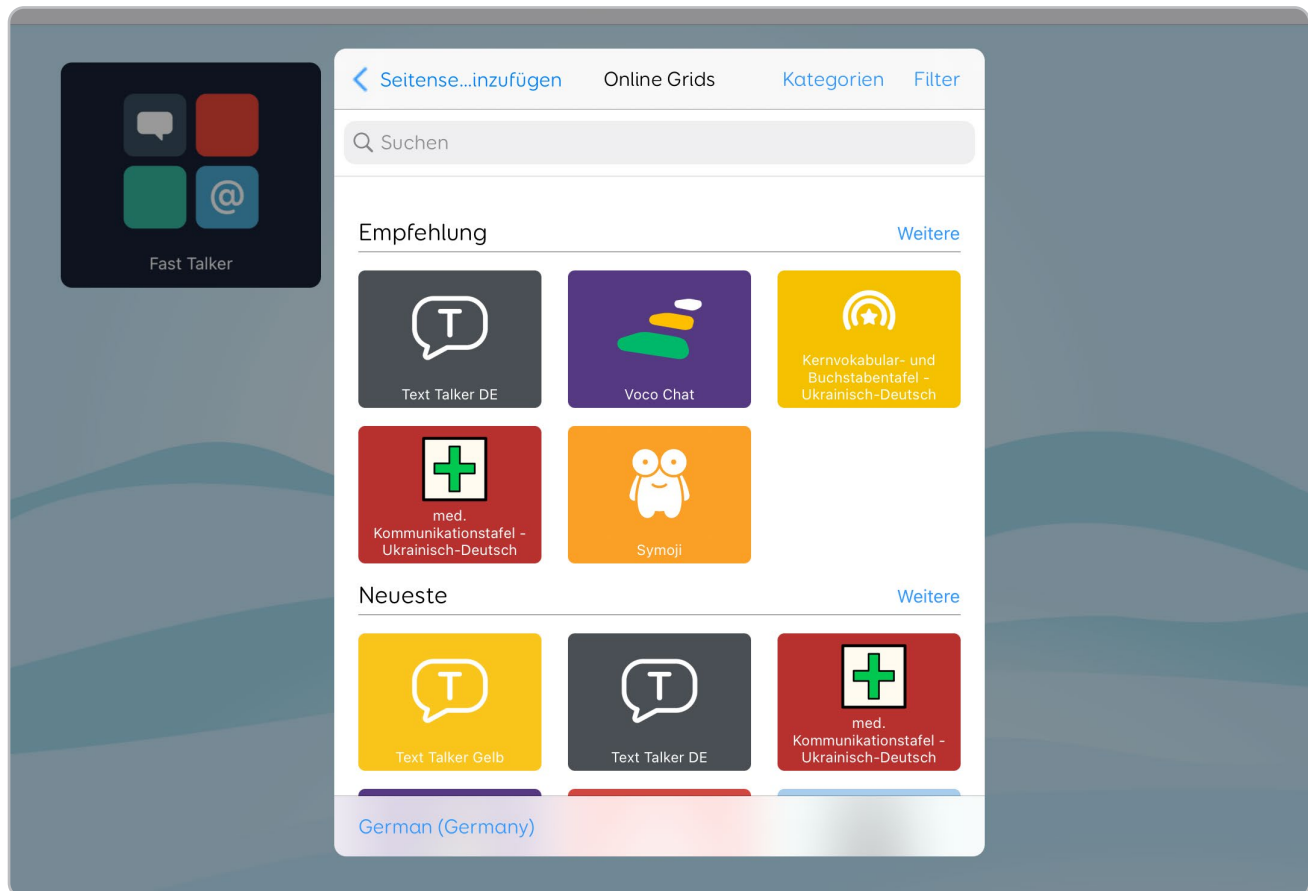

Wenn Sie **Online Grids** im Fenster **Seitenset hinzufügen** auswählen, sehen Sie beliebte und neu freigegebene Sets. Mit dem Lupe-Icon können Sie **Kategorien** und **Filter** für Ihre Suche einstellen.



## 1.12

# Das Seitenset-Menü

Wenn Sie sich in einem Seitenset befinden, ändert sich das Grid-Menü, um Ihnen mehr Optionen zu bieten.



### **Startseite**

Kehren Sie zur Startseite des Seitensets zurück.



### **Zurück**

Gehen Sie ein Seitenset zurück



### **Meine Seiten**

Schließen Sie das Seitenset und kehren Sie zu Meine Seiten zurück



### **Seite bearbeiten**

Öffnen Sie den Bearbeitungsmodus, um mit der Bearbeitung Ihres Seitensets zu beginnen



### **Wortliste bearbeiten**

Bearbeiten Sie die Wortliste auf Ihrer Seite, falls vorhanden.



### **Einstellungen**

Öffnen Sie die Grid-Einstellungen.



### **Wort finden**

Hier finden Sie schnell ein Wort in einem Seitenset und die Route zu diesem Wort.





### **Grid Guide**

Informationen über das Seitenset und Tipps zum Einstieg.

## 1.13 Wörter finden

Vielleicht suchen Sie in Ihrem Seitenset ein spezielles Wort und auch, wie Sie dorthin gelangen.

Das können Sie mit dem Werkzeug **Wort finden**.

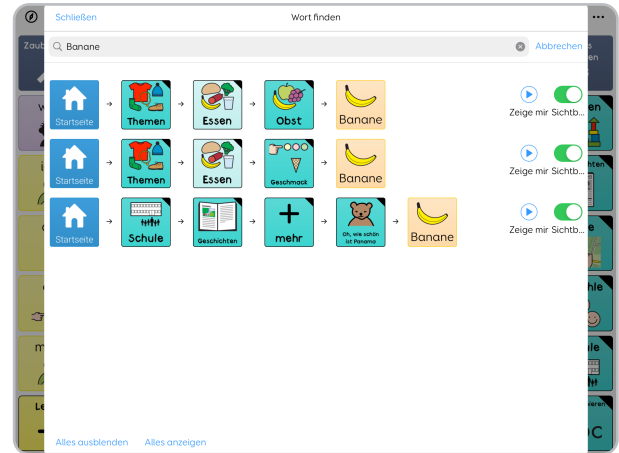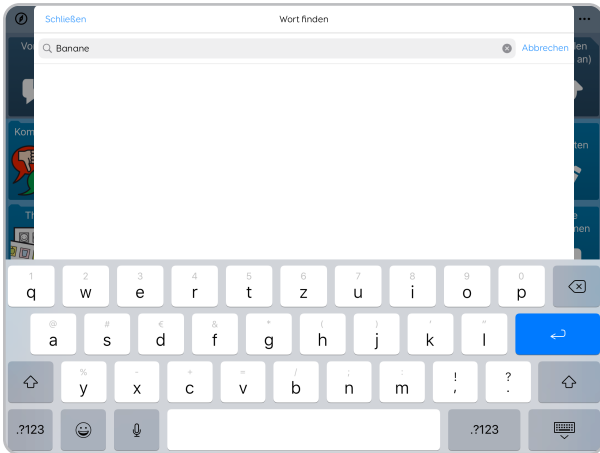


Wählen Sie im Menü **Optionen Wort finden**.


Geben Sie in die **Suchleiste das Wort** ein, das Sie suchen, z.B. „Banane“

Grid durchsucht Ihr Seitenset und **zeigt Ihnen den Weg vom Startbildschirm zu diesem Wort an**.


Ihnen werden **eventuell mehrere Wege angezeigt**, über die man den gesuchten Begriff finden kann.

Gehen Sie auf **Anzeigen oder drücken Sie Enter** und Grid **markiert die Felder in der Reihenfolge, die zum Begriff führen**.

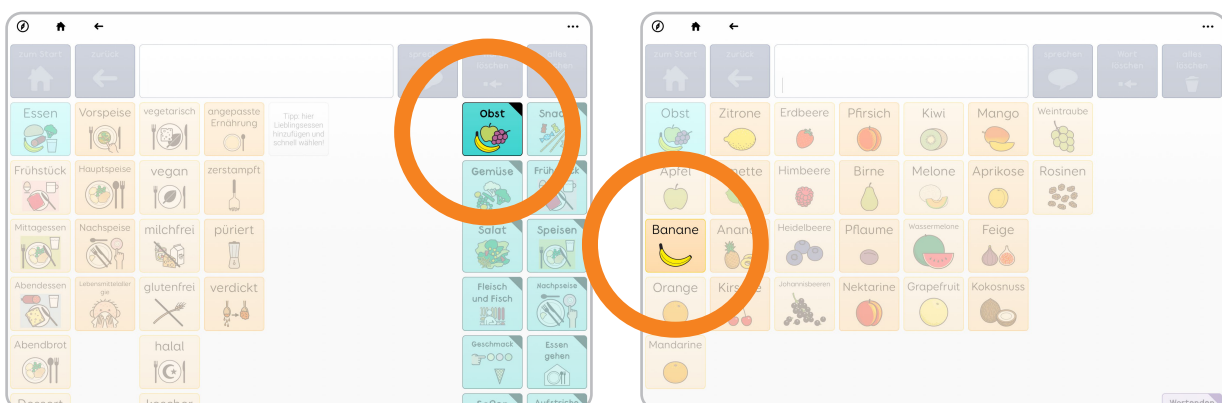

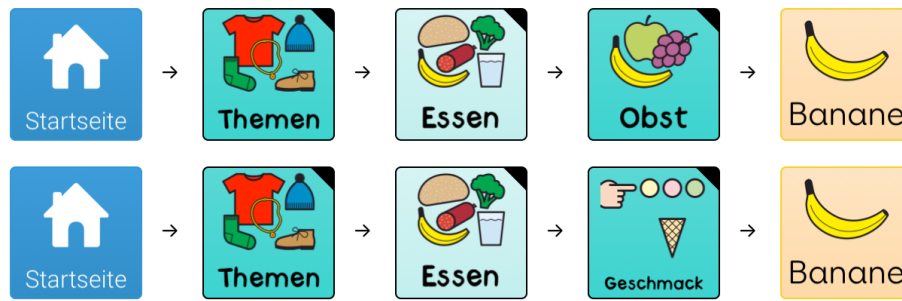

Mit dem Schalter **Sichtbar** kann man entscheiden, ob das Wort auf der letzten Seite des Weges hervorgehoben werden soll oder nicht.

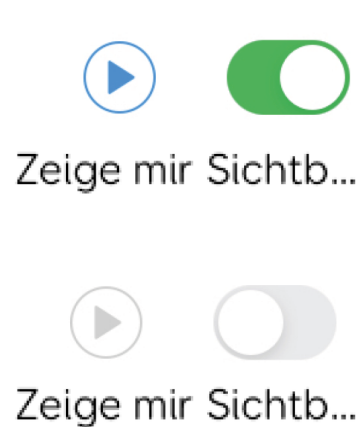

Zum Beispiel können Sie „Banane“ im Ordner Geschmack von Super Core ausblenden, es aber immer noch unter Obst anzeigen.

Sie können für ein Wort auch **Alles ausblenden** wählen.



**Alles anzeigen** setzt diese Einstellungen zurück und alle Wörter werden wieder angezeigt.


Erscheint ein Wort in einer Wortliste, **kann es nicht ausgeblendet werden.**

## 1.14


# Wörter finden

Text Talker ist ein **Seitenset auf Textbasis** mit vielen nützlichen Merkmalen zum effizienteren Schreiben von Nachrichten.

Ihre Nachricht erscheint im Textfeld oben auf der Seite und rechts davon sehen Sie den Befehl Sprechen.

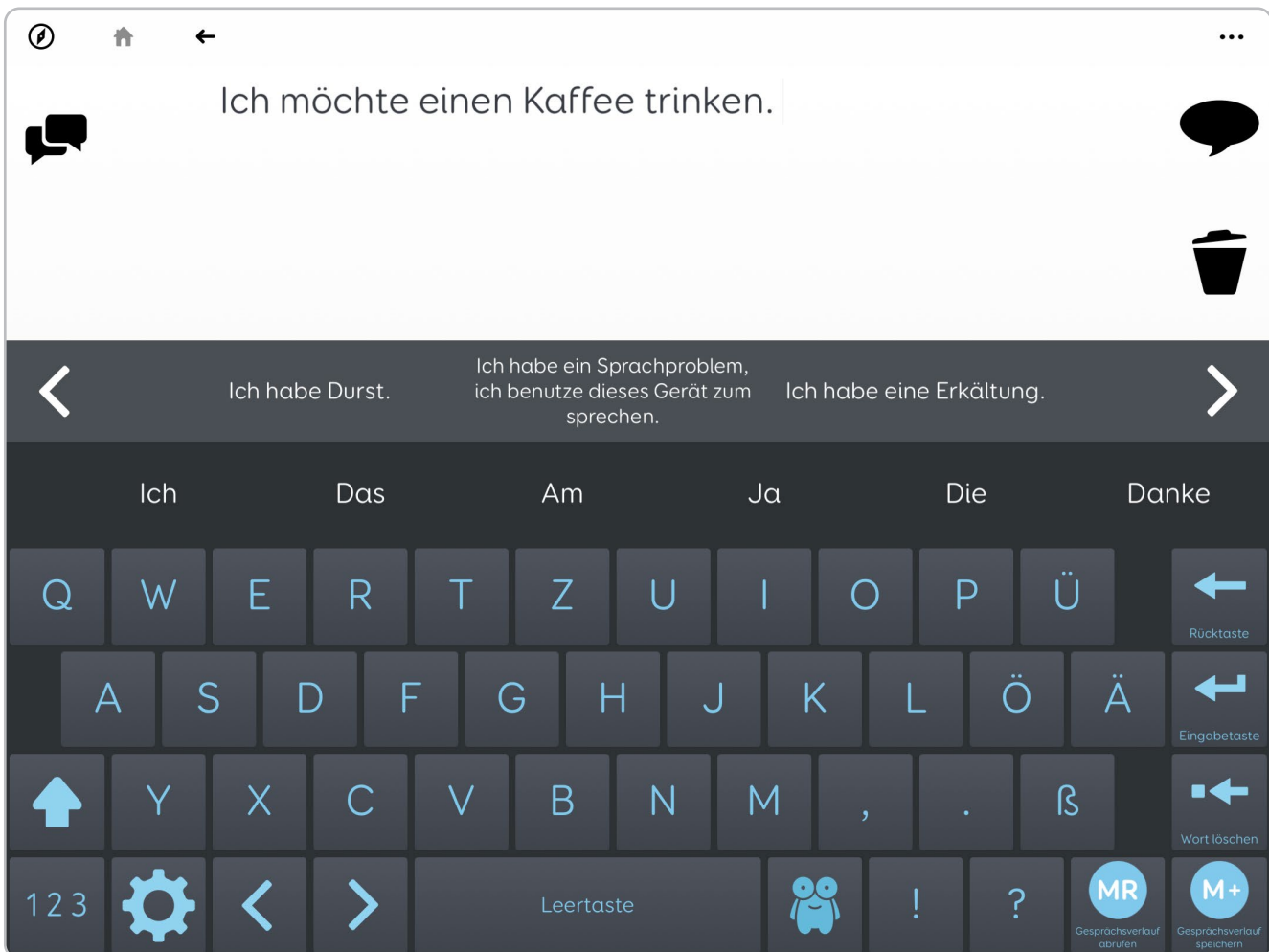

## Wortvorhersage und Gesprächsverlauf

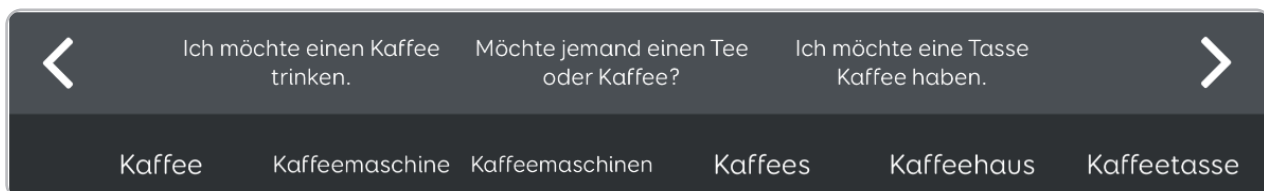

Text Talker zeigt Ihren Gesprächsverlauf und Wortvorhersagen auf dem gleichen Bildschirm an. Grid nutzt dazu die **SwiftKey Texterkennung**, die **das Wort vorschlägt, das Sie tippen**, sowie das nächste mögliche Wort.

**Der Gesprächsverlauf speichert alles**, was ausgesprochen wird und hilft Ihnen, es schnell wiederzufinden. Geben Sie mit der **Tastatur** z.B. „Kaffee“ ein, wird eine ganze Reihe **zugehöriger Ausdrücke** angeboten.

## Alternative Tastaturen

Viele Seitensets auf Textbasis haben alternative Tastaturanordnungen wie z.B. größere Felder, hohen Kontrast oder eine alphabetische Anordnung.

Diese befinden sich entweder in den Einstellungen der Seitensets oder als **Seitensets** im Fenster **Seitenset hinzufügen auf dem Startbildschirm**.

## 1.15

# Ihre Seitensets teilen


Sie können Ihre Seitensets mit anderen teilen und geräteübergreifend verwenden.

## Online Grids

Über Online Grids können Sie Seitensets mit anderen Nutzern von Grid teilen. Dafür benötigen Sie ein **Smartbox-Konto**. Wählen Sie in **Meine Seiten Optionen > Seitensets online freigeben**.

Alle Ihre aktuell geteilten Seitensets erscheinen.

Wenn Sie auf das + klicken, werden alle Ihre **teilbaren Seitensets** angezeigt.

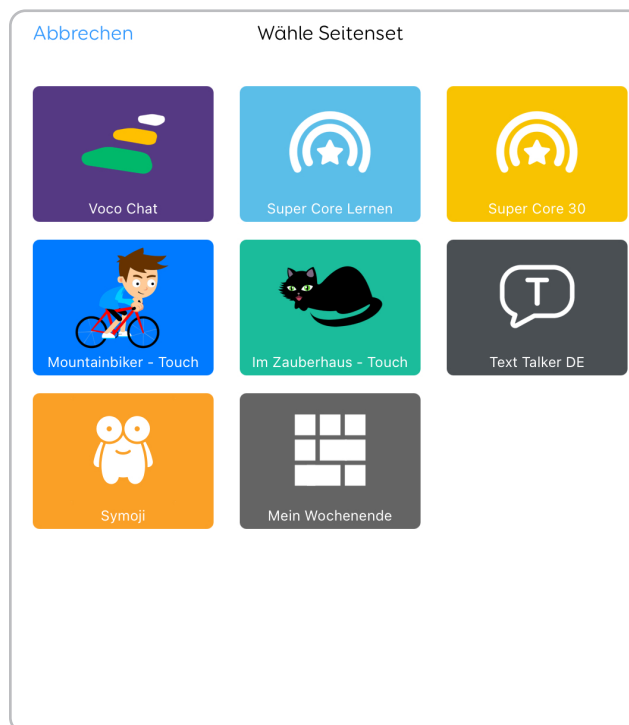

Wählen Sie Ihr Seitenset, wählen Sie eine Kategorie, formulieren Sie eine Beschreibung und benennen Sie das Seitenset entsprechend mit Tags/Schlüsselwörtern.



Seitensets, die auf Online Grids hochgeladen wurden, können jederzeit aktualisiert und zu einem späteren Zeitpunkt entfernt werden.

## Mehrere Geräte verwenden


Wenn Sie sich mit einem anderen Gerät über Grid 3 in Ihrem Smartbox- und Dropbox-Konto anmelden, **werden Ihre Seitensets und Einstellungen automatisch synchronisiert**. Sie können Ihre Seitensets auf beiden Geräten bearbeiten oder aktualisieren und alle Änderungen werden auf beiden Endgeräten gespeichert.



**Grid** for iPad

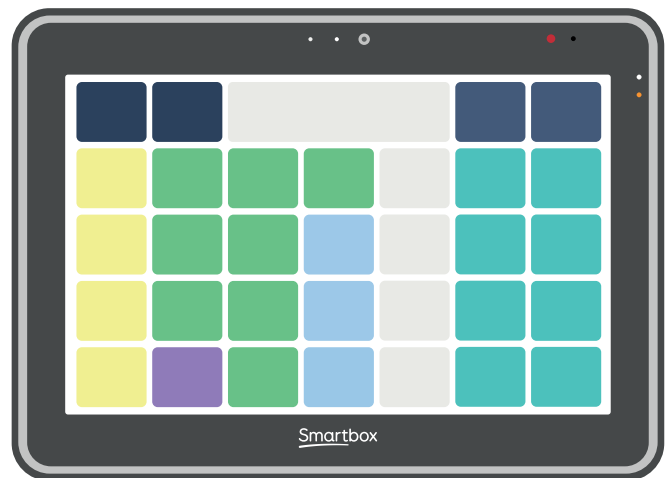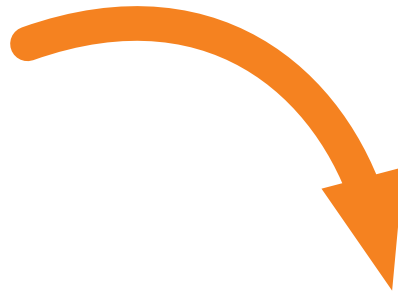

**Grid** 3

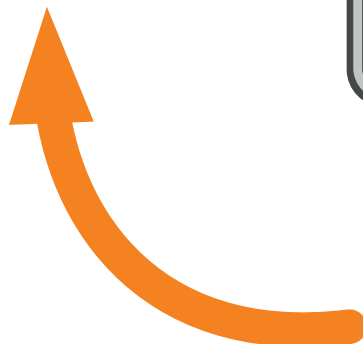

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen, die in Grid 3 vorhanden sind, in Grid für iPad verfügbar sind.

# 2

## **Bearbeitungsmodus**

**Personalisieren Sie Ihre Seitensets oder erstellen Sie Ihre eigenen Seitensets mit den umfassenden Bearbeitungswerkzeugen von Grid for iPad.**


2.1	Einleitung	34	2.15	Feldeigenschaften	64
2.2	Wie Seitensets angeordnet sind	35	2.16	Feldeigenschaften verwenden	65
2.3	Ein leeres Seitenset einfügen	36	2.17	Feldeigenschaften überschreiben	67
2.4	Auf die Bearbeitung vorbereiten	38	a.	Änderungen als neue Feldeigenschaften speichern	68
2.5	Der Bearbeitungsbildschirm	39	b.	Feldform	68
2.6	Änderungen speichern	40	c.	Füllfarbe des Felds	69
2.7	Ein Feld erstellen	41]	d.	Farbe der Feldumrandung	69
a.	Schreiben und Sprechen	42	e.	Feldumrandungsfarbe	70
b.	Aufnahme abspielen	47	f.	Schriftart	70
c.	Gehe zu einer anderen Seite	50	g.	Schriftgröße	71
2.8	Leeres Feld erstellen	52	h.	Schriftfarbe	71
2.9	Felder auswählen	53	i.	Zugänglichkeit des Feldes	72
2.10	Mehrere Felder erstellen	55	2.18	Seitenset	
2.11	Ein Feld verschieben	56	a.	Design	73
2.12	Feldgröße anpassen	57	b.	Feldlayout	74
2.13	Einem Feld Befehle hinzufügen	58	c.	Leere Felder	75
a.	Einen Befehl bearbeiten	60	d.	Felderabstand	75
b.	Einen Befehl entfernen	60	2.19	Grid	
c.	Mehrere Befehle verwenden	61	a.	Seitenhintergrund	76
d.	Die Reihenfolge von Befehlen ändern	61	b.	Seitenbefehle	78
2.14	Andere Feldtypen		c.	Zeilen und Spalten	80
a.	Schreibfeld	62	2.20	Randleiste des Seitensets	83
b.	Auto-Inhalt Felder	63	2.21	Optionen	
c.	Sprach-, Seiten- und Geräteinstellungen	63	a.	Eine neue Seite hinzufügen	87
			b.	Ihre Seitensets exportieren	88
			c.	Bearbeitung beenden	90
			2.22	Seitenset-Einstellungen	91

## 2.1

# Einleitung

Im Bearbeitungsmodus können Sie Ihre Seitensets **bearbeiten** und **personalisieren** oder ein neues Seitenset von Grund auf erstellen.

Im **Bearbeitungsmodus** haben Sie die vollständige Kontrolle über das Aussehen des Seitensets und können das Verhalten der einzelnen Felder ändern.

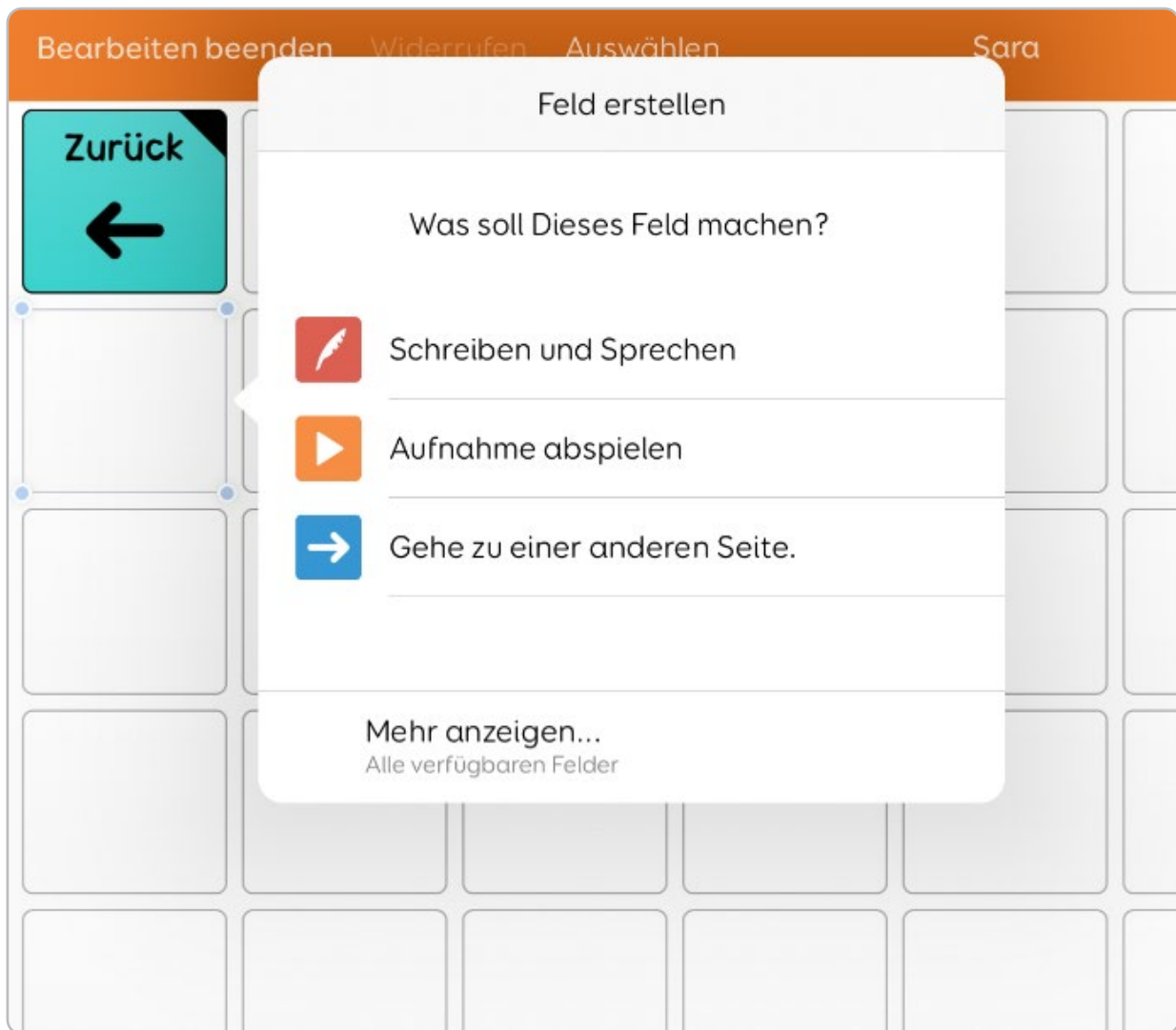

## 2.2

# Wie Seitensets angeordnet sind

Ihre Seitensets sind in **Seiten** und **Feldern** angeordnet. Diese **Zusammenstellung nennt man Seitenset**.



Ihr Seitenset kann **eine beliebige Zahl von Seiten umfassen, zwischen denen Sie hin- und herwechseln** können.

**Jede Seite besteht aus Feldern.** Ihre Seite kann aus bis zu fünfhundert Feldern bestehen, angeordnet in **Zeilen und Spalten**.

Jedes Feld kann in der Funktion, dem Aussehen und der Größe angepasst werden.

Das erste Seitenset, das Sie erstellen, wird automatisch zur **Startseite**.




Alle Verknüpfungen zurück zum Start führen Sie zur Startseite. Die **Start-Option** führt Sie auch auf diese Seite zurück. Beim Bearbeiten können Sie eine neue Seite zur Startseite ernennen.

## 2.3

# Ein leeres Seitenset einfügen


Unter **Seitenset hinzufügen** kann man ein leeres Seitenset erstellen.

Gehen Sie im **Meine Seiten Menü** auf **Seitenset hinzufügen**.

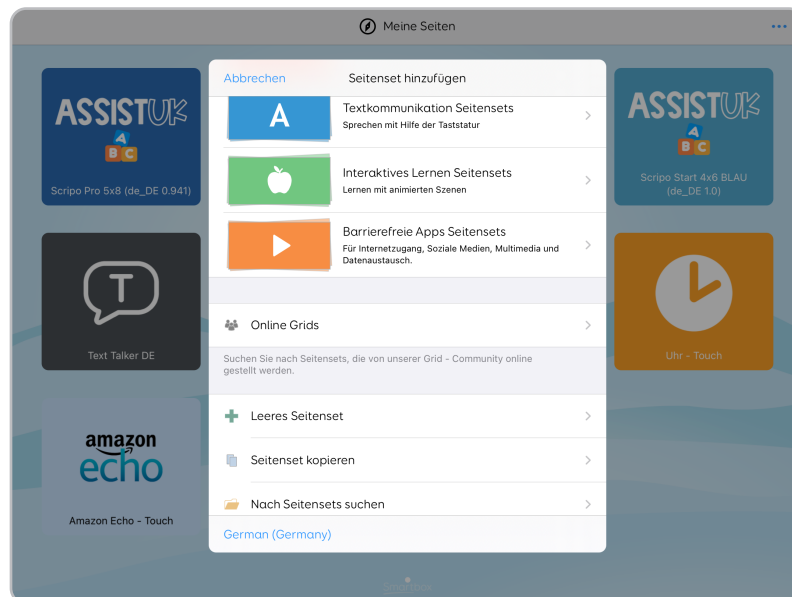


Wählen Sie **Leeres Seitenset**.

Benennen Sie das neue Seitenset.

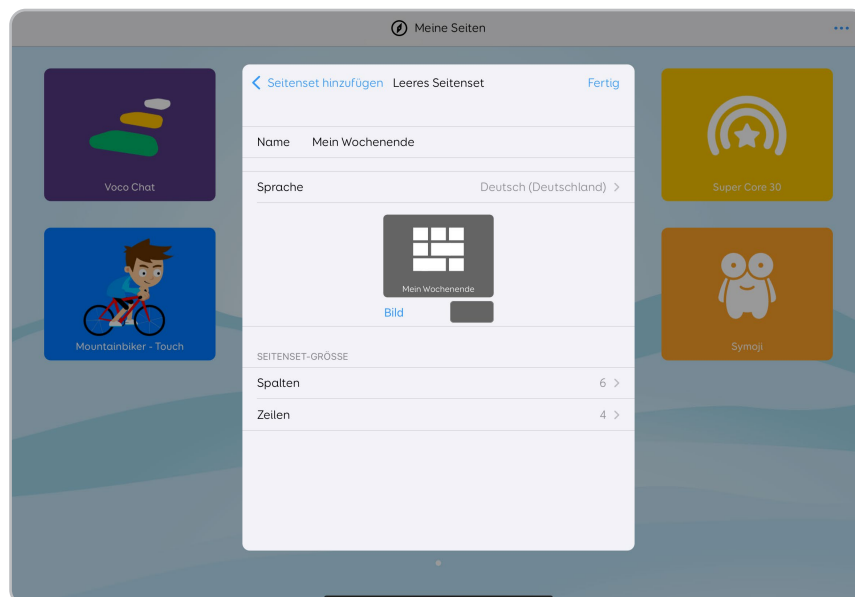

Sie können für Ihr Seitenset eine **Sprache** auswählen. Ihre Benutzersprache wird automatisch eingestellt. Wenn Sie die Sprache hier ändern, wird es sich auf das **Wörterbuch** und die **Aussprache** auswirken.

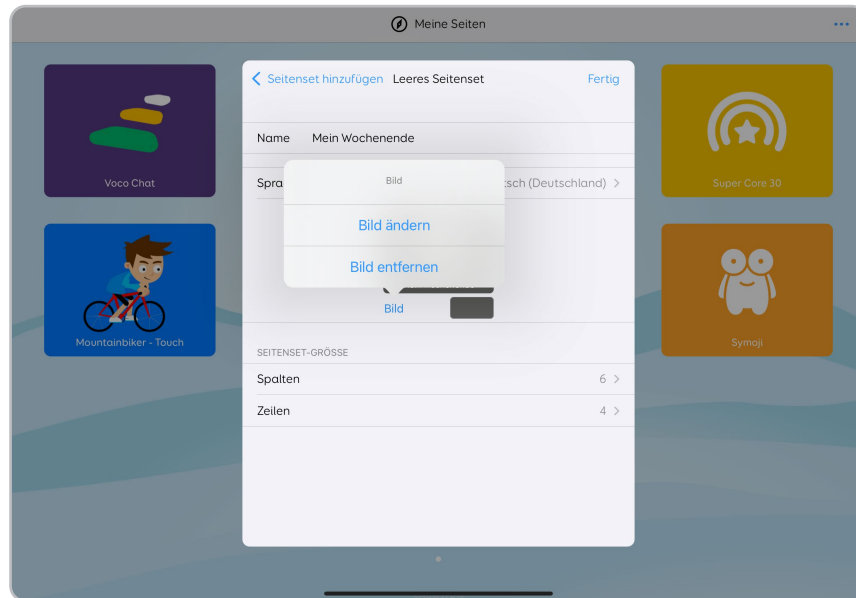

Über das Seitenset-Icon können Sie ein **Bild** und eine Hintergrundfarbe auswählen.

Die Anzahl der **Zeilen** und **Spalten** können Sie ebenfalls bestimmen.

## 2.4

# Auf die Bearbeitung vorbereiten

Beim Bearbeiten einer Seite werden Wörter, Symbole, Befehle usw. verändert.

**Machen Sie sich am besten eine Kopie des Seitensets, bevor Sie loslegen!**

Man kann **ein Seitenset von Meine Seiten** aus kopieren.

Wählen Sie **Optionen > Seitenset hinzufügen** aus und dann **Seitenset kopieren**.



**Wählen** Sie das Seitenset, das Sie kopieren möchten.

Sie können über das Fenster **Seitenset hinzufügen** auch Duplikate der Smartbox-Seitensets wie Super Core 30 und Text Talker erstellen. So brauchen Sie keine Angst haben, dass etwas kaputt geht oder Sie nicht mehr zum alten Stand zurück kommen.

## 2.5

# Der Bearbeitungsmodus

Im **Bearbeitungsmodus** werden die Ränder orange.

Oben im Bildschirm erscheinen die Grundbedienelemente.



- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Bearbeiten beenden</b> | - Speichert Ihre Änderungen und kehrt zum Seitenset zurück |
| <b>Widerrufen</b>         | - Macht die zuletzt vorgenommene Bearbeitung rückgängig    |
| <b>Auswählen</b>          | - Ermöglicht die Auswahl mehrerer Felder                   |
| <b>Seitenname</b>         | - Der Name der Seite, die Sie bearbeiten                   |



### Seitenset-Icon

- Öffnet die Seitenset-Symbolleiste



### Stil

- Öffnet die Feldeigenschaften-Symbolleiste



### Seite

- Öffnet die Seitensymbolleiste



### Optionen

- Öffnet die Seitenset-Optionen


Das aktuell geöffnete Seitenset wird auf dem Bildschirm angezeigt. Falls Sie die Optionen geöffnet haben, wird das Seitenset minimiert angezeigt.

## 2.6

# Änderungen speichern

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Bearbeitung beenden**, speichern so Ihre Änderungen und gelangen zurück auf Ihre Seite.

Wenn Sie die Änderungen verwerfen möchten, tippen Sie auf **Optionen > Änderungen verwerfen**.

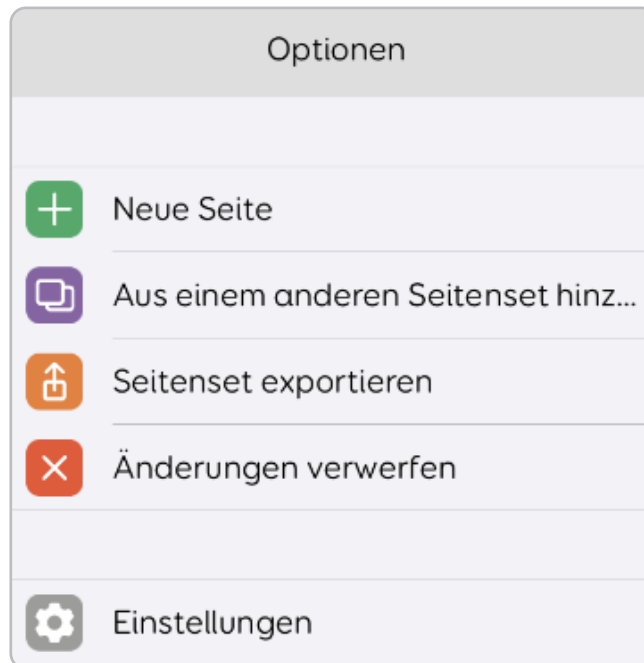

Beachten Sie, dass Ihre Änderungen nicht gespeichert werden, wenn Grid for iPad nicht mehr im Bearbeitungsmodus ist.

## Was, wenn ich etwas „kaputt“ mache?

### Keine Panik!

Wenn Sie glauben, dass Sie etwas falsch bearbeitet haben oder Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, können Sie die letzten Änderungen mit **Widerrufen** aufheben. Außerdem können Sie über **Optionen > Änderungen verwerfen** alles aufheben und gelangen zurück auf Ihre Seite.

Machen Sie zur Sicherheit ein Backup des Nutzers, bevor Sie eine Bearbeitung beginnen. Siehe dazu auch Seite 92, 2.21b "Grid Sets exportieren".

Wenn Sie ein Smartbox-Seitenset bearbeiten, können Sie es nochmal hinzufügen und mit den Original-Inhalten von vorne anfangen.


## 2.7

# Ein neues Feld erstellen

Gehen Sie auf ein leeres Feld und der Kasten **Feld erstellen** erscheint. Das gewählte Feld wird auch mit blauen Ecken markiert.

**Feld erstellen** bietet drei Hauptoptionen:


**Schreiben und Sprechen**, **Aufnahme abspielen** und **Gehe zu einer anderen Seite**.

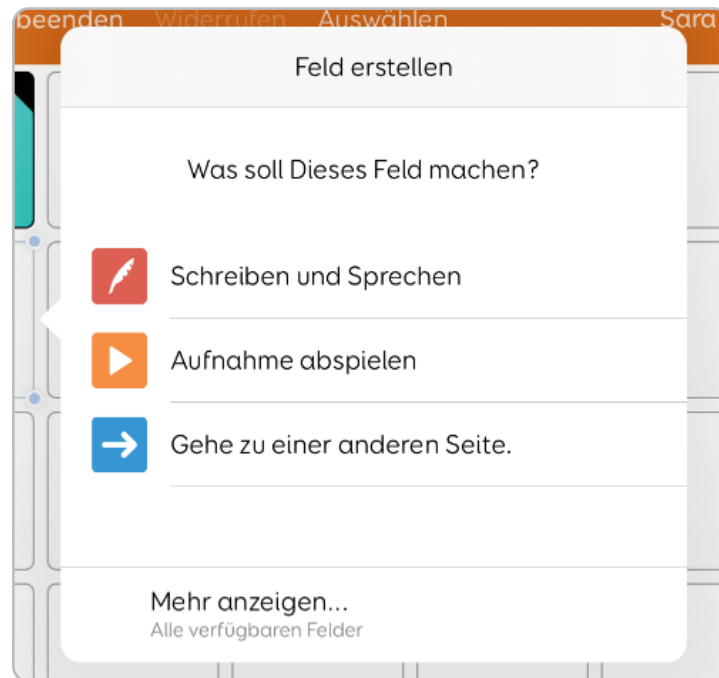



Wählen Sie das Gewünschte aus, dann vergrößert Grid das Feld und bietet weitere Optionen an.

# a. Schreiben und Sprechen

Wählen Sie **Schreiben und Sprechen** aus, dann vergrößert Grid das Feld und die **Tastatur** erscheint, sodass Sie eingeben können, was das Feld laut aussprechen soll.

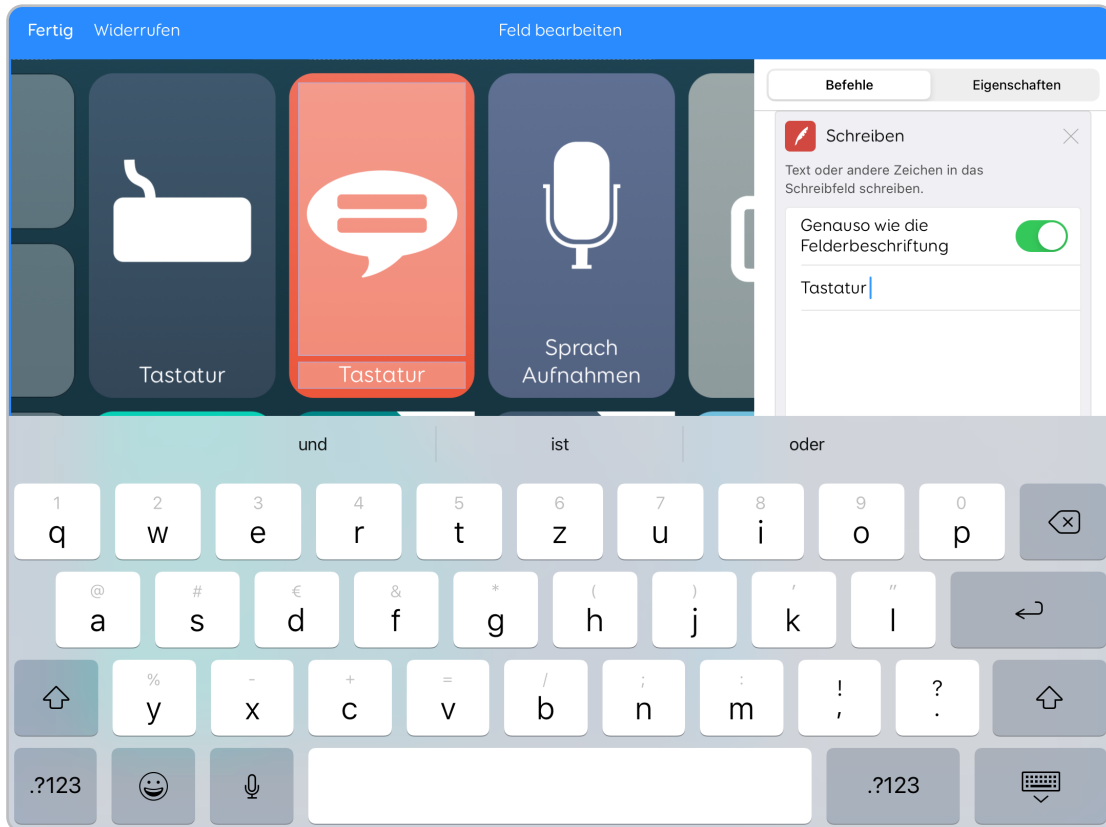


Der **Schreibbefehl** fügt die Beschriftung in ein **Schreibfeld** ein und liest sie auch laut vor, wenn Sie **Sprechen bei Texteingabe** aktiviert haben.

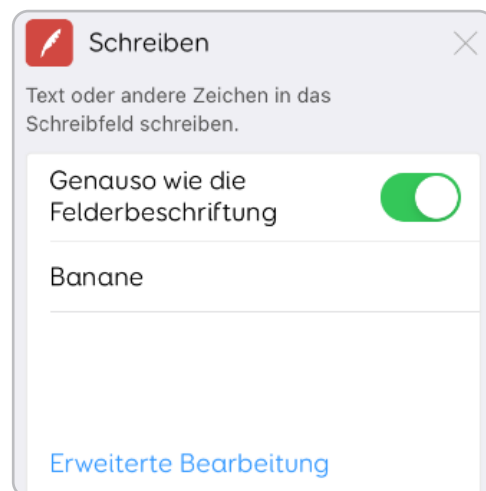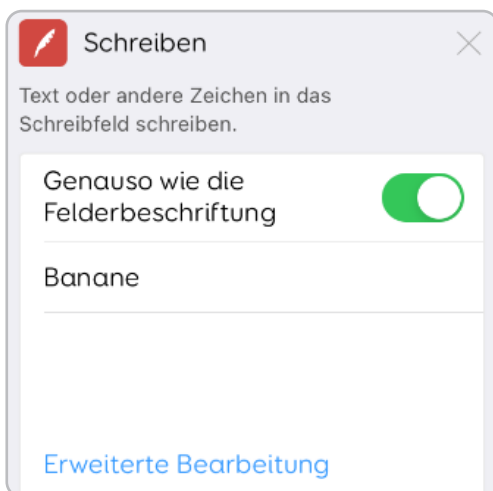


Die **Beschriftung** entspricht **standardmäßig dem ausgesprochenen Text**, Sie können aber auch in den Befehlen den Schalter **genauso wie Felderbeschriftung** deaktivieren.

Dann können Sie von der Felderbeschriftung abweichende Phrasen eingeben.

Während Sie die Beschriftung eingeben, wird im Bildbereich ein Symbol vorgeschlagen.

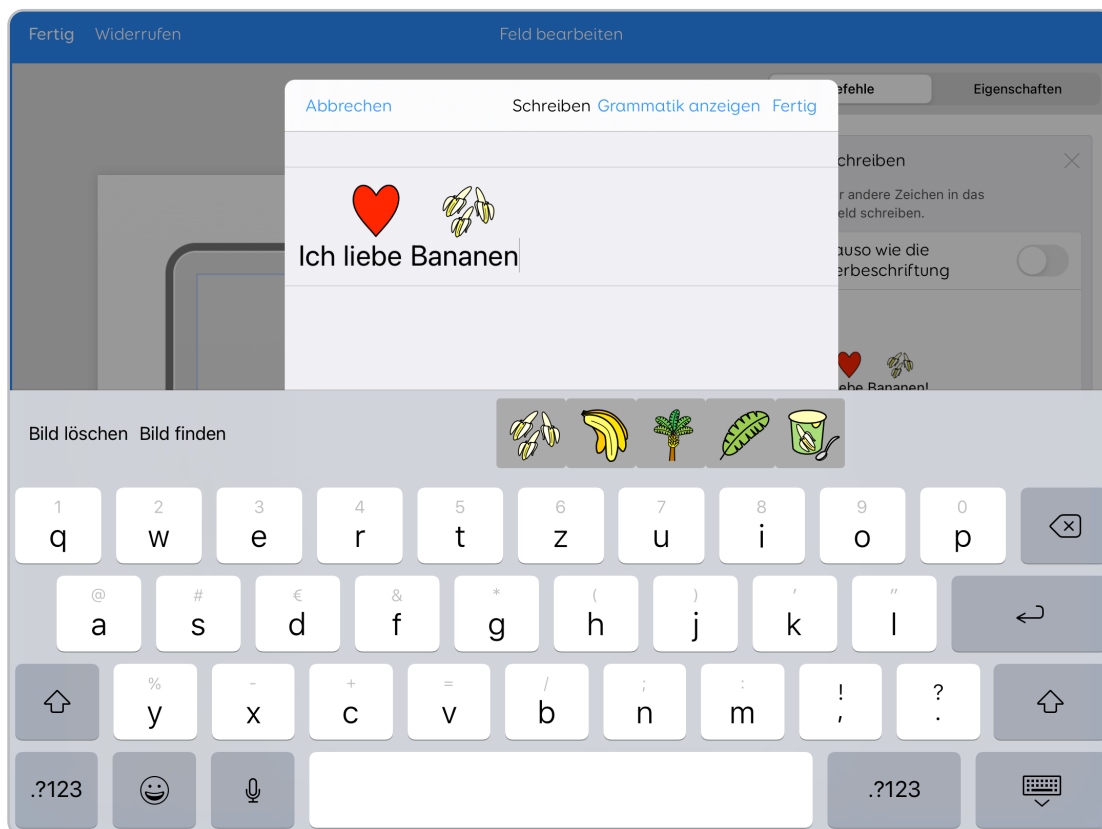

Um weitere Symbolvorschläge zu erhalten bzw. die vorhandenen zu ändern, wählen Sie **Erweiterte Bearbeitung**. Tippen Sie auf das Symbol, um weitere passende Bilder angezeigt zu bekommen.

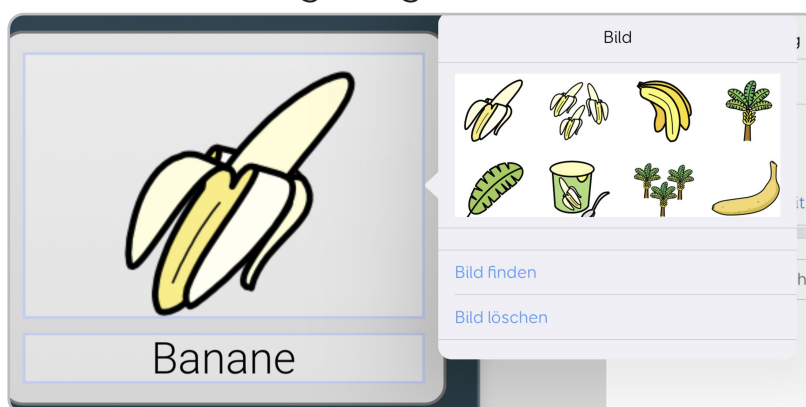

Unter **Bild** finden Sie vier Optionen:


- **Symbole**
- **Foto-Bibliothek**
- **Web-Suche**
- **Kamera**

Abbrechen	Bildersuche
Symbole	>
Foto-Bibliothek	>
Web-Suche	>
Kamera	>

## Symbole



Durchsuchen Sie hier mithilfe der Bezeichnung Ihre installierten **Symbolverzeichnisse** nach Bildern.

Mit einem anderen Suchbegriff können Sie weitere Symbole finden.

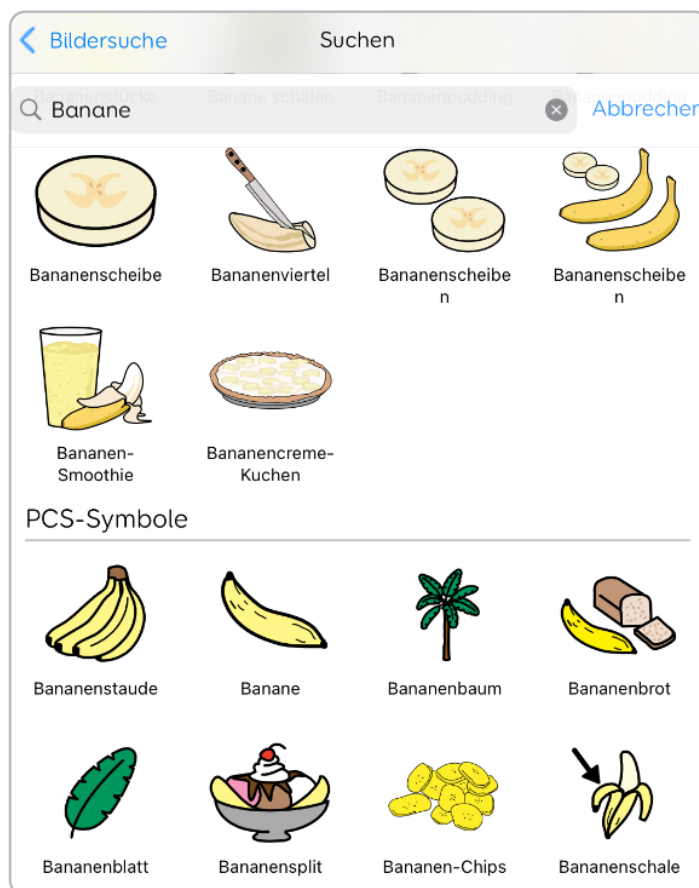

# Foto-Bibliothek

Ihre **iPad-Foto-Bibliothek** speichert alle Bilder, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen oder von anderswo abgespeichert haben. Sie können auch eins dieser Fotos als Feldbild auswählen.

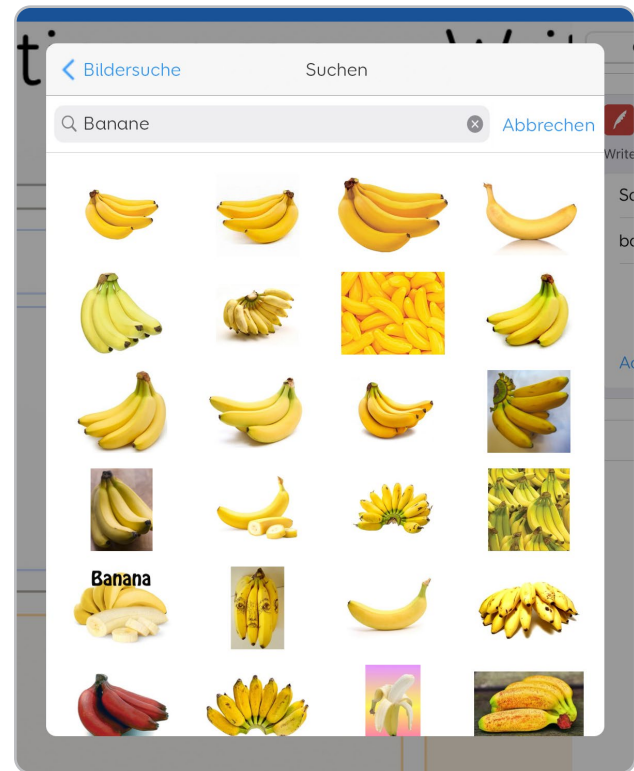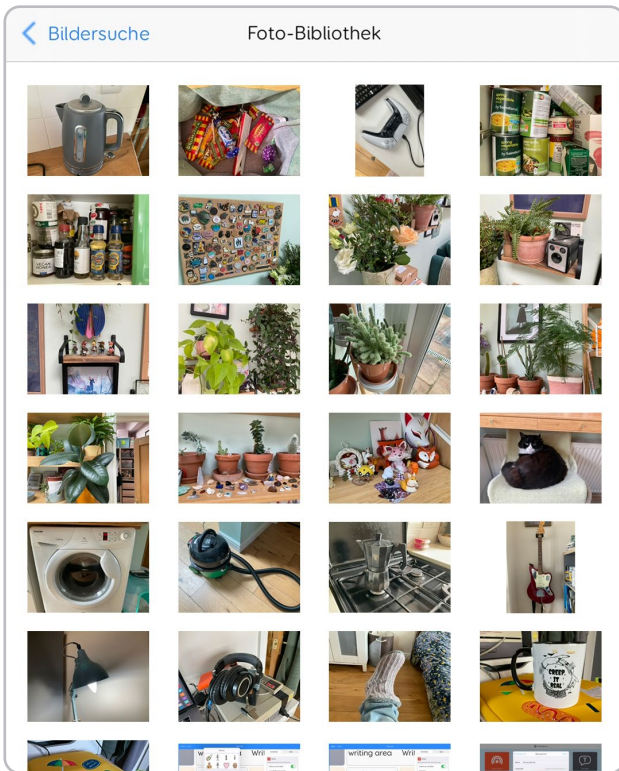

# Web-Suche

Führt eine sichere Web-Suche nach der Feldbezeichnung durch. Vor Suchbeginn können Sie den Suchbegriff bearbeiten, um zutreffendere Ergebnisse zu finden.

Mit der Eingabetaste starten Sie die Suche.


# Kamera

Mit beiden iPad-Kameras können Sie ein Bild für Ihr Feld aufnehmen.

Halten Sie das Gerät vor das Objekt, das Sie fotografieren wollen, und tippen Sie auf **Aufnahme**.

Unten im Fenster können Sie zwischen der **Front- und Rückkamera** umschalten.


Beachten Sie, dass Bilder, die Sie mit der **Kamera-Option** aufnehmen, nicht in der Foto-Bibliothek gespeichert werden.

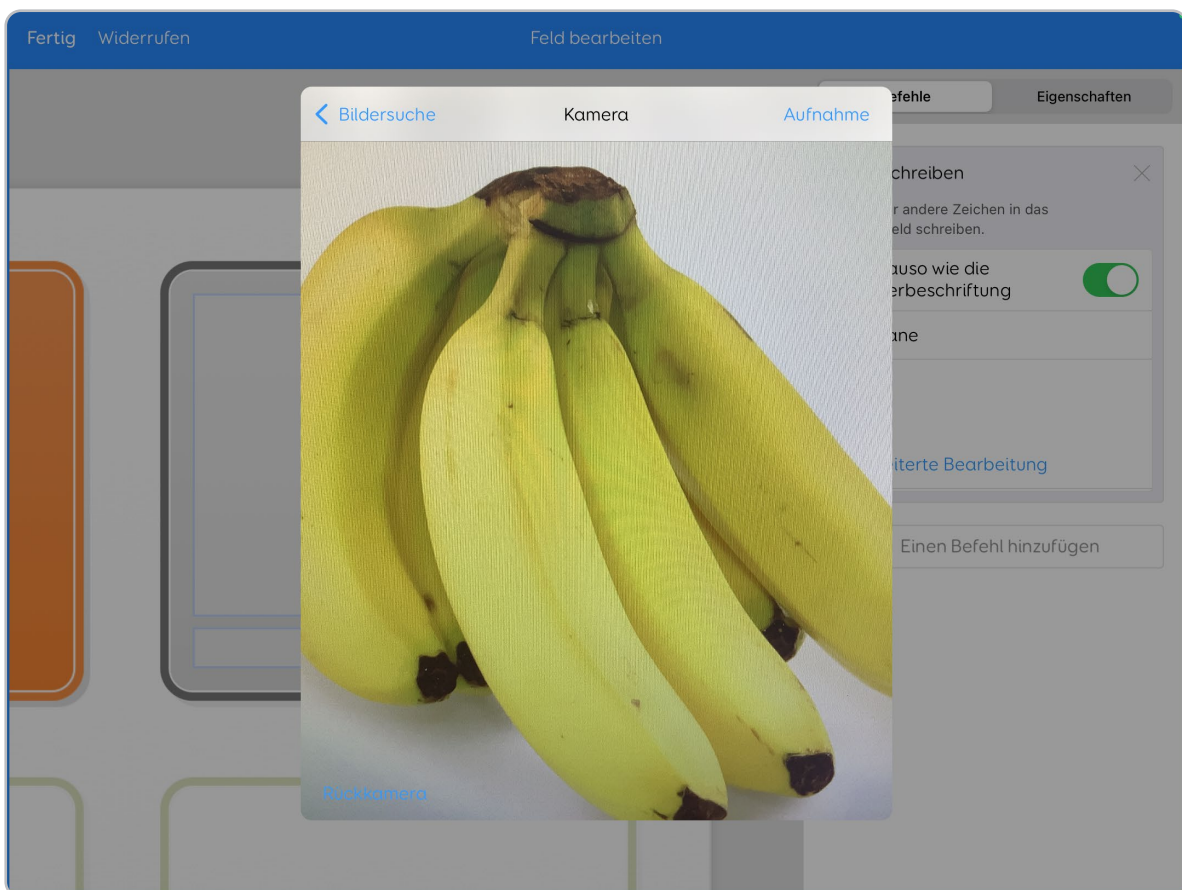

## b. Aufnahme abspielen

Mit der Option **Aufnahme abspielen** erstellen Sie ein Feld mit dem Befehl **Ton abspielen**.

Die Beschriftung und das Bild können wie bei anderen **Schreiben und Sprechen-Feldern** verändert werden.

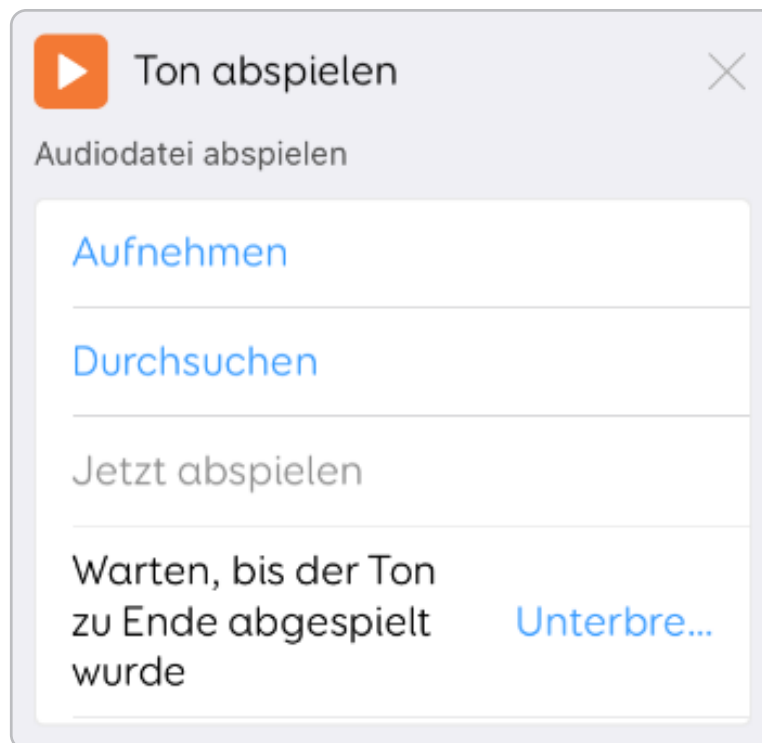

Die Option **Ton abspielen** erscheint unter **Befehle**.

Tippen Sie auf **Aufnehmen**, um einen Ton **aufzunehmen**.





So wird mit dem Mikrofon des iPads der Ton aufgenommen. Wählen Sie dann **Aufnahme stoppen**.

Zur Vorschau des Tons tippen Sie auf **Jetzt abspielen**.

Um die letzte Aufnahme zu **überspielen**, gehen Sie nochmal auf **Aufnehmen**.

Unter **Durchsuchen** können Sie aus einer Reihe von **Effekten** und gespeicherten **Aufnahmen** wählen.







Eine Bibliothek Ihrer Aufnahmen sowie Effekte befinden sich in diesem Popup unter **Aufnahmen**.

-  Essen und Trinken >
-  Klingeln und Signaltöne >
-  Knall-Päng-Bumm >
-  Kurze Töne >

Im Bereich **Aufnahmen** können Sie ebenfalls aufnehmen und Ihre Aufnahmen verwalten. Drücken Sie **Aufnahmen**, um eine Aufnahme zu starten und **Stop**, um diese zu beenden. Danach werden Sie aufgefordert, einen Namen für diese Aufnahme zu vergeben.

Eine Vorschau der Aufnahme können Sie sich mit dem Knopf **Abspielen** anhören.


< Tondateien-Suche    Aufnahmen    Aufnehmen    Bearbeiten


-  Hallo 
-  Wie geht es Jakob? 
-  Ich möchte einen Cappuccino, bitte. 

Wenn Sie **Aufnehmen** tippen, starten Sie eine neue Aufnahme. Wenn Sie fertig sind tippen Sie auf **Aufnahme beenden**. Dann werden Sie aufgefordert, Ihre Aufnahme per Tastatur zu benennen. Gehen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Mit dem roten Symbol entfernen Sie eine Aufnahme und mit **Löschen** bestätigen Sie. Mit **Umbenennen** können Sie den Dateinamen Ihrer Audiodateien ändern.

Die Befehle für **Ton abspielen** können Sie auch in den Abspiel-Optionen einstellen. Mit der Option **Warten, bis Ton zu Ende abgespielt wurde**, können Sie einstellen, ob das Abspielen des Toneffekts von anderen Aktionen unterbrochen werden kann.

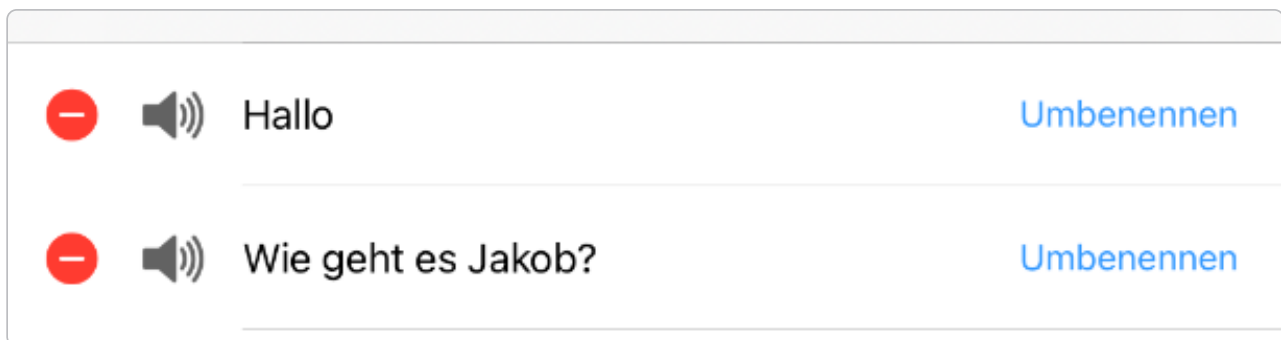

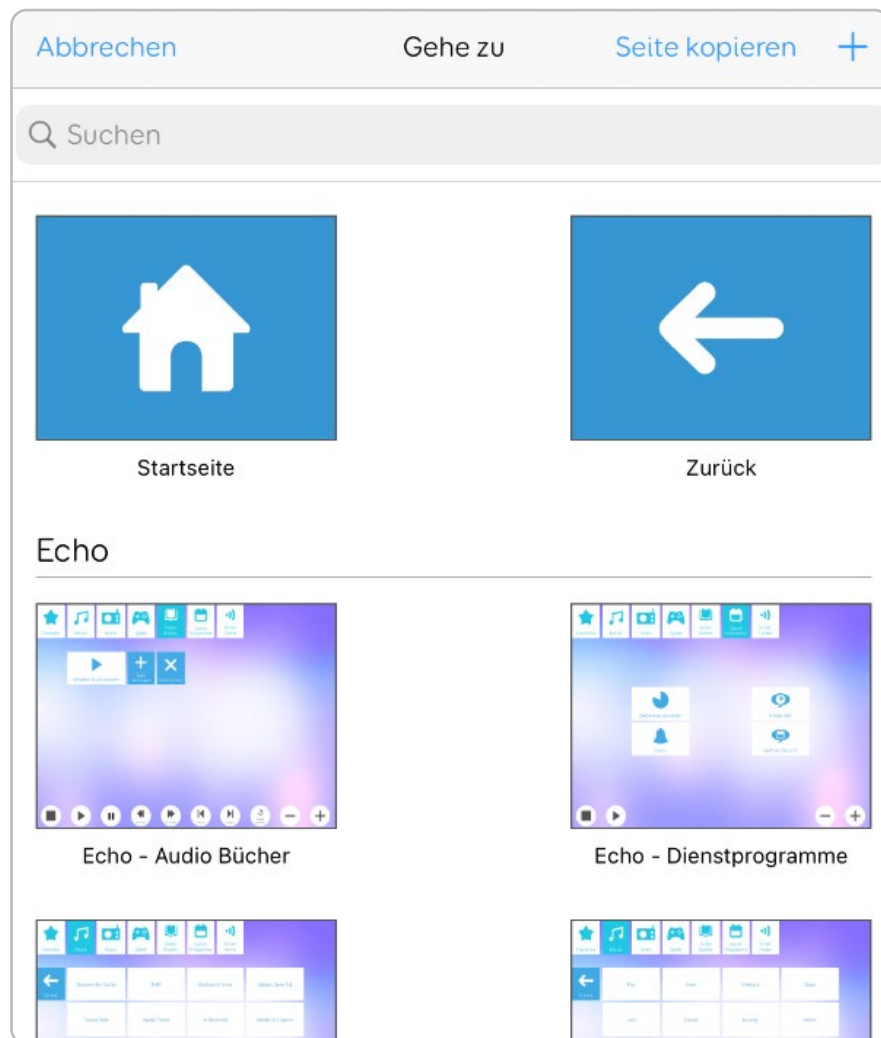

## c. Gehe zu einer anderen Seite

Wählen Sie **Gehe zu einer anderen Seite**, um ein neues Feld zu erstellen, das zu einer anderen Seite führt.

Der Befehl **Gehe zu** bietet die Optionen, zur Startseite und Zurück zu springen.

Wenn er aktiviert ist, führt Sie **Startseite** zur Seite, die Sie als Startbildschirm eingestellt haben.

Mit **Zurück** kehren sie zur vorigen Seite zurück.

Außerdem wird eine Liste anderer Seiten im Seitenset angezeigt. Sie können aus dieser Liste auswählen, wohin die Verknüpfung führen soll.

Mit der Option **Seite kopieren** können sie eine Seite aus Ihrem Seitenset auswählen und duplizieren. Wenn Sie die Seite ausgewählt haben, die Sie kopieren möchten, können Sie die Kopie umbenennen. Drücken Sie die Eingabetaste oder **Fertig**.


Zusätzlich können Sie eine neue Seite mit dem **+** Icon erstellen.

Sie können die neue Seite umbenennen. Sie können außerdem die Anzahl an Zeilen und Spalten Ihrer neuen Seite anpassen.

Sie können die Beschriftung und das Bild ändern.

In den **Befehlen** können Sie ändern, zu welcher Seite die Verknüpfung führen soll.

Nach Auswahl einer Seite erscheint das Menü **Gehe zu**. Hier haben Sie die Möglichkeit, **Seite folgen** auszuwählen; diese Option bringt Sie zur gewählten Seite, während Sie im Bearbeitungsmodus sind. Wenn Sie eine neue Seite erstellt haben, wird diese automatisch eine Zurück-Taste haben, die Sie zur vorherigen Seite zurück bringt.

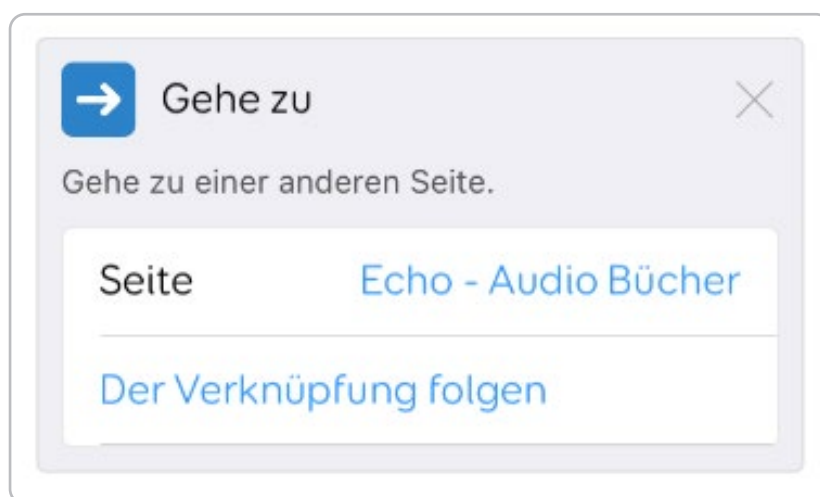


## 2.8

# Mehr anzeigen

Für ein Feld, das keine Befehle oder Aktionen aufweist, tippen Sie **Mehr anzeigen...** und dann auf **Leeres Feld erstellen**.

Leeres Feld erstellen

Ein leeres Feld kann ebenfalls mit Bild und Beschriftung versehen werden.

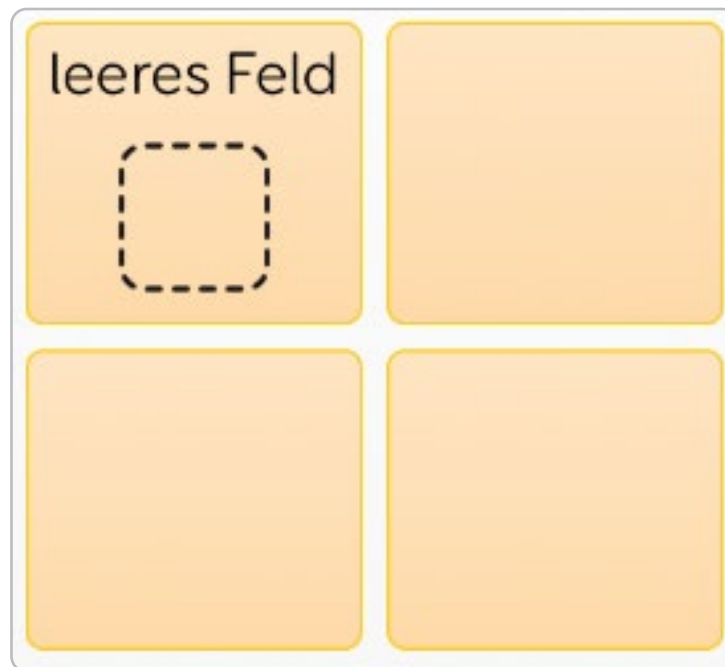


## 2.9

# Felder auswählen

Sie können ein Feld im Bearbeitungsmodus auswählen, indem Sie es antippen.


Einmal **antippen** und Sie bekommen **schnelle Optionen** und die **blauen Ecken** des Feldes angezeigt.

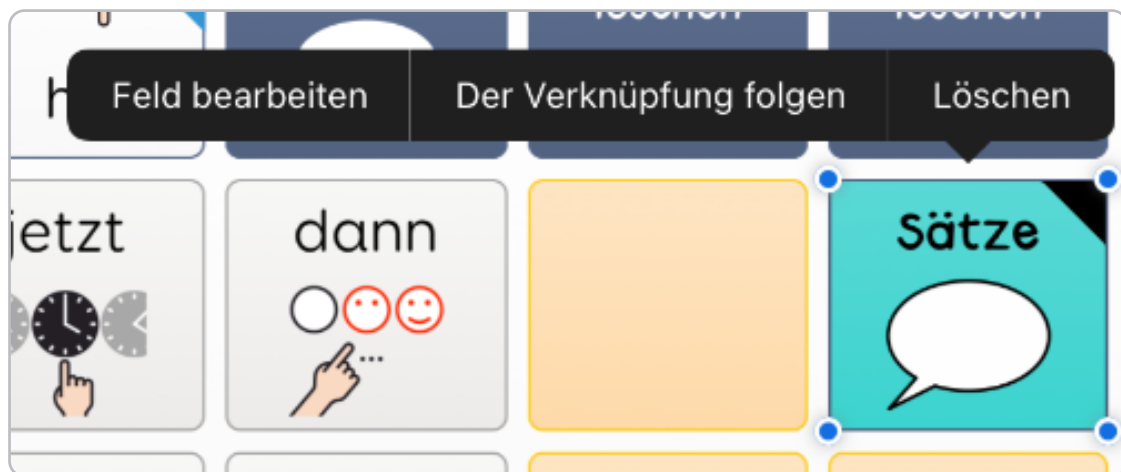

Mit dieser Option kann man das Feld **Bearbeiten** oder **Löschen**. Tippt man auf ein Verknüpfungsfeld, kann man auch der Verknüpfung folgen. **Tippen Sie neben das markierte Feld, um die Bearbeitung des Feldes abzubrechen bzw. ein anderes Feld zum Bearbeiten auszuwählen.**

**Der Befehl Feld bearbeiten** vergrößert es, zeigt den Befehle-Browser an und Sie können ein Bild und eine Beschriftung hinzufügen.

Um den Bildschirm **Feld bearbeiten** zu verlassen und wieder die ganze Seite zu sehen, tippen Sie auf **Fertig** oben in der Ecke oder auf ein anderes Feld.

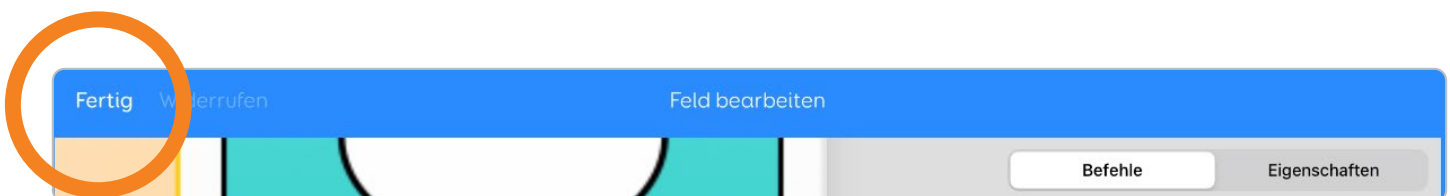

Mit **Löschen** entfernen Sie das Feld von der Seite. Sie können immer **Widerrufen** klicken, wenn Sie das Feld aus Versehen entfernt haben!

## Mehrere Felder auswählen

Mit **Auswählen** im oberen Menü schalten Sie Ihre Seite in den **Auswahlmodus** um.



Dann können Sie **mehrere Felder auf einmal auswählen**.

Der kleine Haken in der Ecke zeigt an, welche Felder ausgewählt wurden.

Ihnen stehen die Befehle **Löschen** und **Kopieren** für diese Felder am oberen Bildschirmrand zur Verfügung.

Wenn Sie Felder auf eine andere Seite kopieren wollen, wählen Sie **Kopieren** und dann **Fertig** und gehen dann auf die Seite, in die Sie Felder einfügen wollen. Tippen Sie **Auswählen** und dann **Einfügen**.


**Hinweis:** Dies wird ggf. vorhandene Felder überschreiben!

## 2.10

# Mehrere Felder erstellen


Im Auswahlmenü kann man mehrere Felder erstellen. Diese Funktion steht ausschließlich bei leeren Feldern zur Verfügung!

Gehen Sie auf **Auswählen** und tippen auf leere Felder, um sie auszuwählen.

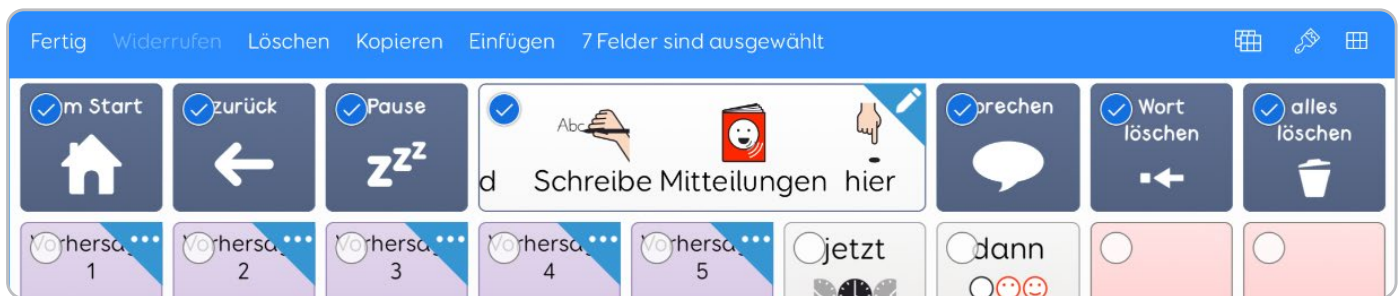

Im Menü oben sehen Sie die Option **Feld erstellen**, die verfügbare Feldtypen aufzählt.


Dabei handelt es sich um **Auto-Inhalt Felder**, die automatisch anhand von Listen befüllt werden, die in Ihrem Benutzerprofil oder Ihren Seitensets gespeichert sind.

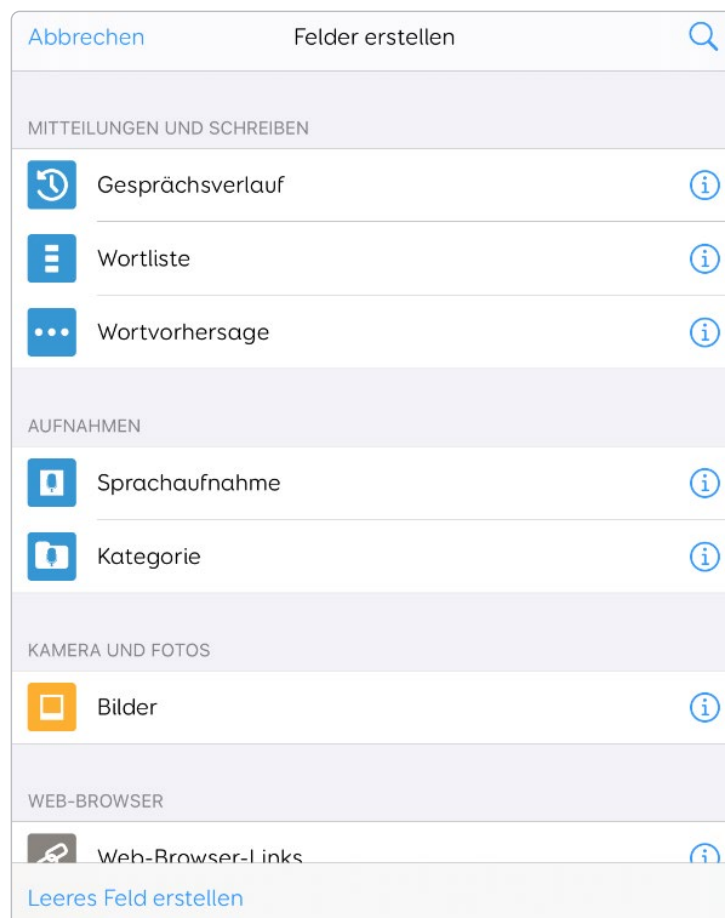

## 2.11

# Ein Feld verschieben

Verschieben Sie ein Feld auf Ihrer Seite, indem Sie das Feld antippen und halten.

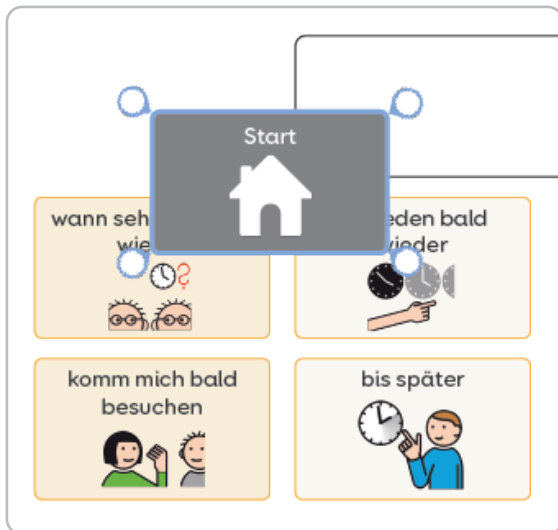

Dann können Sie das Feld auf der Seite verschieben. Andere Felder ordnen sich um dieses Feld an, während es bewegt wird.



Felder, die größer als eine Zeile oder Spalte sind, schrumpfen um sich dem Feld anzupassen, während es bewegt wird.

## 2.12

# Feldgröße anpassen

Tippt man auf ein Feld, erscheinen **in jeder Ecke vier Punkte**.

Man kann **einen Punkt antippen und halten**, um die Feldgröße zu ändern. Wenn man loslässt, wird die Größe beibehalten.

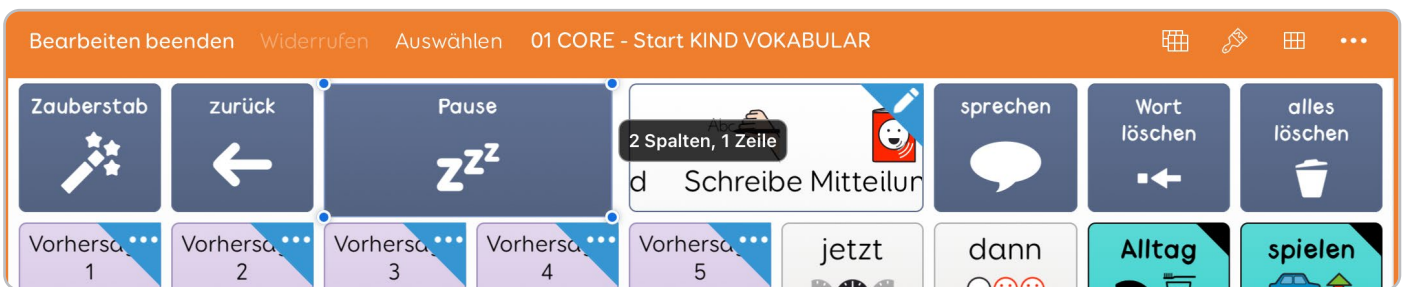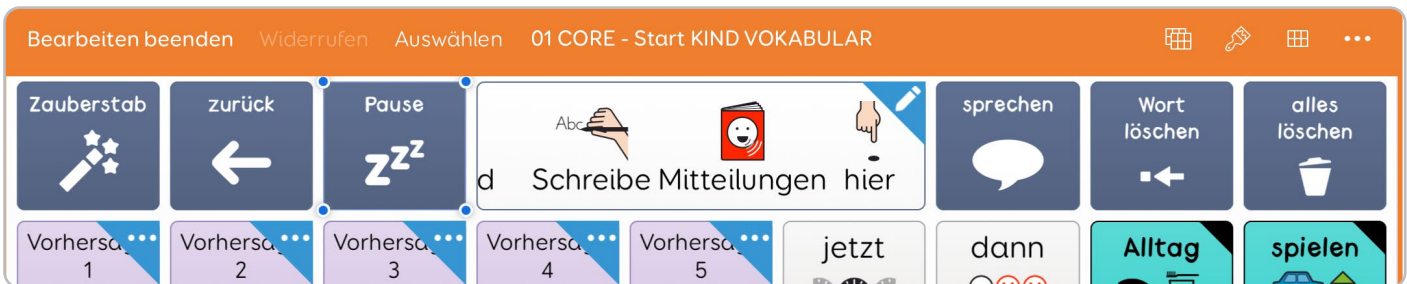

Während man die Feldgröße ändert, **passen sich die anderen Felder dieser Veränderung an**. Wenn diese Felder keinen Platz mehr haben, werden sie gelöscht.

Während man die Feldgröße verändert, erscheint eine Angabe dazu, wie viele Zeilen und Spalten das Feld einnimmt, sodass man es leicht dem restlichen Seitendesign anpassen kann.


## 2.13

# Einem Feld Befehle hinzufügen

Felder können mehrere Befehle nacheinander abarbeiten. Das kann sinnvoll sein, um z.B. häufiges Drücken gerade bei Problemen in der Ansteuerung zu vermeiden.

Jeder Befehl ermöglicht es, Seitensets zu erstellen, die den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Um ein Feld mit einem Befehl zu versehen, tippen Sie auf das gewünschte Feld.

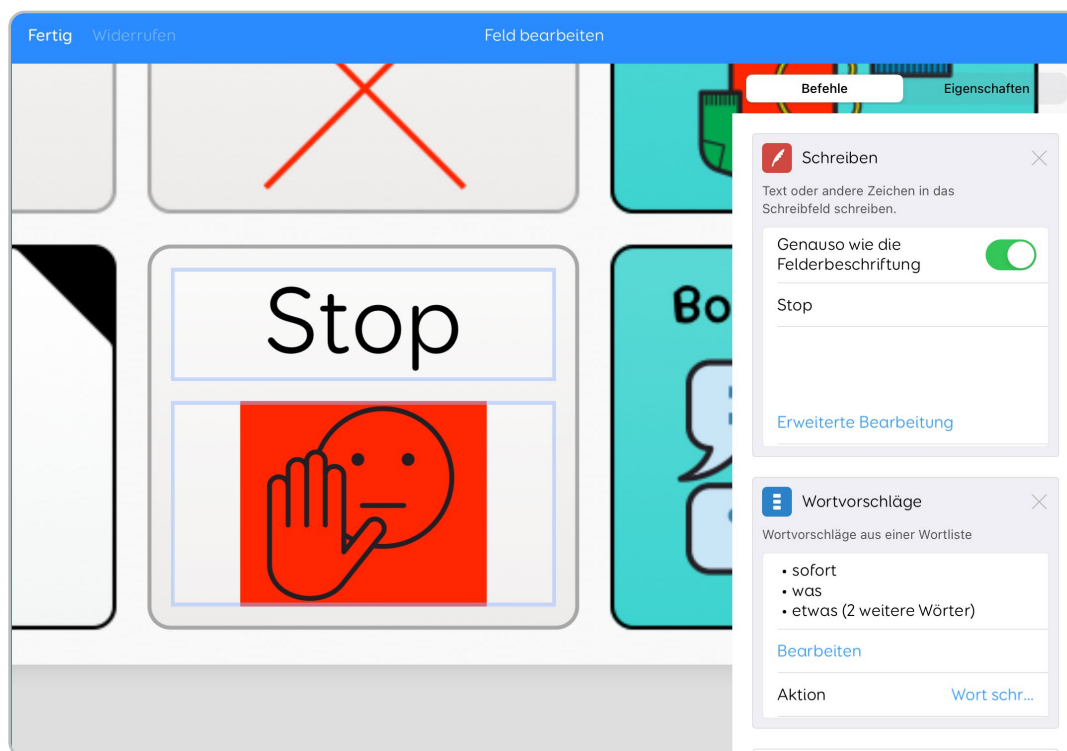


Tippen Sie **Feld bearbeiten**.


Das Feld wird vergrößert und seitlich wird eine Leiste mit Befehlen geöffnet.

Jegliche Befehle des Feldes werden mit zusätzlich verfügbaren Optionen aufgelistet.

Tippen Sie unter dem letzten Befehl in der Liste auf **Befehl hinzufügen**, um die **Befehlsauswahl** anzuzeigen.

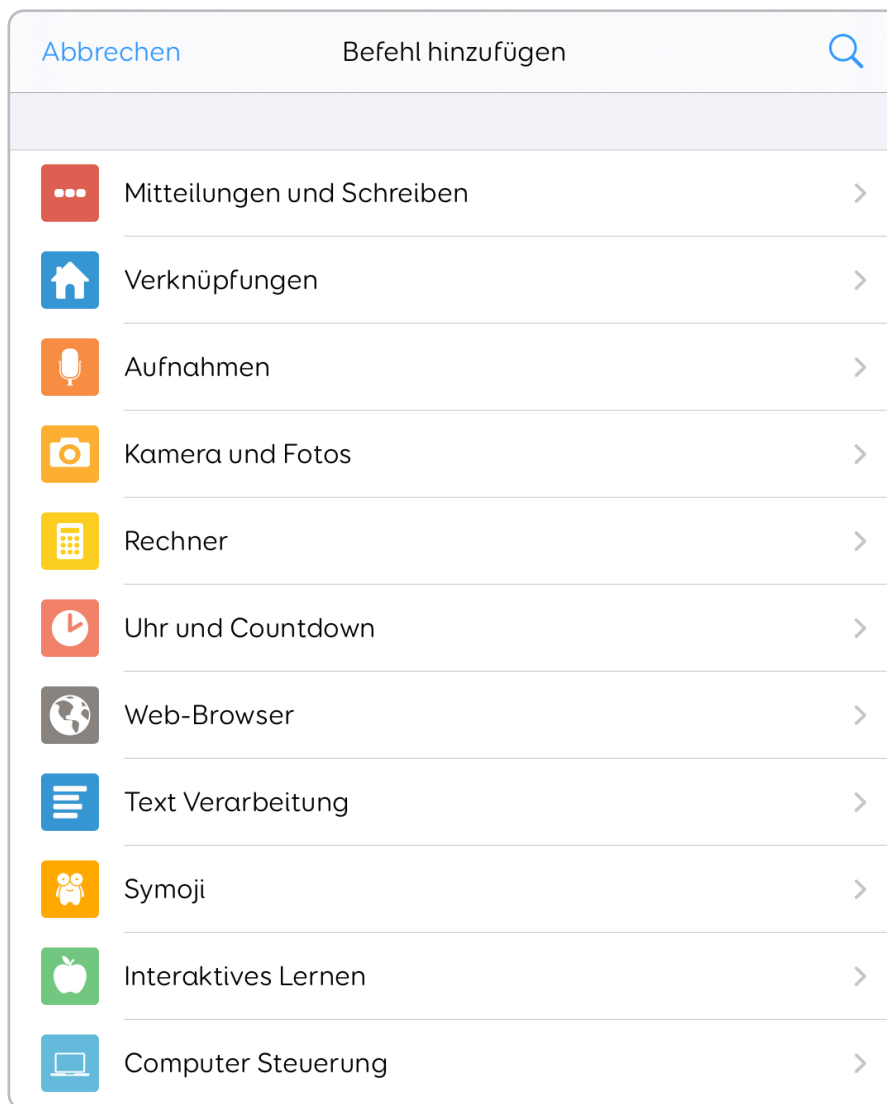


Befehle sind in Kategorien unterteilt. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus der Liste. Einen speziellen Befehl können Sie auch finden, indem Sie **auf die Suchleiste tippen**.

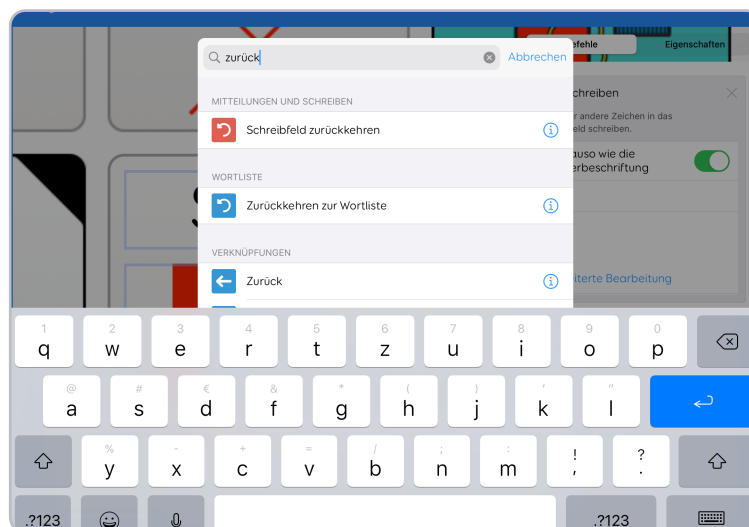

Um einen Befehl zum Feld hinzuzufügen, **tippen Sie auf den Namen**.


Wenn Sie mehr über die Funktionen des Befehls wissen möchten, tippen Sie auf das Informations-Icon und lesen die volle Beschreibung.

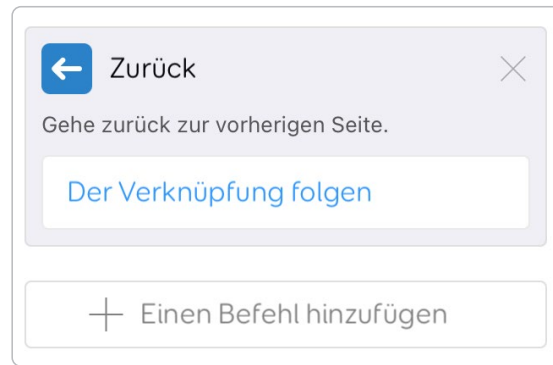

Bei manchen Befehlen kann man noch weitere Optionen einstellen, bevor man sie auswählt.

## a. Einen Befehl bearbeiten

Viele Befehle bieten Funktionen, die man aktivieren oder anpassen kann. Zum Beispiel kann ein Schriftfeld das Wort anzeigen, das im Chatfeld erscheinen soll, es bietet aber auch Optionen für die Feldbeschriftung. Es gibt auch eine **Erweiterte Bearbeitungsoption**, die weitere Steuerung dessen ermöglicht, was ein Feld schreibt und auch welche Grammatikfunktionen aktiviert werden.

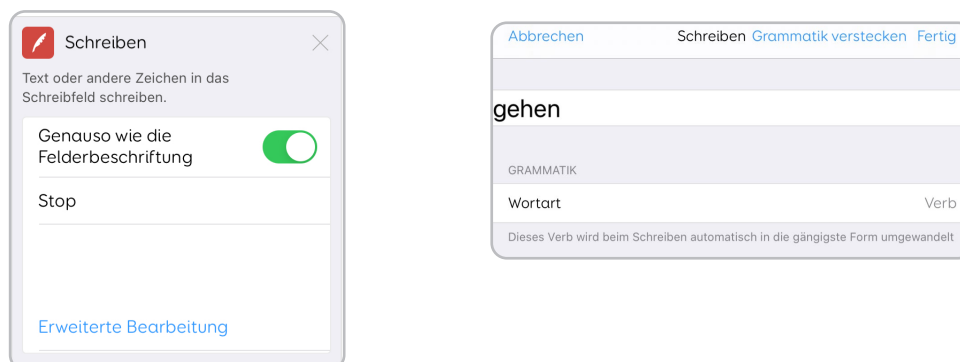


Jeder Befehl hat je nach Einsatz verschiedene Funktionen.

## b. Einen Befehl entfernen

**Tippen Sie auf das Kreuz** in der oberen Ecke der Befehle, um einen Befehl aus einem Feld zu entfernen.

## c. Mehrere Befehle verwenden

Mit **Befehl hinzufügen** können Sie einem Feld noch weitere Befehle zuordnen und eine Befehlsreihe erstellen, die mehrere Aktionen auslöst.

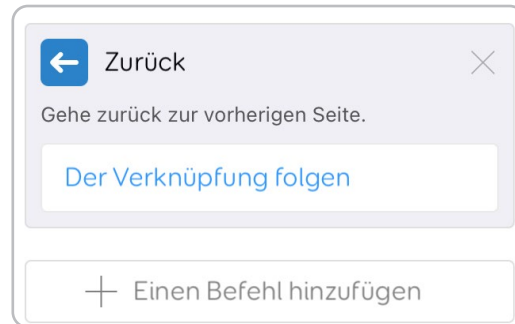


Sie können einem Feld mehrere Befehle zuordnen, um eine komplexere Befehlsreihe zu erstellen.

## d. Die Reihenfolge von Befehlen ändern

Wenn ein Feld zwei oder mehr Befehle beinhaltet, können Sie bei Bedarf die Reihenfolge ändern, in der sie aktiv werden.

**Befehle werden von oben nach unten aktiv.**

In der Befehle-Leiste seitlich können Sie den Befehlsnamen **antippen und halten**, um ihn dann in der Befehlsliste **hoch oder runter zu verschieben**.

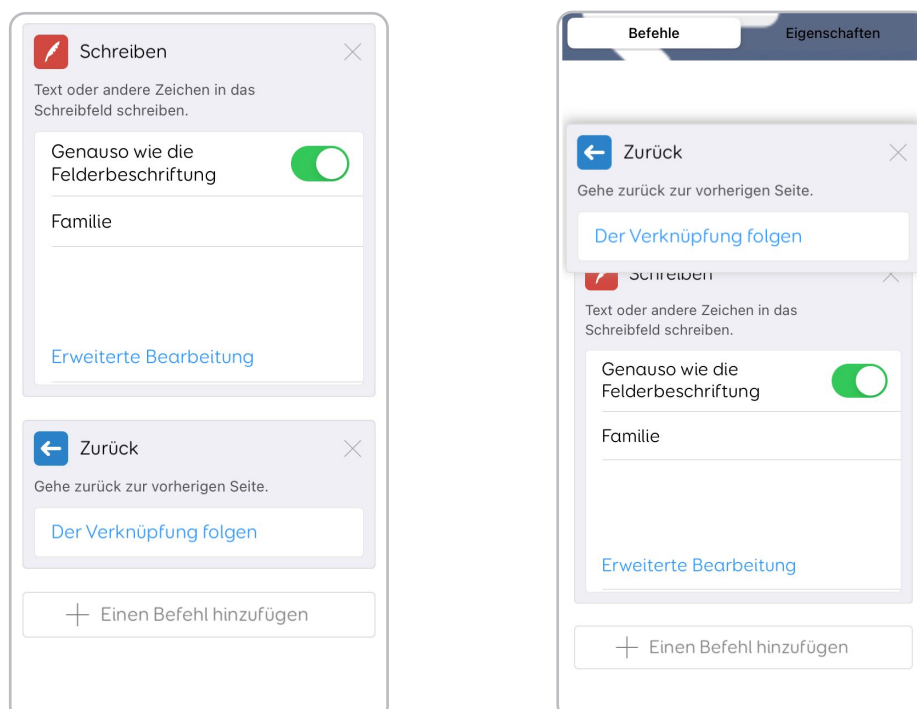

## 2.14

# Andere Feldtypen

Felder, die schreiben, Töne abspielen und Verknüpfungen erstellen sind großartige Bausteine für Ihr Seitenset.

Mit einer Kombination aus Befehlen können Sie Ihrem Seitenset noch mehr Funktionen verleihen.

Es folgen einige der gewöhnlichen Feldtypen, die in vielen Seitensets vorkommen.

## a. Schreibfeld

Im **Schreibfeld bauen Sie Ihre Botschaft zusammen**. Wenn es in Ihrem Seitenset ein Schreibfeld gibt, werden Buchstaben, Wörter und Ausdrücke von Schriftfeldern in das Schreibfeld geschickt.



Das Schreibfeld zeigt **Wörter** und **Symbole** an.

Je größer Sie das Schreibfeld machen, desto mehr der Botschaft ist sichtbar.



Mit einem **Schreibfeld** können Sie auch andere Felder einbauen, wie **Löschen, Rückgängig, Zurücksetzen** und weitere Felder zum Bearbeiten der Nachricht, um Ihre Nachrichten noch zu verfeinern, bevor sie mit **Feld Vorlesen** laut ausgesprochen werden.


## b. Auto-Inhalt Felder

Statt mit vorgegebenen Beschriftungen und Bildern werden Auto-Inhalt Felder **mit Inhalten aus Listen gefüllt**, die entweder in Ihrem Benutzerprofil oder Ihren Seitensets gespeichert sind. Typische Auto-Inhalt Felder sind **Wortlisten, Vorhersagen, Web-Favoriten** und Nachrichten mit **Sprachaufnahmen**.



## c. Sprach-, Seiten- und Geräteeinstellungen

Viele Einstellungen befinden sich in Menüs und können Feldern hinzugefügt werden, um die Stimme, Lautstärke, Bildschirmhelligkeit usw. direkt zu steuern.

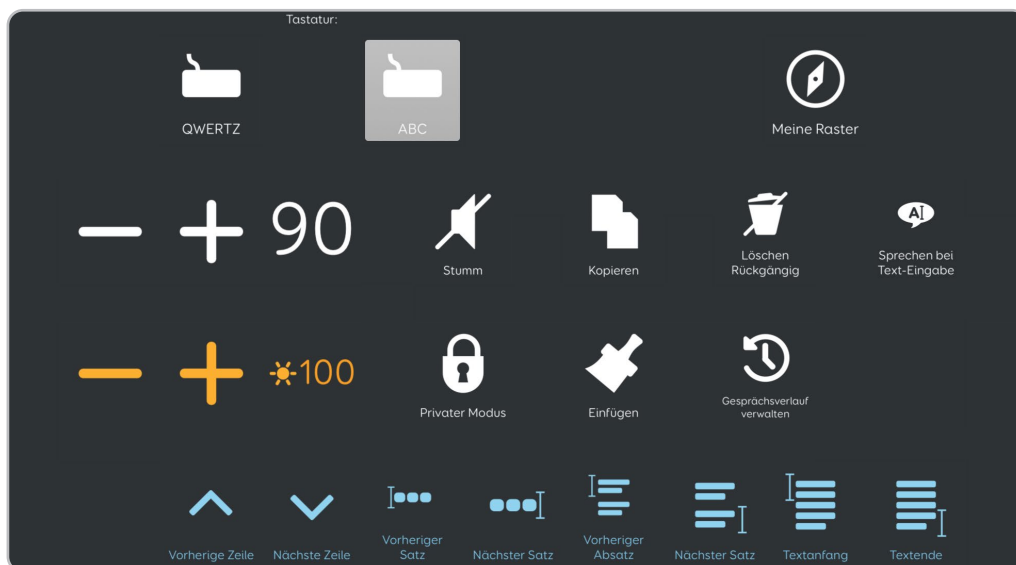


Wenn Sie wollen, können Sie eine ganze Seite mit Einstellungen zusammenstellen und Einstellungen aus anderen Seitensets wie **Text Talker** hinzufügen oder entfernen.

## 2.15

# Feldeigenschaften


Jedes Seitenfeld hat **Feldeigenschaften**.

Die Feldeigenschaften beschreiben, wie ein Feld aussieht, seine Form, Farbe, wie groß der Text erscheint usw.

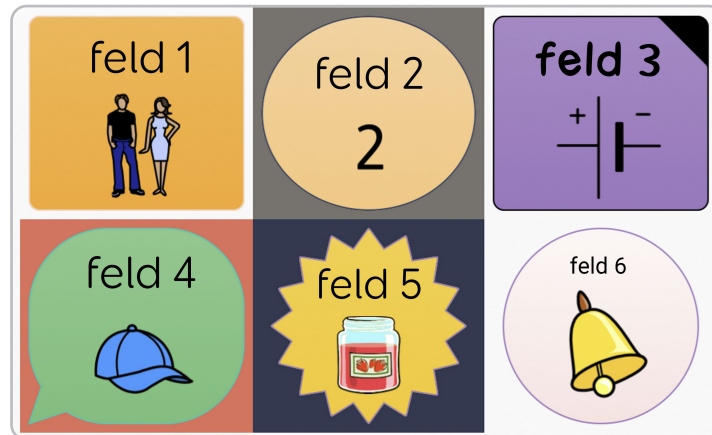

Um leicht anwendbare und einheitliche Seiten zu erstellen, können Sie vorgefertigte Feldeigenschaften verwenden oder eigene erstellen.

Tippen Sie auf das Feld und wählen **Feld bearbeiten**. Das Feld wird vergrößert und seitlich erscheinen die Befehle. Jetzt wählen Sie **Eigenschaften**, um die aktuellen Feldeigenschaften oben angezeigt zu bekommen.

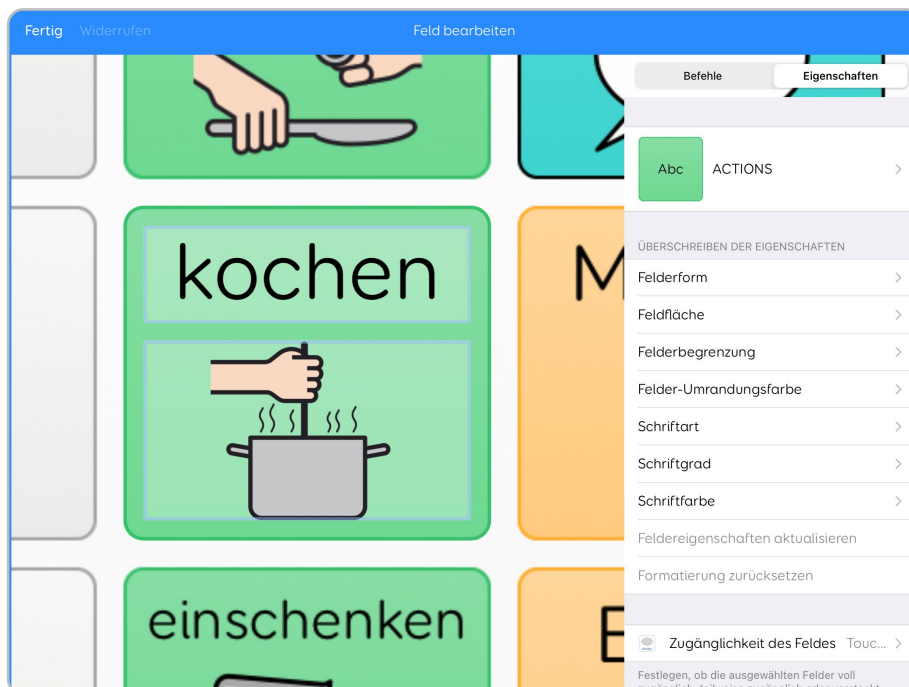


Darunter befinden sich Eigenschaften, mit denen das Feld nach eigenen Wünschen angepasst werden kann.

## 2.16

# Feldeigenschaften verwenden

Wenn ein Seitenset erstellt oder bearbeitet wird, kann man die Eigenschaften verwenden, um die Felder auf der Seite einheitlich zu gestalten.


Tippen Sie auf die aktuellen Feldeigenschaften und Sie sehen eine Liste aller verfügbaren Feldeigenschaften für Ihr Seitenset.

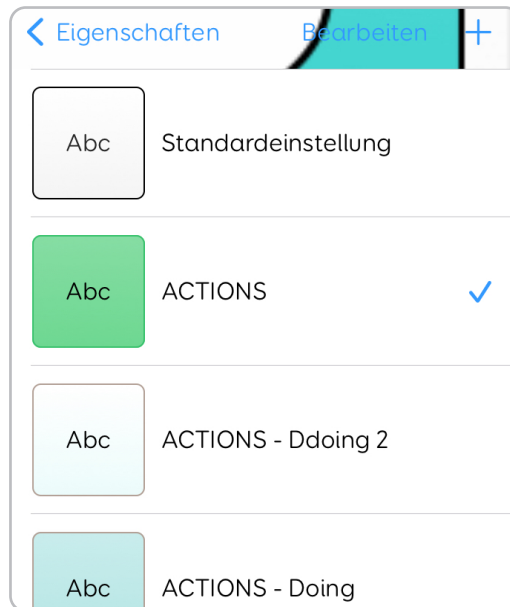

Ein Haken zeigt an, welche Feldeigenschaften ausgewählt sind.

Tippen Sie auf eine andere Feldeigenschaft, um sie auf das Feld anzuwenden. Beachten Sie, dass so nur das Aussehen des Felds verändert wird, nicht die zugehörigen Befehle.

Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um eine Feldeigenschaft **umzubenennen** oder **zu entfernen**.

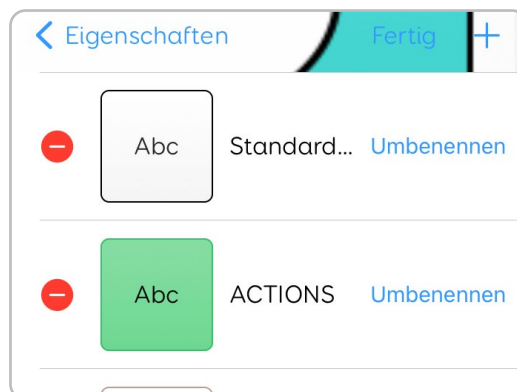

Wenn eine Feldeigenschaft vom Seitenset entfernt wird, wird sie von allen Feldern entfernt, denen diese Feldeigenschaft zugewiesen war. Sie werden aufgefordert, eine andere Feldeigenschaft für diese Felder auszuwählen.

Sie können auch **eine neue Feldeigenschaft hinzufügen**.

Mit dem + Icon können Sie die aktuell ausgewählte Feldeigenschaft duplizieren und umbenennen.


Das kann nützlich sein, wenn Sie gewisse Formen oder Feldeigenschaften in Ihrem Seitenset behalten, aber eine Farbe ändern wollen, ohne damit andere Felder zu beeinflussen.

Abbrechen	Neue Feldereigenschaft	Fertig
ACTIONS - Kopie		

## 2.17

# Feldeigenschaften überschreiben

Wenn Sie die **Feldeigenschaften** eines Feldes ändern, nennt man das **überschreiben**.

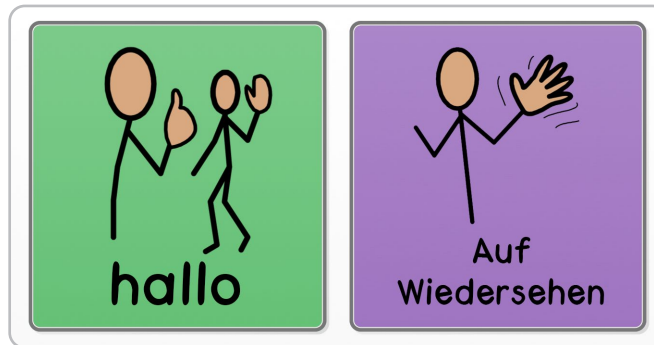


Diese zwei Felder haben die gleichen Feldeigenschaften, aber wir überschreiben die Farbe und daher erscheint das Feld „Auf Wiedersehen“ in lila.

Anpassen können Sie:

- Feldform
- Füllfarbe des Felds
- Feldrandfarbe
- Feldumrandungsfarbe
- Schriftart
- Schriftgrad
- Schriftfarbe

Wenn Sie die Feldeigenschaften überschreiben, werden die Änderungen mit einem **blauen Hintergrund** markiert.

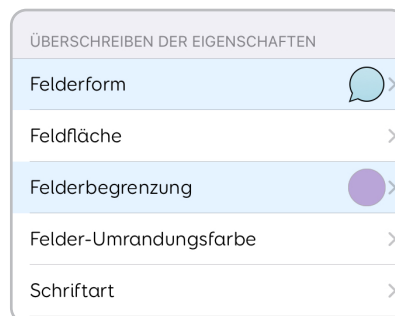

Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Feldeigenschaften aktualisieren**.

**Feldeigenschaften aktualisieren** wendet Ihre Änderungen auf jedes Feld im Seitenset an, für das die gleichen Feldeigenschaften ausgewählt sind.


[Feldereigenschaften aktualisieren](#)

[Formatierung zurücksetzen](#)


## a. Änderungen als neue Feldeigenschaften speichern

Tippen Sie auf den Namen der Feldeigenschaft und das + Icon, um Ihre Änderungen als neue Feldeigenschaft zu speichern. Dann können Sie sie auf andere Felder im Seitenset anwenden.

## b. Feldform

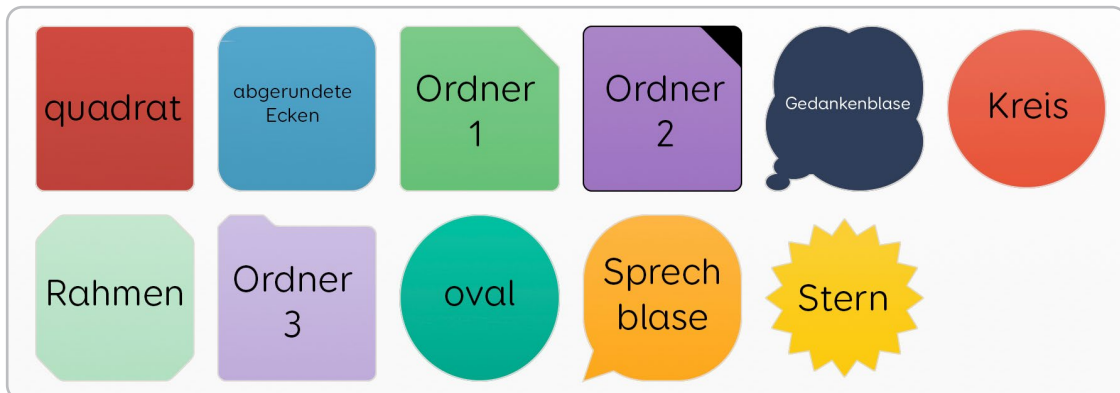

Sie können aus **11 Feldformen** wählen.

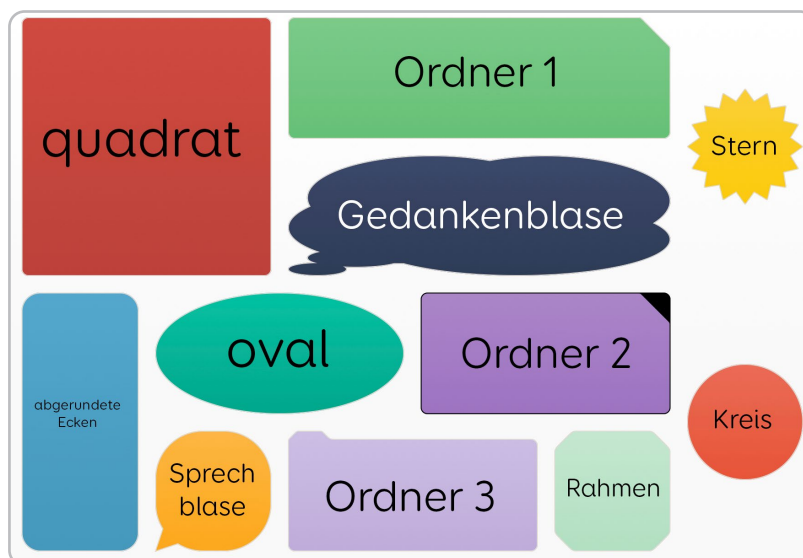

Wenn Sie die Feldgröße ändern, passt sich die Form dem verfügbaren Platz an.

Die Kreis- und Sternformen füllen den **Feldplatz proportional**.


## c. Füllfarbe des Felds



Die Füllfarbe des Feldes passt die Farbe **im Feld** an.

Sie können auch einstellen, dass ein Feld nicht farbig gefüllt wird, sodass die Feldrandfarbe oder die Hintergrundfarbe des Seitensets durchscheint.

## d. Farbe der Feldumrandung

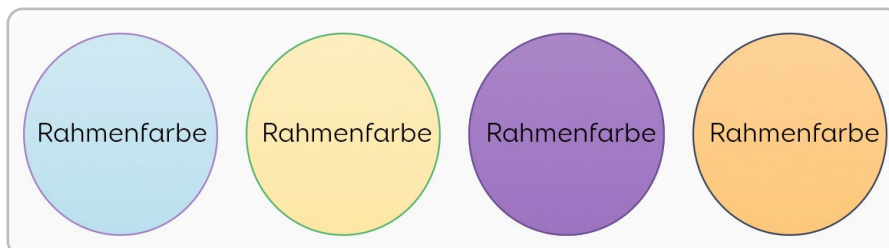

Die Feldumrandung **liegt um die Feldform herum**. Diese Farbe kann man ändern oder mit **Keine** eine durchsichtige Umrandung wählen.

Beachten Sie, dass dadurch **nicht** die Farbe der Hervorhebung verändert wird, sofern aktiviert. Sie kann in den Einstellungen angepasst werden.


## e. Feldumrandungsfarbe



Die Feldumrandung ist der Hintergrund eines Feldes. Sie können diese **Farbe** ändern oder mit **Keine** einen durchsichtigen Hintergrund wählen, sodass der Hintergrund des Seitensets durchscheint.

Mit der Feldumrandung kann man Bereiche des Seitensets hervorheben, z.B. die Symbolleiste.


## f. Schriftart

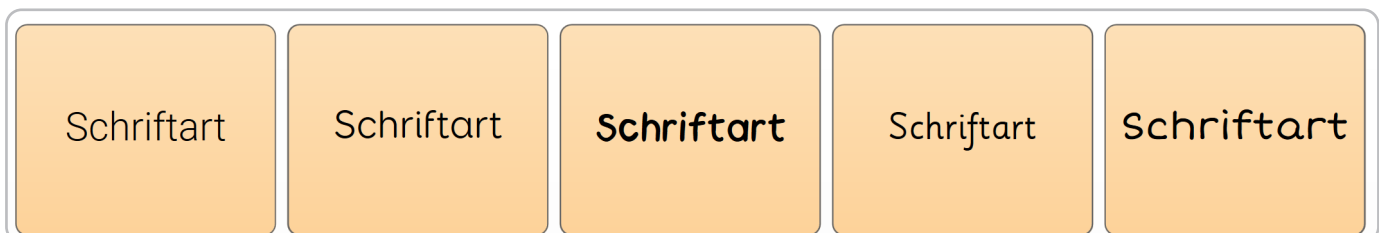

Die **Schriftart** passt das Aussehen der **Feldbeschriftung** an. Zur Auswahl stehen **sechs Grid Standardschriftarten**.

Sie können auch aus der vollständigen Liste der Schriftarten auf Ihrem iPad auswählen. Beachten Sie, dass manche dieser Schriftarten nicht in Grid 3 verfügbar sind, wenn Sie Ihr Seitenset plattformübergreifend, z.B. auf einem windowsbasierten Gerät, teilen.

## g. Schriftgröße

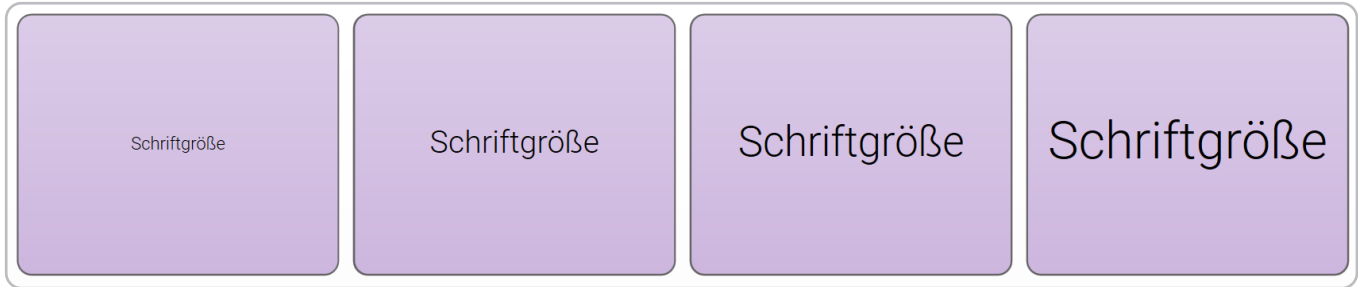


Sie können **die Schriftgröße** in Ihrer **Feldbeschriftung ändern**. Beachten Sie, dass Buchstaben oder Wörter abgeschnitten werden könnten, wenn der Text zu groß ist.

Je größer der Text, desto weniger Platz gibt es im Feld für Bilder oder Symbole

## h. Schriftfarbe

Sie können die Schriftfarbe in Ihrer Feldbeschriftung ändern.

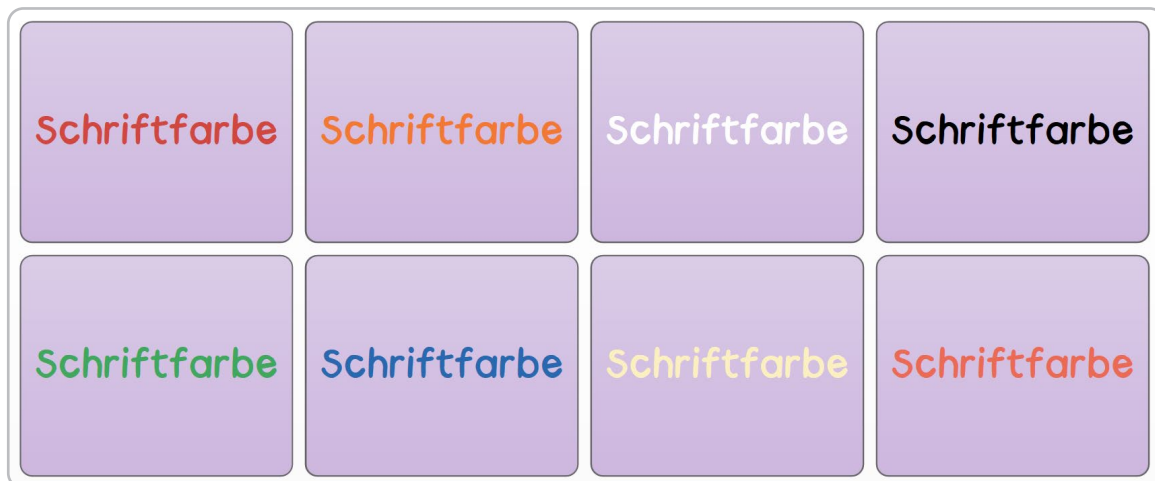

Beachten Sie dabei die **Sichtbarkeit** in Bezug auf die gewählte Hintergrundfarbe, sonst könnte der Text schwer zu lesen sein.

## i. Zugänglichkeit des Feldes

Die Zugänglichkeit der Felder können Sie so anpassen, dass sie in gewissen Situationen nicht aktiviert werden.



### Touch und Schalter

Das Feld kann durch Antippen des Touchscreens oder per Schalter aktiviert werden.

### Nur Touch

Das Feld kann nur durch Touchfunktion aktiviert werden. Wenn Sie einen Schalter verwenden, können Sie das Feld nicht aktivieren.

### Nicht zugänglich

Das Feld kann vom Anwender nicht aktiviert werden, ist aber sichtbar.

### Versteckt

Das Feld wird nur im Bearbeitungsmodus angezeigt.

Mit **versteckten Feldern** können Teile des Seitensets ausgeblendet werden, um den Fokus auf gewisse Bereiche zu fördern, ohne Felder zu löschen.

## 2.18

# Seitenset

Der Gesamtstil des Seitensets kann über die Randleiste angepasst werden. Diese Einstellungen passen jede Seite und jedes Feld im Seitenset an.

### SEITENSET-EINSTELLUNGEN

 Aussehen

 Felderlayout

 Leere Felder

## a. Design


Sie können für Ihr Seitenset eins von drei Designs auswählen. Diese passen insgesamt das **Aussehen** der Felder an.

### Modern




Felder liegen flach auf dem Hintergrund des Seitensets, haben einen dünnen Rahmen und runde Ecken.

### Gerundet

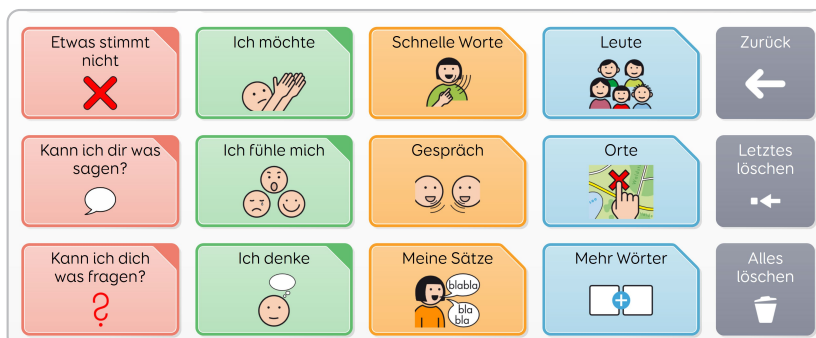


Felder werfen einen Schatten und haben einen dicken Rahmen.

# Blockartig

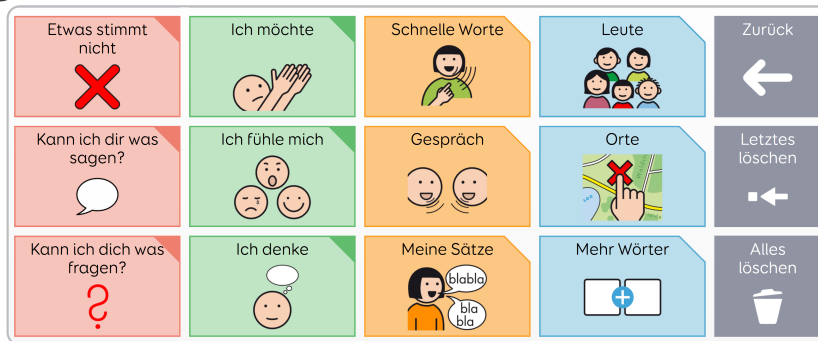


Felder liegen flach auf dem Hintergrund des Seitensets, haben einen dünnen Rahmen und kantige Ecken.

## b. Felderlayout

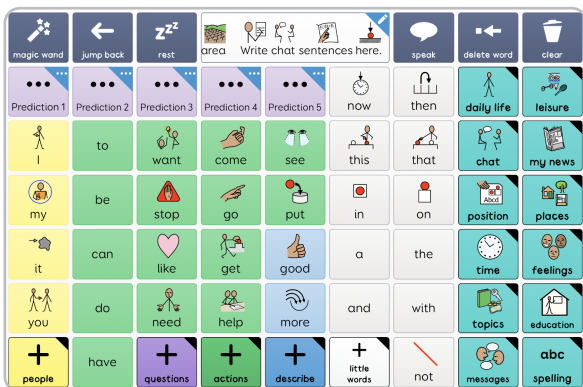

Feldbeschriftung unten

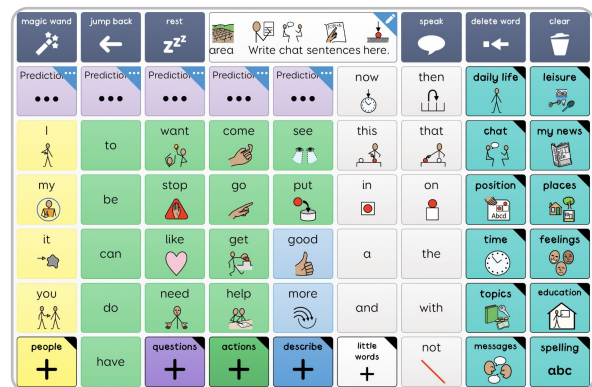


Feldbeschriftung oben


Sie können entscheiden, wo Ihre Feldbeschriftung erscheint. Sie haben die Auswahl zwischen Bildüberschrift und Bildunterschrift.

## c. Leere Felder

Sie können entscheiden, ob leere Felder in Ihrem Seitenset **sichtbar** oder **versteckt** sind.

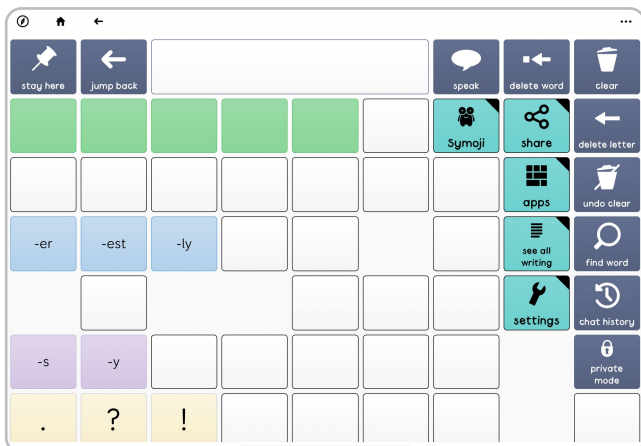

Sichtbar

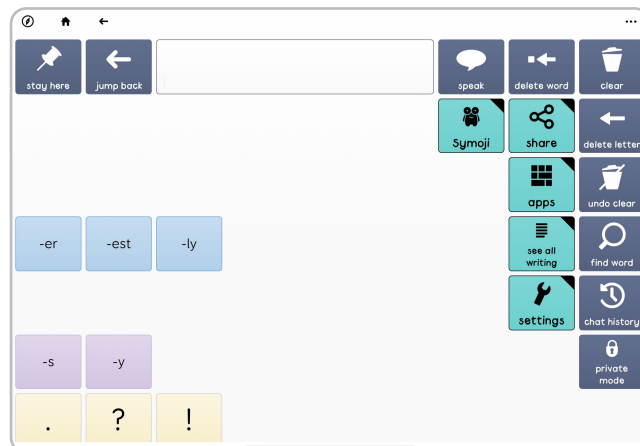


Versteckt

## d. Felderabstand


Der Abstand zwischen den Feldern kann mit der Option **Felderabstand** angepasst werden.

Es stehen **sechs Optionen** zur Auswahl, von **sehr klein** bis hin zu **besonders groß**.


Je kleiner der Abstand, desto näher liegen die Felder zusammen. Ein **größerer** Felderabstand kann **bei der gezielten Ansteuerung** helfen.

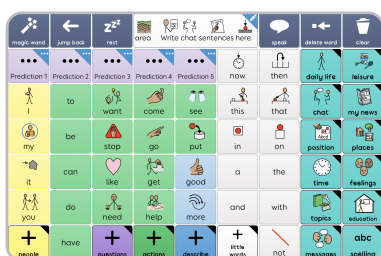


Sehr klein

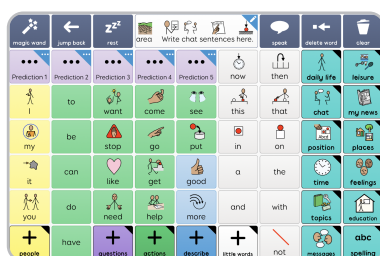


Klein

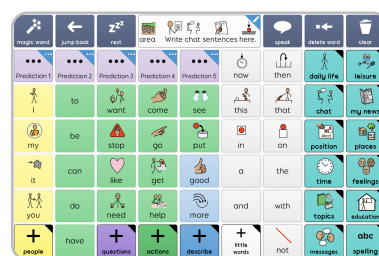

Mittel

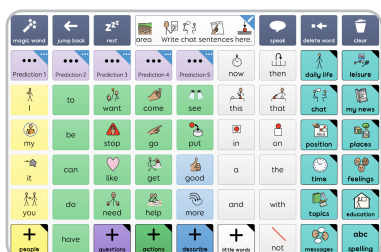

Groß

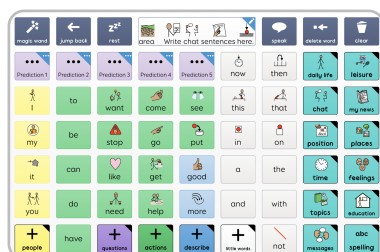


Sehr groß



besonders groß


## 2.19 Seitenset

Mit der Grid Randleiste kann man das Aussehen der aktuellen Seite sowie zusätzliche Funktionen anpassen, die Seiten beim Öffnen durchführen können.


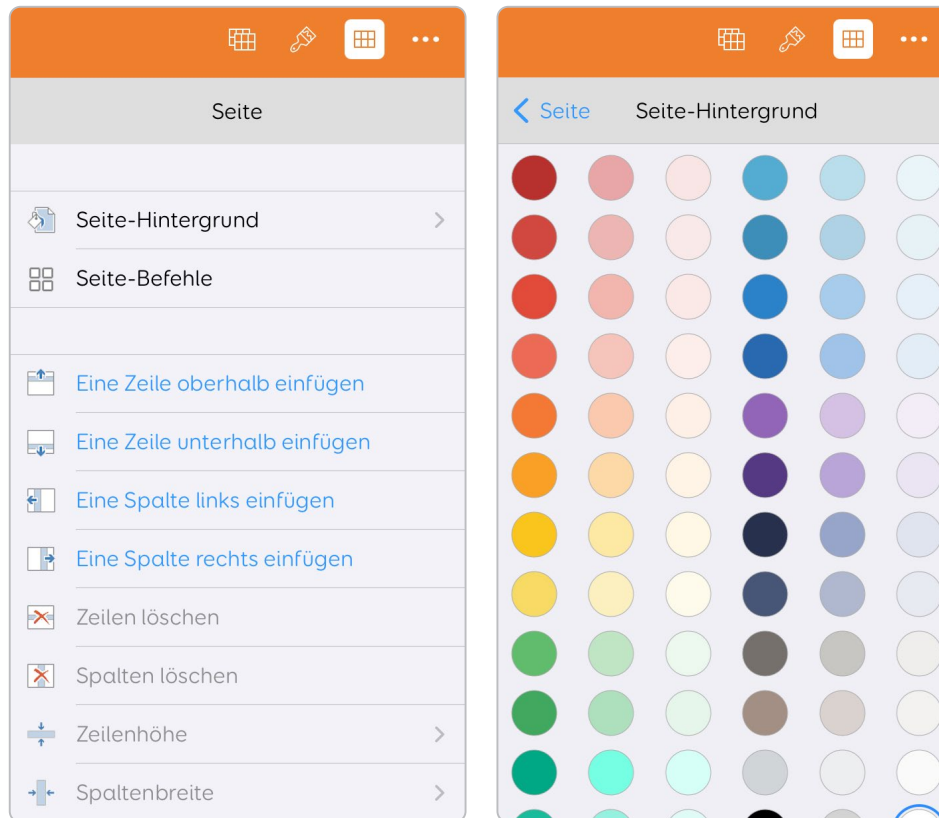


### a. Seite-Hintergrund

Mit der Option **Seite-Hintergrund** können Sie die **Farbe** für Ihren Seitenhintergrund auswählen. In der Farbauswahl können Sie die gewünschte Farbe aussuchen.

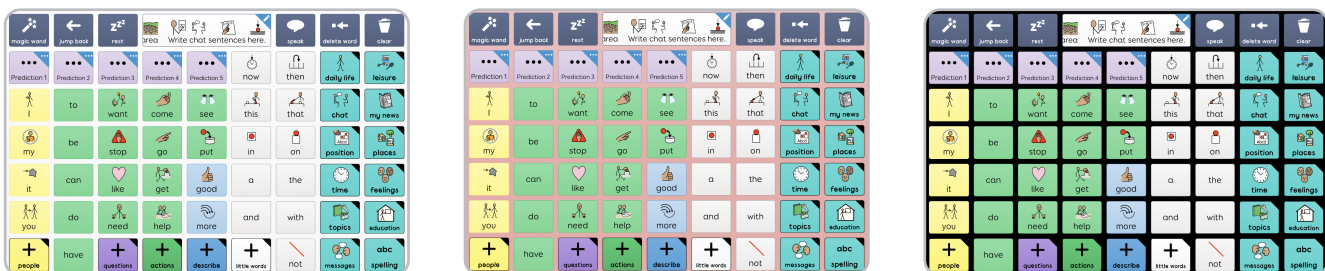

Mit **Farbe einstellen** erhalten Sie noch mehr Farben zur Auswahl: Sie können einen HTML Code mit einem Hex Code wie **#A38F84** oder **#EDED** eingeben. Diese Codes finden Sie in anderen Apps wie Word oder Paint und sie ermöglichen die Auswahl einer genauen Farbe.

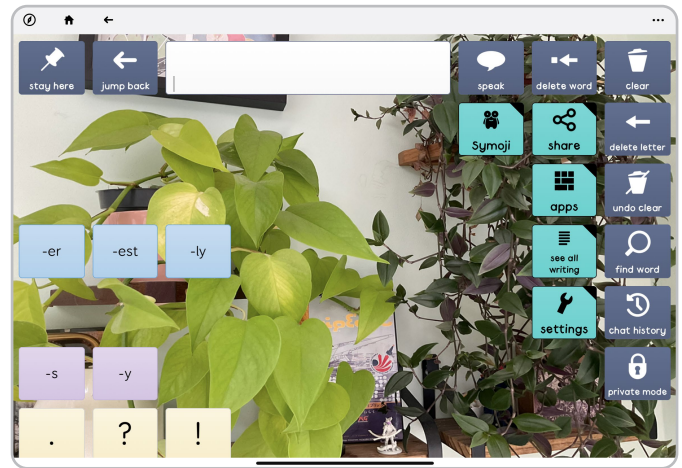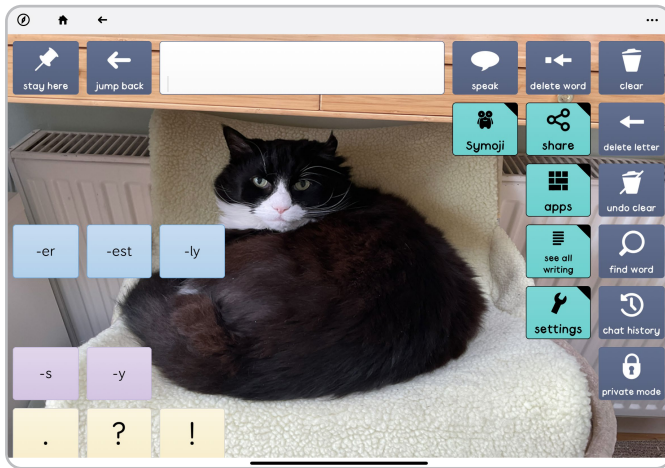

Außerdem können Sie als **Hintergrund** für Ihre Seite ein Bild auswählen.

Auswählen können Sie mit der Bildersuche aus:

## Foto-Bibliothek

Durchsuchen Sie die Bilder auf Ihrem iPad.

## Web-Suche

Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und tippen Sie auf Enter. Surfen Sie im Netz und wählen Sie passende Bilder. **Sichere Suche** ist beim Browsen automatisch aktiv. **Tippen Sie auf ein Bild**, um es als Hintergrund für Ihre Seite zu verwenden.

## Kamera

Nehmen Sie mit Ihrer iPad-Kamera ein Bild auf. Sie können die Front- oder Rückkamera verwenden. Tippen Sie auf **Aufnahme**, um ein Foto zu machen.

## Auf alle Seiten übertragen

Wenn Sie mit dem Hintergrundbild oder der Farbe Ihrer Seite zufrieden sind, können sie mit **Auf alle Seiten übertragen** auf jede Seite im Seitenset angewendet werden.

Damit wird der Hintergrund jeder Seite im Seitenset überschrieben.

## b. Seitenbefehle

Seitenbefehle werden aktiv, sobald Sie die Seite öffnen, oder wenn Sie auf eine Seite geleitet werden. Es sind die gleichen Befehle, die den Feldern hinzugefügt werden können, und sie haben viele der gleichen




Optionen

Mit Seitenbefehlen können Sie im Browser eine **spezielle Seite** aufrufen, ein **Geräusch** machen, wenn Sie auf diese Seite geleitet werden, den Namen der Seite **laut sagen** oder **die Stoppuhr** starten.

### Einen Seitenbefehl hinzufügen

Sie können **jeder Seite** im Seitenset einen Seitenbefehl hinzufügen.

Tippen Sie auf die Option **Seitenbefehle**.

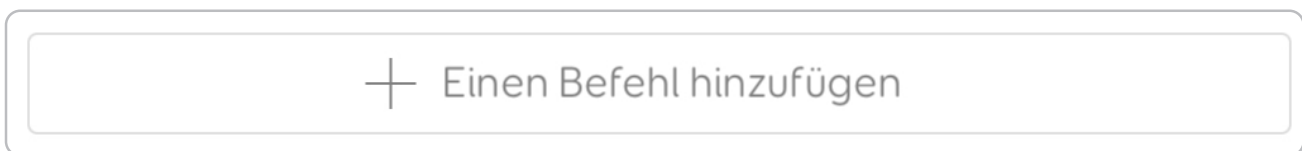

Wählen Sie **Einen Befehl hinzufügen**.

Die Befehle sind in Kategorien unterteilt.

Sie haben Zugriff auf fast jeden Befehl in Grid. Tippen Sie auf den gewünschten Befehl.

Manche Befehle können Sie noch weiter anpassen, z.B. eine Webadresse oder einen festen Ausdruck hinzufügen.

Über **Befehl hinzufügen** können einer Seite weitere Befehle hinzugefügt werden. Befehle werden **der Reihe nach von oben nach unten** aktiviert.

Befehle können verschoben werden, indem man auf den Befehlsnamen tippt, hält und dann in der Liste hoch oder runter **zieht**.

**Tippen Sie auf das Kreuz** in der Ecke, um einen Befehl zu entfernen.



## c. Zeilen und Spalten


Sie können die Zeilen- und Spaltenzahl auf Ihrer Seite anpassen und auch die Größe passend für Ihr Seitenset abändern.

Wenn Sie Zeilen und Spalten auf einer Seite bearbeiten, achten Sie darauf, dass nur die aktuelle Seite verändert wird. Ein Seitenset kann aus vielen Seiten mit unterschiedlicher Zeilen- und Spaltenzahl bestehen.


Entscheiden Sie sich vorab, wie Sie die Zeilen und Spalten in Ihrem Seitenset gestalten wollen, bevor Sie zu viele Seiten erstellen und sie dann später abändern müssen.

### Zeilen und Spalten hinzufügen

Mit **Zeile oberhalb einfügen** erscheint eine neue Zeile über dem aktuell ausgewählten Feld. Wenn kein Feld ausgewählt ist, erscheint sie oben auf

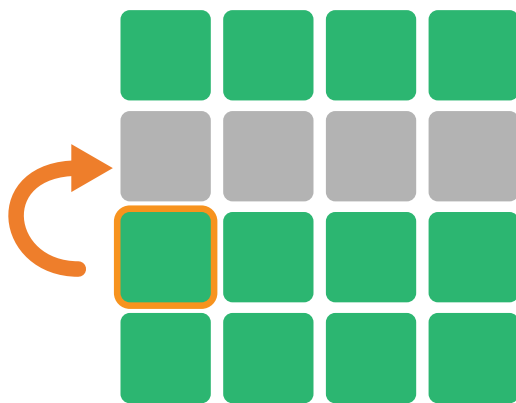

Eine Zeile oberhalb  
einfügen

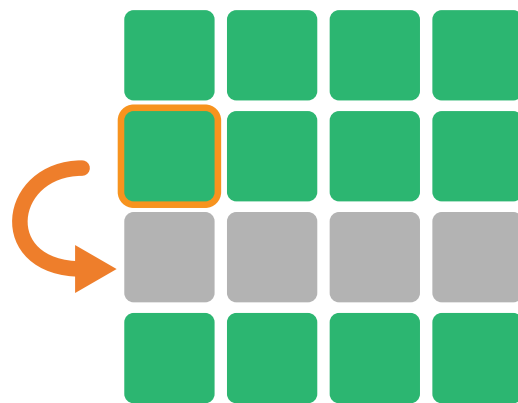


Eine Zeile unterhalb  
einfügen


der Seite.

Mit **Zeile unterhalb einfügen** erscheint eine neue Zeile unter dem aktuell ausgewählten Feld. Wenn kein Feld ausgewählt ist, erscheint sie unten auf der Seite.

Mit **Spalten links einfügen** erscheint eine neue Spalte links von dem aktuell ausgewählten Feld. Wenn kein Feld ausgewählt ist, erscheint sie links auf der Seite.

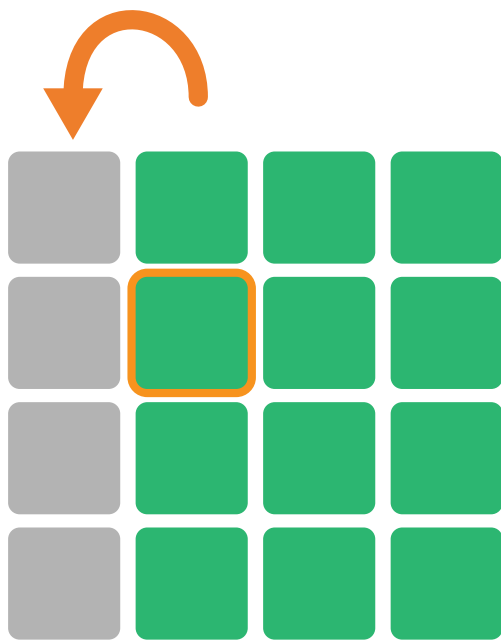

Eine Spalte links einfügen

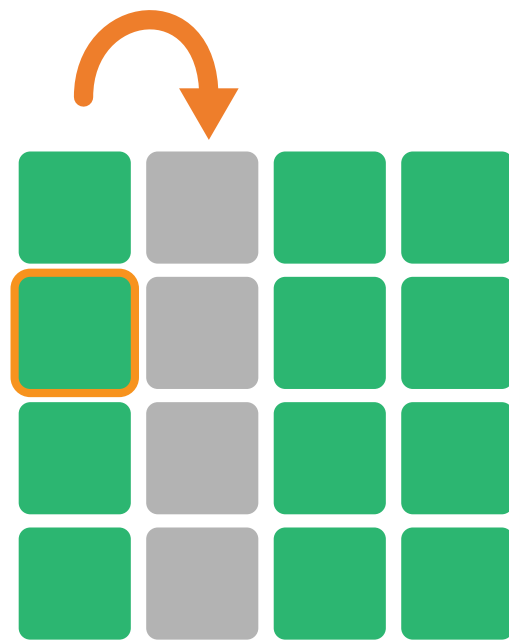


Eine Spalte rechts einfügen

Mit **Spalten rechts einfügen** erscheint eine neue Spalte rechts von dem aktuell ausgewählten Feld.

## Zeilen und Spalten entfernen

Bevor Sie eine Zeile oder Spalte entfernen, müssen Sie in der jeweiligen Zeile oder Spalte ein Feld auswählen. Dann gehen Sie auf **Zeile löschen** oder **Spalte löschen**, um sie zu entfernen.

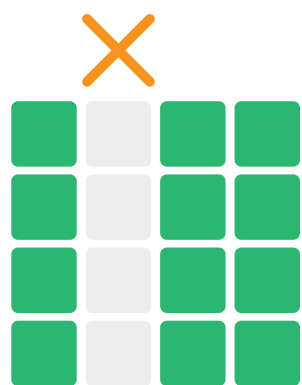

Spalten löschen




Zeilen löschen

Sie können auch **mehrere Felder** auswählen, um mehr als eine Zeile oder Spalte gleichzeitig zu entfernen.

## Zeilenhöhe anpassen

Um die Höhe einer Zeile zu ändern, wählen Sie die gewünschte Zeile aus und gehen auf **Zeilenhöhe**. Sie können von **sehr klein** bis **sehr groß** wählen.

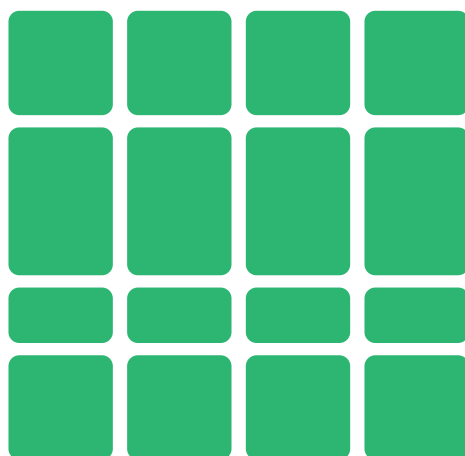


Wenn eine Zeilenhöhe angepasst wird, passen sich die anderen Zeilen an die Änderung an.

Wählen Sie zwei oder mehr Zeilen, um mehrere gleichzeitig zu verändern.

## Spaltenbreite anpassen


Um die Breite einer Spalte zu ändern, wählen Sie die gewünschte Spalte aus und gehen auf **Spaltenbreite**. Sie können von **sehr klein** bis **sehr groß** wählen.

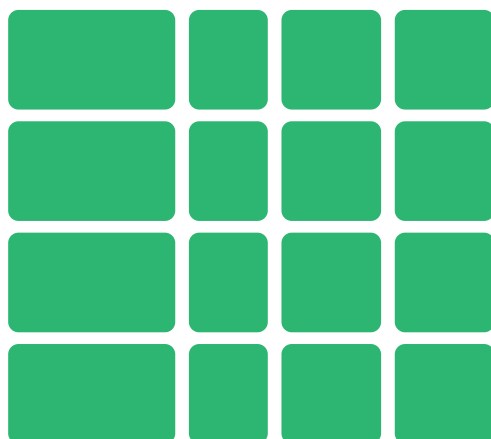

Wenn eine Spaltenbreite angepasst wird, passen sich die anderen Spalten an die Änderung an. Wählen Sie zwei oder mehr Spalten, um mehrere gleichzeitig zu verändern.

## 2.20


# Menüleiste des Seitensets

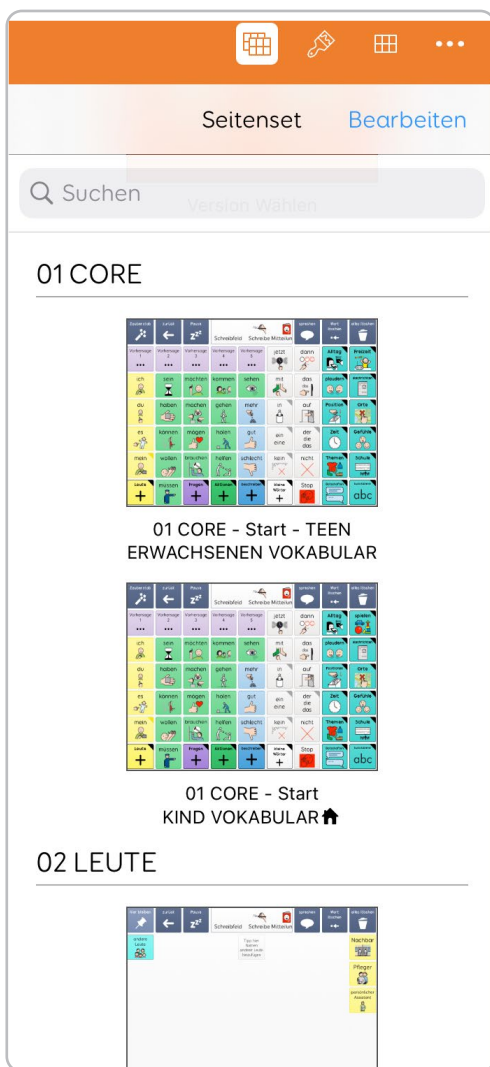

Mit der Menüleiste des Seitensets können Sie alle Seiten im Seitenset **verwalten** und **bearbeiten**.

Eine Liste aller Seiten im Seitenset wird Ihnen angezeigt. Sie können die Seiten durchsehen und zur Bearbeitung **eine antippen**.

Die Startseite Ihres Seitensets ist mit einem **Startseiten-Icon** versehen.

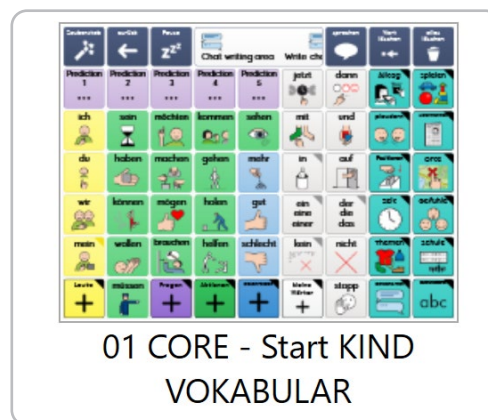


Die Startseite ist die erste Seite, die Ihr Seitenset öffnet und hierhin gelangen Sie immer wieder zurück, wenn Sie auf die Start-Schaltfläche oder das Start-Feld tippen.


Seiten werden in **alphabetischer Reihenfolge angeordnet**.

Bei größeren Seitensets können Sie in der Suchleiste die gewünschte Seite suchen. **Tippen Sie auf Suche** und geben den Namen der gesuchten Seite ein.

# Bearbeiten

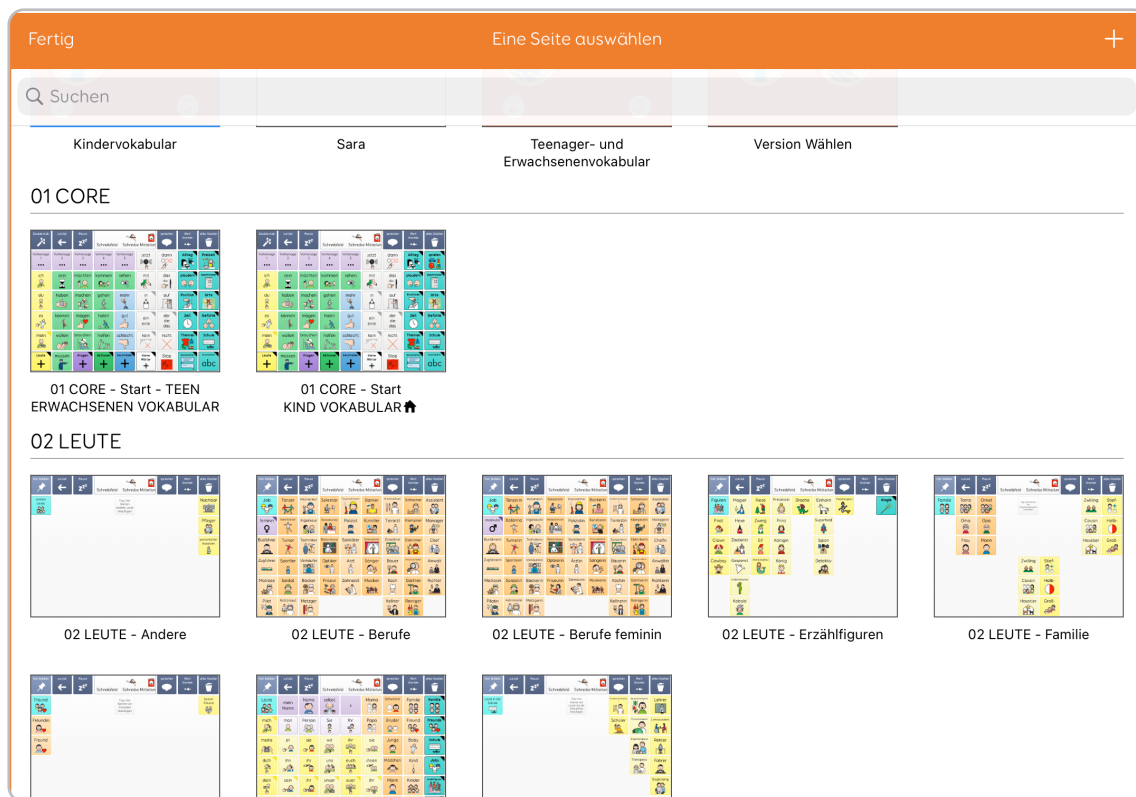

Mit **Bearbeiten** öffnen Sie den Seitenset-Browser im Vollbildmodus. Sie können eine Seite auswählen und sie abändern. Hier können Sie **kopieren, umbenennen, Als Startseite festlegen** oder **löschen**.

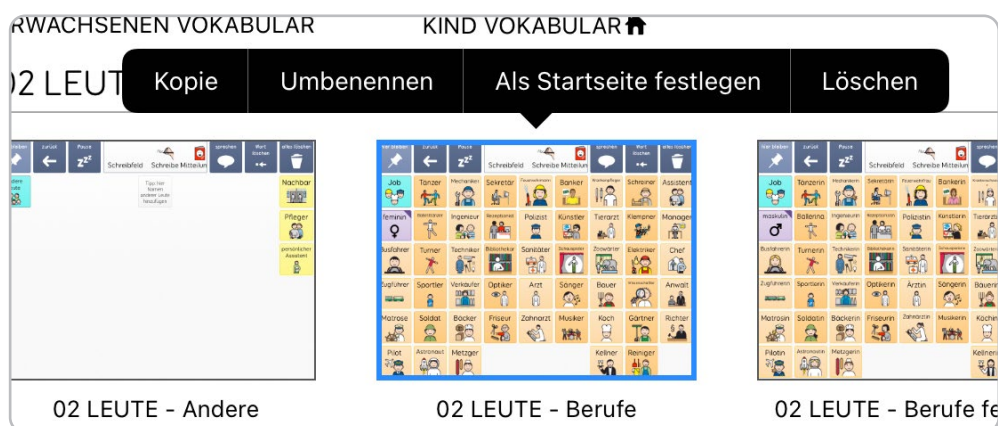

## Kopie

Mit **Kopie** duplizieren Sie Ihre Seite. Ein Pop-up erscheint, in dem Sie die Seite umbenennen können, bevor Sie mit fertig bestätigen.

## Umbenennen

Den Namen Ihrer Seite ändern. Beachten Sie, dass Umbenennen keine Verknüpfungen zu und von dieser Seite beeinflusst.

## Als Startseite festlegen

Legen Sie eine Seite als **Startseite** fest. Diese Seite sehen Sie dann als erstes, wenn Sie das Seitenset öffnen.


## Löschen

Die Seite entfernen. Damit werden alle Verknüpfungen zu dieser Seite unterbrochen, wenn sie noch nicht entfernt wurden.

## Größere Seitensets organisieren


Bei größeren Seitensets ist es sinnvoll, Seiten nach Typ oder Anwendung zu gruppieren.

Grid **kategorisiert Ihre Seiten automatisch anhand der Seitennamen.**

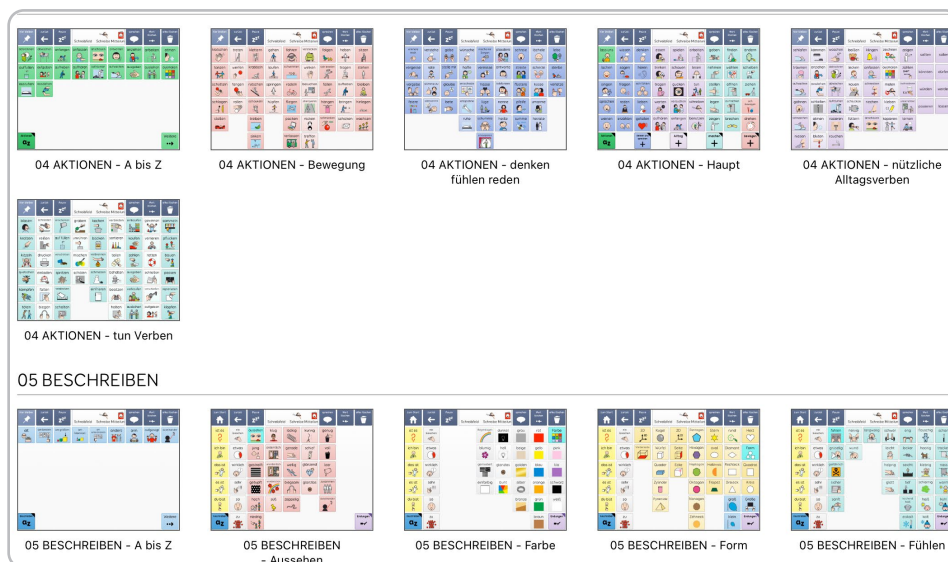


Super Core 50 hat über 240 Seiten in 25 Kategorien

Mit einem Bindestrich ( - ) im Seitennamen können Sie eine Gruppe erstellen.

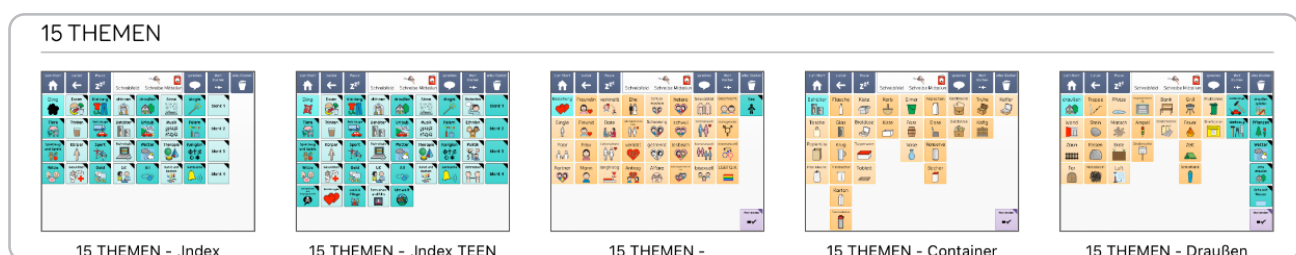

## 14 GEFÜHLE

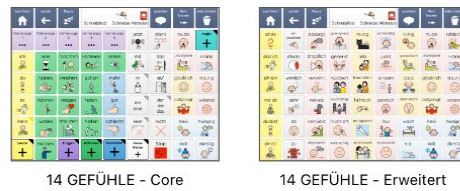

Seiten gruppiert als **15 Themen**


## Beispiel

Ihr Seitenset besteht aus zwei Seiten:

## Core und Erweitert.

Die Seiten werden in **alphabetischer** Reihenfolge angeordnet.  
Mit einem **Präfix** können Sie in **Gruppen** unterteilt werden:

## 15 THEMEN

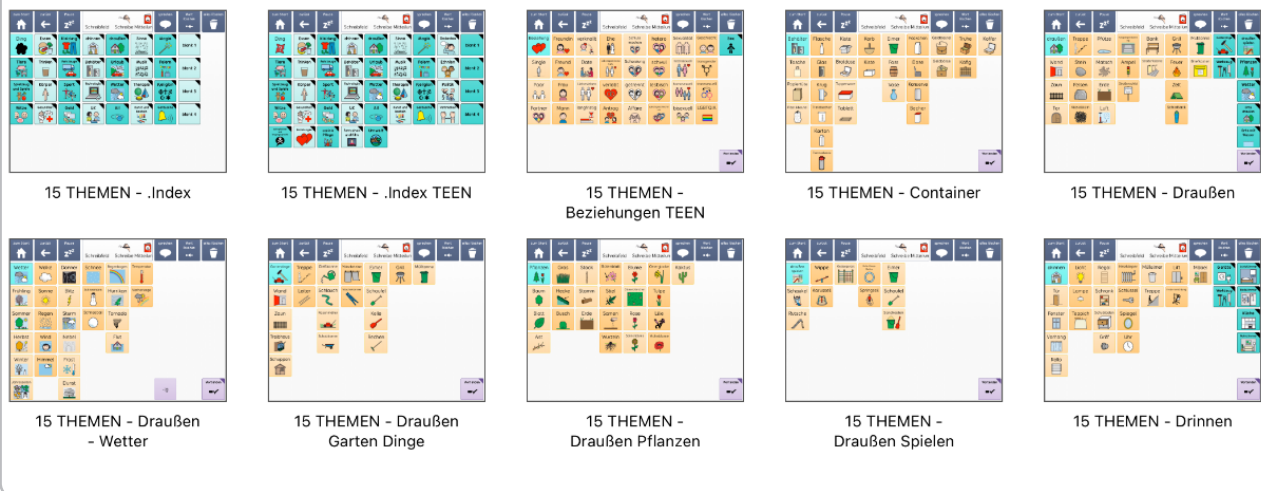

## Themen

Themen - Draußen


Themen - Draußen Wetter

Themen - Draußen Garten Dinge

## 2.21

# Optionen

Mit der Symbolleiste Optionen können Sie Ihr Seitenset verwalten und erweitern.

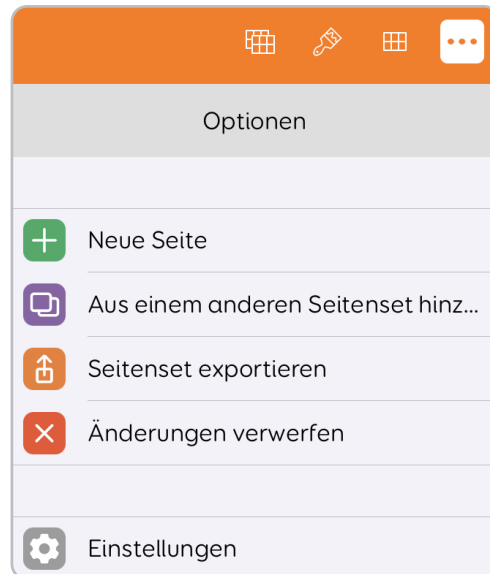

### a. Eine neue Seite hinzufügen



Mit der Option **Neue Seite** können Sie zu Ihrem Seitenset **eine leere Seite hinzufügen**. Die Seitengröße wird automatisch an die aktuelle Seite angepasst, sie können aber die Zeilen- und Spaltenanzahl verändern..



Benennen Sie die Seite und fügen Sie diese mit **Fertig** Ihrem Seitenset hinzu.

## Eine Seite aus einem anderen Seitenset hinzufügen

Vielleicht möchten Sie eine oder mehrere Seiten aus einem Seitenset in ein anderes kopieren, wie z.B. eine Vokabularseite oder eine Seite aus einer barrierefreien App.

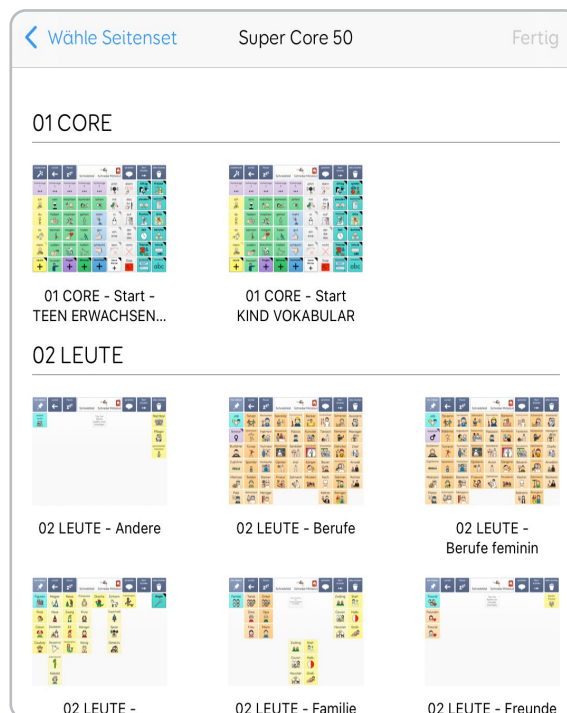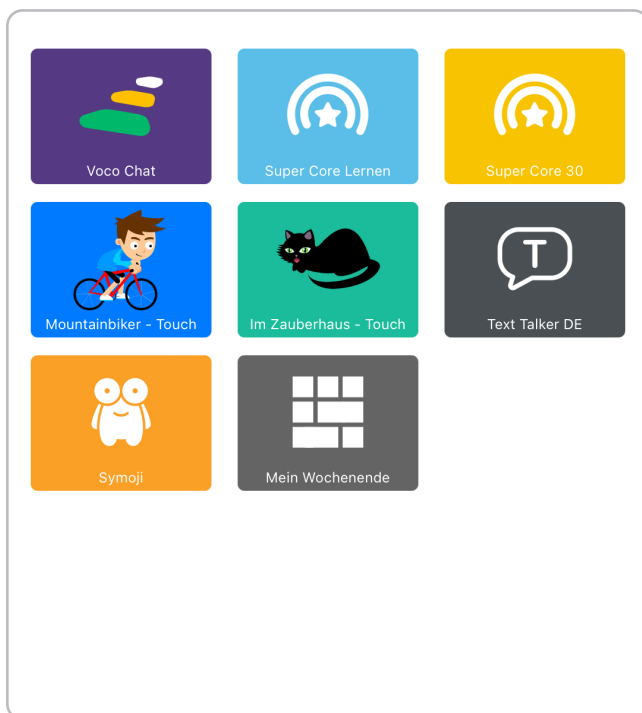

Tippen Sie auf **Aus einem anderen Seitenset hinzufügen**.

Eine Liste aller aktuell vorhandenen Seitensets wird angezeigt. Wählen Sie das Seitenset aus, aus dem Sie Seiten importieren möchten.


Beachten Sie, dass es bei größeren Seiten einen Moment dauern kann, bis sie vollständig im Fenster angezeigt werden.

Tippen Sie auf jede Seite, die Sie hinzufügen möchten. Sie können auch ein ganzes Seitenset mit **Alles auswählen** auswählen.

Gehen Sie auf **Fertig**, um die Seiten Ihrem Seitenset hinzuzufügen.

## b. Ihre Seitensets exportieren

Sie können Seitensets entweder zur **Sicherung** oder **zum Versenden an andere Grid-Nutzer** exportieren.

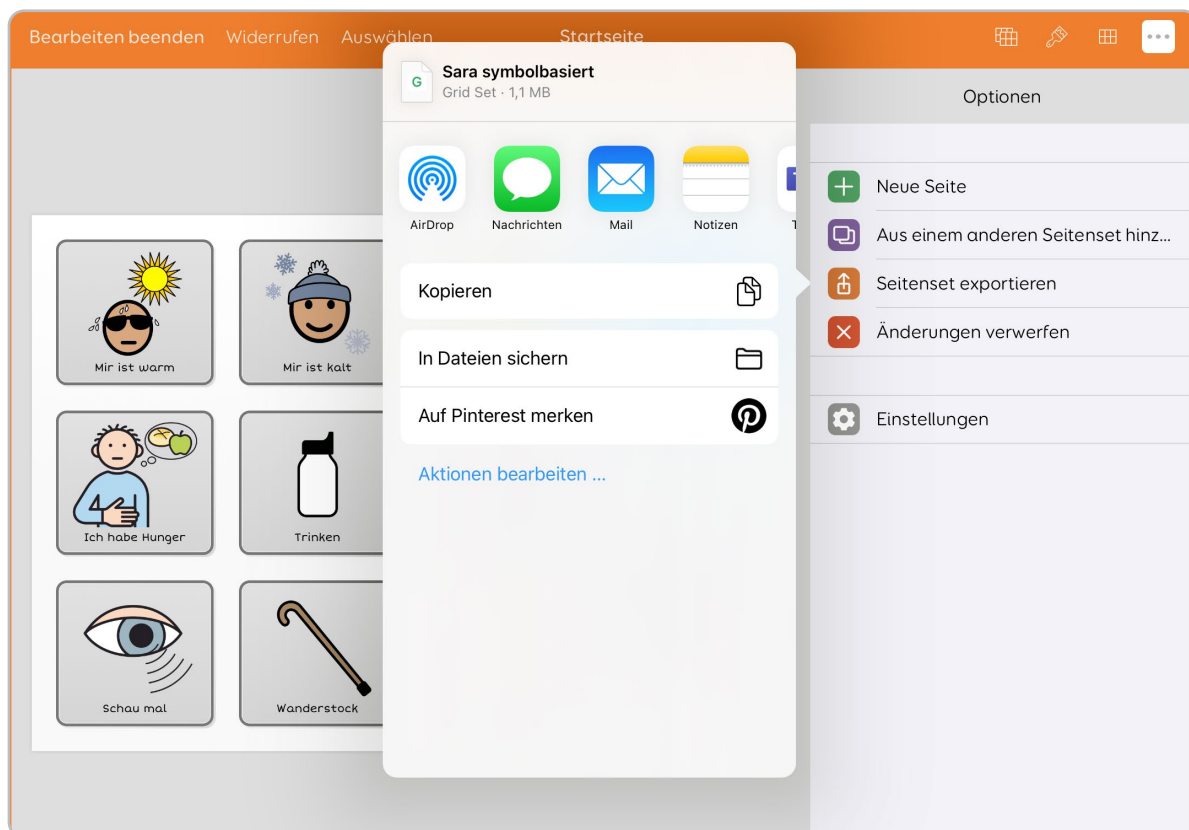

Mit **Seitenset exportieren** öffnet sich das Fenster zur Freigabe. Die Seitenset-Datei können Sie an einige Apps anhängen, wie **AirDrop, Nachricht, E-Mail usw.**

Außerdem können Sie auch in die **Dateien-App Ihres iPads** exportieren. Von hier aus können Sie Ihr Seitenset auf ein anderes Gerät laden, das mit dem iPad verbunden ist, oder es zur Sicherung auf einem USB-Stick abspeichern.

## Seitenset-Dateien öffnen

Wenn Sie die Seitenset-Datei an einen anderen Grid for iPad-Nutzer schicken, wird mit Klick auf das Seitenset die App geöffnet und **zu Meine Seiten hinzugefügt**.

## AirDrop

Wenn Sie AirDrop wählen, erscheint eine Liste **nahe gelegener sichtbarer Apple-Geräte** wie iPads, iPhones und Mac Computer, die Ihre Datei erhalten können. Tippen Sie auf das gewünschte Empfängergerät. Das Gerät wird **eine Mitteilung anzeigen**, um das Seitenset zu

empfangen. Nach Annahme wird das Seitenset übertragen.

## Dropbox

Wenn Ihr Smartbox-Konto mit Dropbox verbunden ist, werden Ihre Seitensets auch in der Cloud gesichert. Ihre Seitensets befinden sich in Ihrem **Dropbox-Konto** in einem Smartbox Ordner.


## Zu Online Grids exportieren

Wenn Sie Ihre Seitensets in den **Online Grids Service** exportieren möchten, müssen Sie sich in **Grid 3** auf einem Windows-Gerät in Ihr **Smartbox-Konto** einwählen und die Option **Freigabe** wählen.

## c. Bearbeitung beenden

Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, können Sie Ihre Änderungen mit **Bearbeitung beenden** annehmen und Ihr Seitenset

Bearbeiten beenden

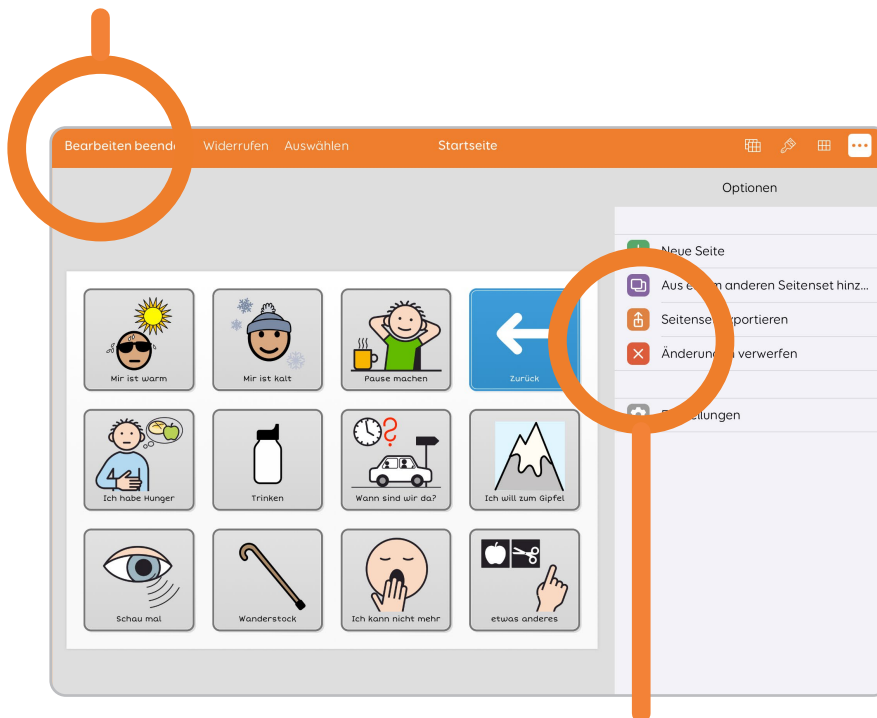

Änderungen verwerfen

speichern. Dann kehren Sie zum Seitenset zurück.

Wenn Sie alle **Änderungen verwerfen** möchten, tippen Sie auf **Änderungen verwerfen**. Damit wird die Version des Seitensets wiederhergestellt, bevor der Bearbeitungsmodus aktiviert wurde.

Beachten Sie: **Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden!**

## 2.22

# Seitenset-Einstellungen

Die verschiedenen Einstellungen und Optionen Ihres Seitensets können Sie unter Seitenset-Einstellungen verwalten.

Seitenset

Name Super Core 50

Sprache Deutsch (Deutschland) >

EINSTELLUNGEN

Schreibfeld-Aktivierung In das Schreibfeld klicken, um den Cursor zu bewegen >

Symbole anzeigen Lesen und Schreiben mit Symbolen >

Symbol-Bibliotheken >

## Name

Das ist der Name Ihres Seitensets, wie er in **Meine Seiten** angezeigt wird und wenn es freigegeben wird. Tippen Sie auf die Namenleiste, um den Namen zu ändern.

## Sprache

Das ist die Sprache, die für Ihr Seitenset verwendet wird. Das beeinflusst, wie die Stimme bestimmte Wörter ausspricht.

# Schreibfeld-Aktivierung

Sie können einstellen, wie das Schreibfeld reagiert.

## In das Schreibfeld klicken, um zu sprechen

Mit dieser Einstellung können Sie in das Schreibfeld tippen, um **Ihre Nachricht auszusprechen**.

## In das Schreibfeld klicken, um den Cursor zu bewegen

Mit dieser Einstellung können Sie in das Schreibfeld tippen, um den Cursor zu bewegen. Damit können Sie Ihre Nachricht **bearbeiten** und **Wörter einfügen**.

## Bild

Ändern Sie das **Seitensets-Icon**. Sie können aus den Symbolen oder Ihrer Foto-Bibliothek auswählen, im Netz suchen oder ein Foto mit Ihrer iPad-Kamera aufnehmen. Tippen Sie auf **Entfernen**, um das Icon zu entfernen.

Tippen Sie auf das **Farb-Icon** und wählen Sie die Feldfarbe.

## Symbole anzeigen

Sie können entscheiden, ob Sie **mit oder ohne Symbole lesen und schreiben**.

Damit kann eingestellt werden, ob Symbole im **Schreibfeld** angezeigt werden, wenn Sie eine Nachricht schreiben, und ob Felder beim Bearbeiten mit einem Symbol versehen werden.

Bilder werden damit nicht aus den Feldern Ihres Seitensets entfernt.

# Symbol-Bibliotheken

Symbol-Bibliotheken, die **beim Bearbeiten des Seitensets durchsucht werden**, können Sie hinzufügen oder entfernen.

Die Symbol-Bibliotheken werden nach Beliebtheit angeordnet, sodass ganz oben die beliebtesten Symbole für Ihr Seitenset erscheinen. Findet Grid kein passendes Symbol für Ihr Wort, wird in der nächsten Symbol-Bibliothek gesucht, bis es ein passendes gefunden hat.

Eine Liste der aktuell aktiven Symbol-Bibliotheken wird Ihnen angezeigt. Mit **Bearbeiten** können Sie eine Bibliothek aus Ihrem Seitenset entfernen und die Reihenfolge nach Beliebtheit anordnen.

Mit dem + Icon fügen Sie Ihrem Seitenset eine Symbol-Bibliothek hinzu. Eine Liste aller verfügbaren Symbol-Bibliotheken wird Ihnen angezeigt.

## Zusammenfassung

In der Zusammenfassung Ihres Seitensets können Sie **eine Beschreibung eingeben** sowie zusätzliche Anmerkungen zu Ihrem Ihrem Seitenset. Besonders nützlich ist das, wenn Sie Ihr Seitenset für mehrere Nutzer freigeben und etwas anmerken möchten, das der Nutzer vor dem Herunterladen wissen sollte. In diesem Bereich können Sie auch jegliche Angaben zur Version oder Zweckbestimmung machen.

Wenn Sie Ihr Seitenset mit Grid 3 auf Online Grids hochladen, wird die Zusammenfassung neben Screenshots Ihrer Seite angezeigt.

## Dokumentation

Für viele offizielle Smartbox-Seiten gibt es **Dokumentationen**. Es handelt sich um Anwendungsleitfäden für die Administrator der UK-Nutzer der Seitensets. Wenn Sie Ihr Seitenset auf einem Smartbox-Seitenset aufgebaut haben, erscheint der Name in der Dokumentation.


Hier können Sie auch die **URL löschen**, damit Nutzer nicht verwirrt werden.

# 3

# Einstellungen

**Beschreibung aller konfigurierbaren  
Einstellungen in Grid for iPad**

3.1	Benutzer	116
3.2	Zugriff	118
3.3	Sprachausgabe	120
3.4	Sprachaufnahmen	124
3.5	Schreiben	128
	a. Wörterbuch	128
	b. Gesprächsverlauf	130
	c. Kurze Wörter	131
	d. Großschreibung	131
	e. Abkürzungen	132
	f. Automatische Korrektur	133
3.6	Symbole	134
3.7	Konten	136
3.8	Webseite	138
3.9	Seitenset	140
3.10	Einkäufe	141
3.11	Hilfe	142
3.12	Über	143
3.13	iPad OS-Einstellungen	145

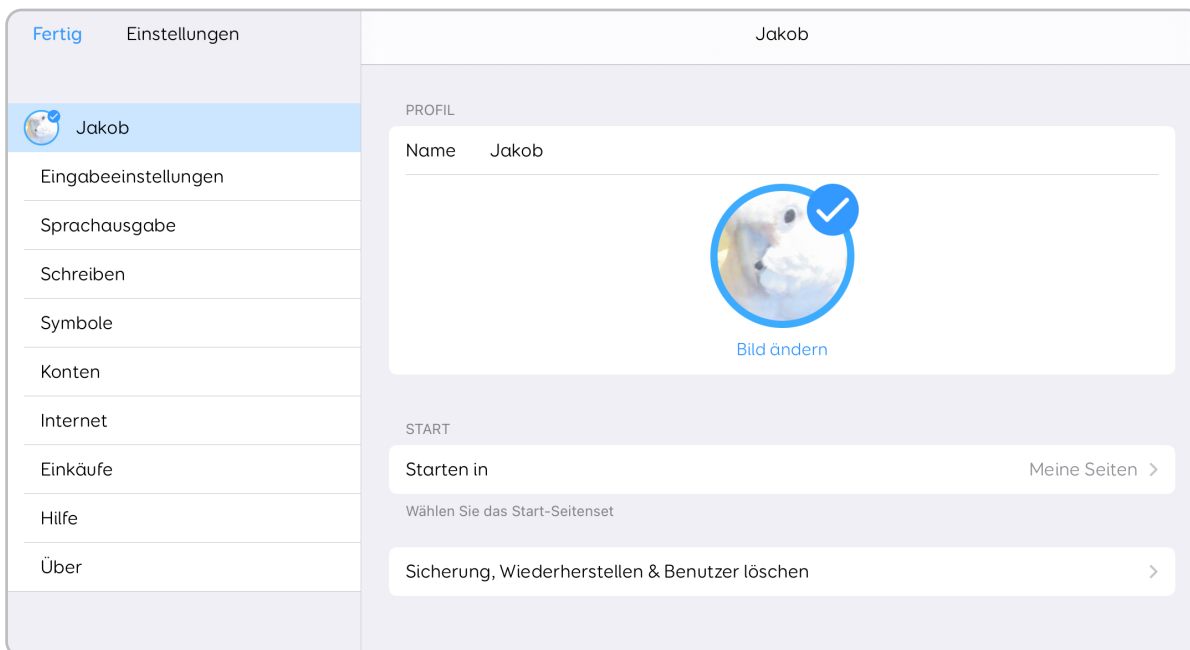

## Name

Tippen Sie auf den Namen und **bearbeiten Sie Ihren Benutzernamen**. Er wird im Zusammenhang mit Ihrem **Smartbox-Kontoprofil** in Online Grids und Grid 3 angezeigt.

## Bild ändern

Wählen Sie ein Bild für Ihr **Konto**. Es wird im Zusammenhang mit Ihrem **Smartbox-Kontoprofil** in Online Grids und Grid 3 angezeigt.

## Start

### Starten in

Mit der Option **Starten in** kann man **ein Seitenset einstellen, das sich automatisch öffnet**, wenn Grid for iPad startet. Automatisch ist dies auf **Meine Seiten** eingestellt.

Tippen Sie, um die Liste aller **verfügbaren Seitensets** zu sehen. Das ausgewählte Seitenset wird automatisch geöffnet, wenn Sie Grid for iPad das nächste Mal starten.

# Sicherung, Wiederherstellen & Benutzer löschen

## Sicherung

Gehen Sie auf **Benutzer sichern** und erstellen Sie eine **Grid Benutzer-Sicherungsdatei**.

Sie beinhaltet:

- Ihre **Seitensets**
- **Einstellungen** und **Präferenzen**
- **Message Banking - Dateien**
- **Sprachaufnahme-dateien**
- Vorhersagen
- Wörterbuch

Die Datei können Sie per **E-Mail** oder **AirDrop** einem anderen Gerät übermitteln, oder **als Datei speichern**. Mit der **Dateien**-App können Sie Ihre Sicherungskopie dann auf ein externes USB-Laufwerk übertragen.

## Nutzer wiederherstellen

Die Option **Nutzer wiederherstellen** ermöglicht es, ein Benutzerprofil zu importieren, das gesichert wurde. Mit **Wiederherstellen** öffnet sich ein **Dateien-Browser**. Es wird Ihnen eine Liste der Sicherungskopien auf Ihrem iPad angezeigt.


Wenn Sie eine Sicherungskopie wiederherstellen, wird Ihr **aktueller Benutzer und alle dazugehörigen Daten und Seitensets entfernt**.

## Benutzer löschen

Mit **Benutzer löschen** wird **Ihr Benutzer von Grid for iPad entfernt und die App neu gestartet**. Alle Konten werden **ausgeloggt und alle Seitensets und Einstellungen entfernt**.

Sie müssen diese Aktion bestätigen, denn sie **kann nicht rückgängig gemacht werden**.

Wenn Sie sich mit einem anderen Smartbox-Konto und Benutzer in Grid for iPad einloggen möchten, müssen sie erst per Lösch Taste zurück zum Login-Bildschirm.

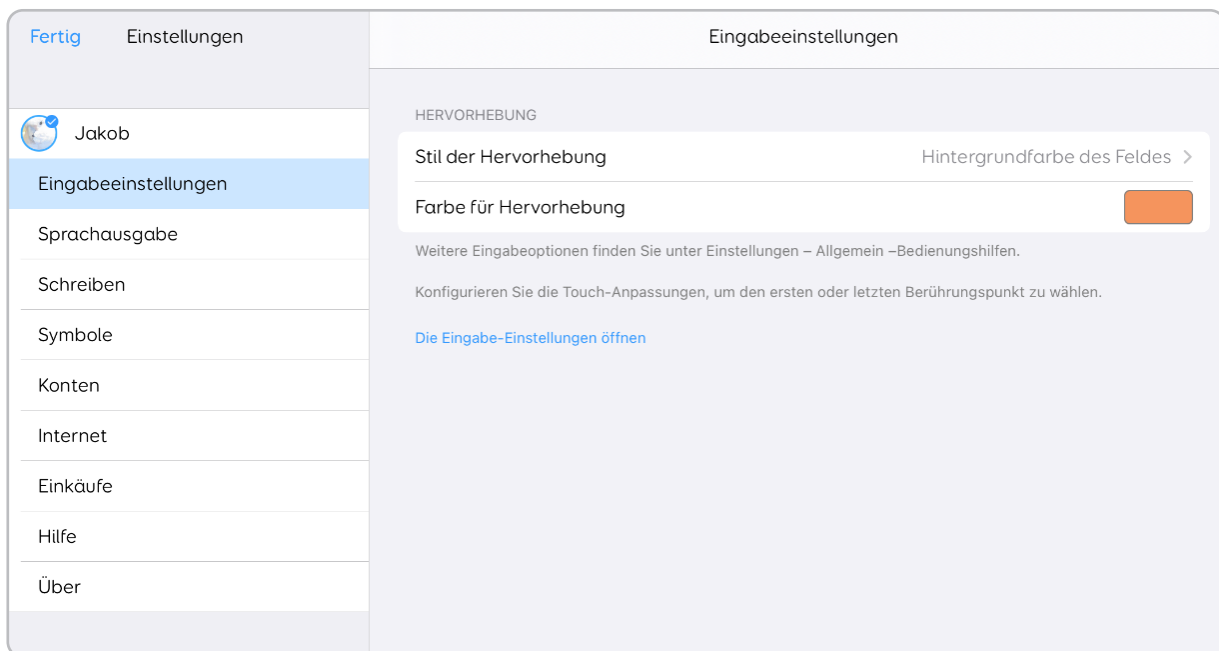

## Hervorhebung

Mit dieser Option können Sie einstellen, **ob bzw. wie Felder hervorgehoben werden sollen**.

## Hervorhebungsstil

### Keine visuelle Hervorhebung

**Entfernt** die **Hervorhebung** von Ihren Feldern.

### Hintergrundfarbe des Feldes

Verändert die **Hintergrundfarbe** und hebt das aktive Feld hervor.

### Farbe der Felderbegrenzung

Verändert die **Umrangungsfarbe** und hebt das aktive Feld hervor.


### Farbe für Hervorhebung

Wählen Sie die **Farbe** der Hervorhebung.

## iPad OS-Zugriffseinstellungen

Grid for iPad interagiert mit den integrierten Bedienungshilfen Ihres iPads.

Weitere Informationen über den iPad OS Zugriff finden Sie unter [support.apple.com](https://support.apple.com)

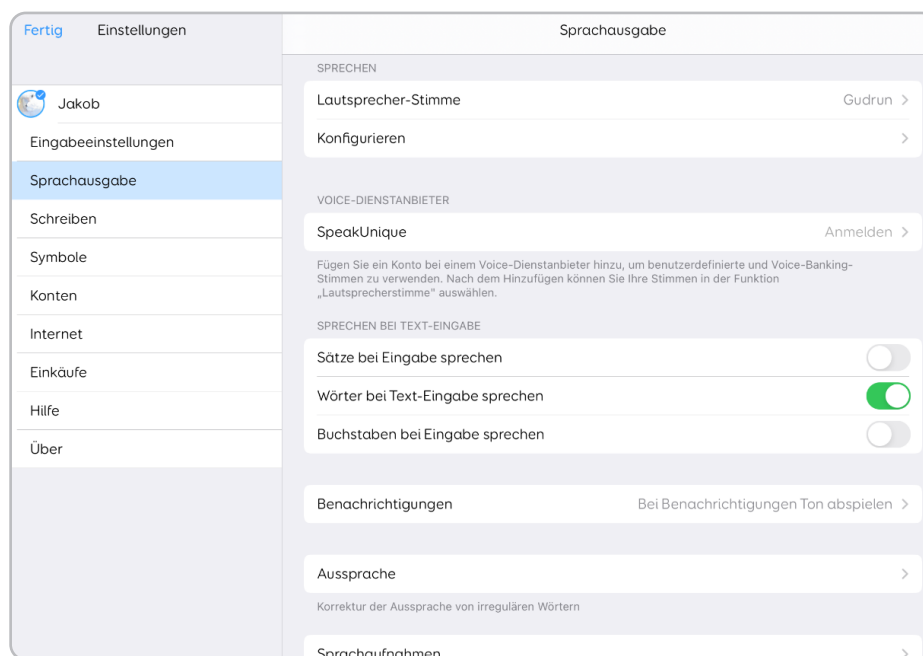

Mit den **Spracheinstellungen** von Grid for iPad können Sie Stimmen anpassen und herunterladen.

Sie können auch kontrollieren, wann Grid for iPad spricht und die Aussprache von Wörtern anpassen.

## Sprechen

### Lautsprecher-Stimme

Tippen Sie auf **Lautsprecher-Stimme** und der **Stimmen-Browser** erscheint.

Oben im Bildschirm werden Ihnen die **installierten** Stimmen angezeigt. Stimmen, die Sie herunterladen können, werden ebenfalls darunter aufgeführt. Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um neue Stimmen herunterzuladen.

Mit dem **Abspielen**-Icon können Sie sich die Stimmen anhören.

Tippen Sie auf den **Namen**, um Ihre Stimme auszuwählen. Neben dieser Stimme erscheint ein **Haken**.

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **Sprachausgabe** und gelangen zurück zu den **Sprechen-Einstellungen**.

## Stimmen herunterladen

Gehen Sie auf **Hinzufügen**, um eine Stimme herunterzuladen.

Die Stimme wird heruntergeladen. Die Liste Ihrer Stimmen wird dann aktualisiert und die neu heruntergeladene Stimme wird zur Liste der installierten Stimmen hinzugefügt.

## Sprache

Die Stimmen auf Ihrer Liste werden automatisch in Ihrer **Benutzersprache** eingestellt. Wenn Sie auf die Sprache oben rechts tippen, sehen Sie die verfügbaren Stimmen in den anderen Sprachen.

## Stimmen und Sprachen

Insgesamt sollen die Stimmen zur Sprache im Seitenset passen, sodass Wörter richtig ausgesprochen werden.

Wenn Sie mit Ihren Seitensets zwischen Sprachen wechseln, Sie z.B. Super Core 30 auf Englisch aber auch auf Spanisch benutzen, ist es sinnvoll, mit dem Befehl **Stimme ändern** die Stimme zu ändern.

## Konfigurieren

Mit **konfigurieren** können Sie anpassen, wie Ihre Stimme klingt. Beim Anpassen Ihrer Stimme, können Sie mit **Sprechen** Ihre Änderungen testen.

## Geschwindigkeit

Mit dem Schieber können Sie die **Geschwindigkeit** Ihrer Stimme anpassen.

## Tonhöhe

Passen Sie an, **wie hoch oder** tief Ihre Stimme klingt.

## Lautstärke

Passen Sie an, wie laut Ihre Stimme ist. Beachten Sie, dass **diese Einstellung von der Lautstärke Ihres iPads unabhängig ist.**

## Sprechen bei Text-Eingabe

Die Einstellungen **Sprechen bei Text-Eingabe beeinflussen, wann Grid for iPad spricht.**

**Sätze bei Eingabe sprechen** liest den ganzen Satz vor, wenn ein Punkt eingegeben wird.

**Wörter bei Text-Eingabe sprechen** liest jedes Wort vor, wenn es in das Schreibfeld eingegeben wird.

**Buchstaben bei Eingabe sprechen** liest jeden Buchstaben vor, wenn er in das Schreibfeld eingegeben wird.

Diese Einstellungen können auch kombiniert werden, sodass **Buchstaben** und **Wörter** bei Eingabe ausgesprochen werden, oder nur **Sätze**.

## Benachrichtigungen

Hier können Sie einstellen, ob bzw. wie Sie benachrichtigt werden möchten.

### Kein Benachrichtigungston

Die Benachrichtigung erscheint, aber ohne Ton.


### Bei Benachrichtigungen Ton abspielen

Die Benachrichtigung erscheint mit einem Warnton.

### Audiodatei abspielen und Benachrichtigungen sprechen

Die Benachrichtigung erscheint mit einem Warnton und wird in Ihrer Lautsprecherstimme vorgelesen.

# Aussprache

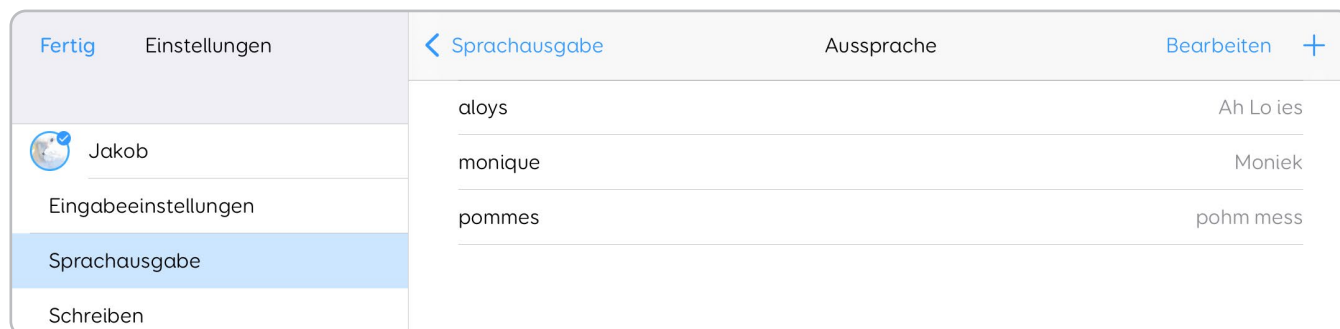

Manchmal spricht Ihre Grid-Stimme ein Wort falsch aus. Sie können dies korrigieren, indem Sie **Aussprache** auswählen und das Wort mit dem **+** Icon hinzufügen.


Geben Sie das falsch ausgesprochene Wort ein, und schreiben Sie es dann phonetisch.

Der Name „**Monique**“ kann z.B. seltsam klingen.

Um ihn richtig auszusprechen, geben Sie „**Mohniek**“ ein.

Wenn Sie Ihre Stimme ändern, sollten Sie die Aussprache nochmals prüfen.

Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um Wörter zu entfernen oder zu ändern.

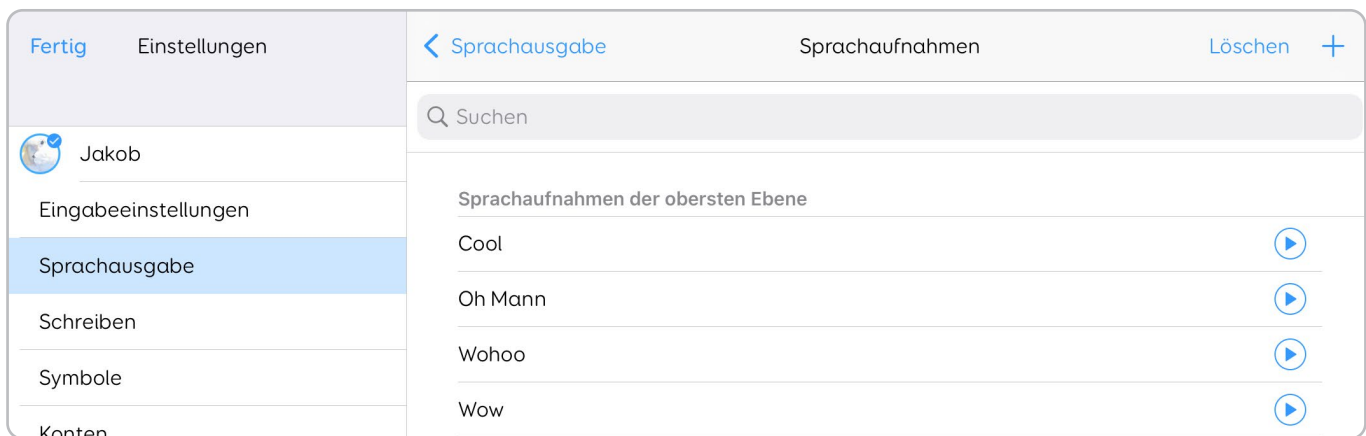

## Sprachaufnahmen

Mit **Sprachaufnahmen** können Sie Ihre eigenen Wörter aufzeichnen und zu Grid for iPad hinzufügen.


Diese Wörter oder Ausdrücke werden automatisch in Ihre Sprache eingebaut, wenn sie ins Schreibfeld eingegeben werden. Sie können auch Seiten mit Sprachaufnahmen erstellen, um spezielle Ausdrücke zu benutzen.

Sie können z.B. Begrüßungen, Namen und Orte, die Ihnen wichtig sind, oder häufig verwendete Ausdrücke aufzeichnen.

### Eine Nachricht hinzufügen

Mit dem **+** Icon öffnen Sie das **Fenster Sprachaufnahme hinzufügen**.

Gehen Sie auf **Aufnahme starten**, dann können Sie das iPad-Mikrofon benutzen und Ihre Nachricht aufzeichnen. Ggf. erscheint ein Pop up, in dem Sie Zugriff auf das Mikrofon genehmigen müssen.

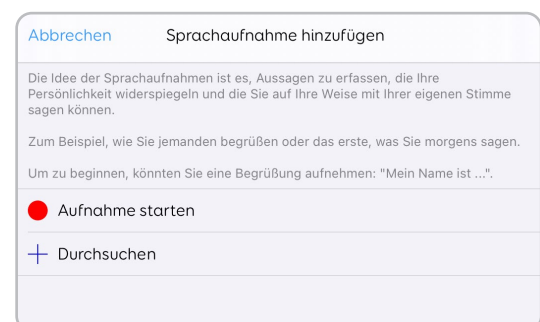

Sprechen Sie Ihre Aufnahme auf und gehen Sie dann auf **Aufnahme stoppen**.

Mit **Durchsuchen** können Sie die Nachrichten durchgehen, die auf Ihrem iPad gespeichert sind.

Die Sprachaufnahmen-Funktion ist kompatibel mit **WAV, MP3, M4A** und **WMA-Dateien**.

Sie können auch eine **Zip-Datei** mit mehreren Audiodateien importieren.

Dann können Sie Ihre Nachricht auf dem Bildschirm **Nachricht bearbeiten** anpassen.

Abbrechen	Nachricht bearbeiten	Fertig
Bezeichnung	Blubbern	
Felderbeschriftu	Blubbern	
Dauer	1 Sekunden	
Kategorien	Sprachaufnahmen der obersten Ebene >	
Wählen Sie aus, wo diese Sprachaufnahme angezeigt wird, wenn die Sprachaufnahmen in Seiten angezeigt werden.		
Sprache	German (Germany) >	

## Bezeichnung

Das ist der Text der Nachricht. Er wird auch als Auslöser-Wort oder -Ausdruck für Ihre Nachricht fungieren.

Wenn Ihre Nachricht nur aus einem Wort besteht, wie einem Namen, wird sie ausgelöst, wenn dieser eingetippt wird.

Wenn Sie die Computerstimme für die Nachricht beibehalten möchten, können Sie den gesamten Text noch mit einem Präfix wie „01“ oder „MB“ versehen.

## Beispiel

Sie haben eine Nachricht für Ihr Lieblingsgetränk aufgenommen, möchten aber nicht, dass sie außerhalb eines Cafés abgespielt wird.

Sie nehmen die Nachricht „**Hafermilch Latte**“ auf.

Abbrechen	Nachricht bearbeiten	Fertig
Bezeichnung	MB-Kaffee	
Felderbeschriftu	Hafermilch Latte	
Dauer	1 Sekunden	
Kategorien	Sprachaufnahmen der obersten Ebene >	
Wählen Sie aus, wo diese Sprachaufnahme angezeigt wird, wenn die Sprachaufnahmen in Seiten angezeigt werden.		
Sprache	German (Germany) >	

Im **Bezeichnung** geben Sie ein: „**MB-Kaffee**“

Jetzt können Sie ein Schreibfeld mit dem Text „**HM-Kaffee**“ erstellen, das Ihre Nachricht abspielt. Wenn Sie aber „**Hafermilch Latte**“ schreiben, wird sie nicht abgespielt.

### Felderbeschriftung

Das ist die Feldbeschriftung, wenn sie in einem Seitenset erscheint.

### Dauer

Länge der Nachricht

## Kategorien

Sprachaufnahmen werden in Kategorien unterteilt.

Unter **Kategorien** können Sie auswählen, wo Ihre Nachrichten abgespeichert werden. So schaffen Sie eine Struktur für das Seitenset Sprachaufnahmen. **Sprachaufnahmen der obersten Ebene** erscheinen automatisch.

Mit **+** kann eine neue Kategorie erstellt werden.

Nachrichten können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Gehen Sie auf den Namen einer Kategorie um auszuwählen, in welcher Kategorie Ihre Nachricht erscheinen soll.


## Sprache

Mit der Sprachauswahl können Sie bestimmen, in welcher **Sprache** Ihre Nachricht ist.

So können Sie Nachrichten in verschiedenen Sprachen nutzen.

Nachrichten werden nur in gleichsprachigen Seitensets ausgelöst.

Nachrichten werden nach Sprache gefiltert. Zum Durchsehen tippen Sie auf den Sprachschalter unten im Sprachaufnahmen-Fenster.

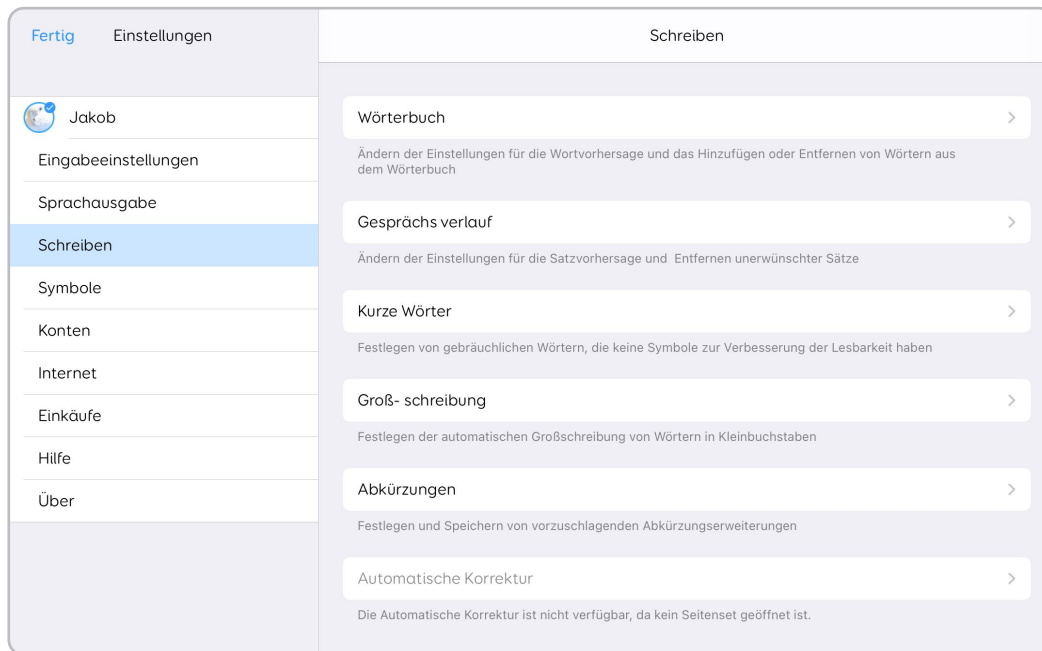


## a. Wörterbuch

Die Wörterbucheinstellungen bestimmen, wie Wörter in Ihrem Schreibfeld gespeichert, vorhergesagt und angezeigt werden.

## Wortvorhersage

Mit den Vorhersage-Einstellungen können Sie steuern, wie Vorhersagen gespeichert und angeboten werden.

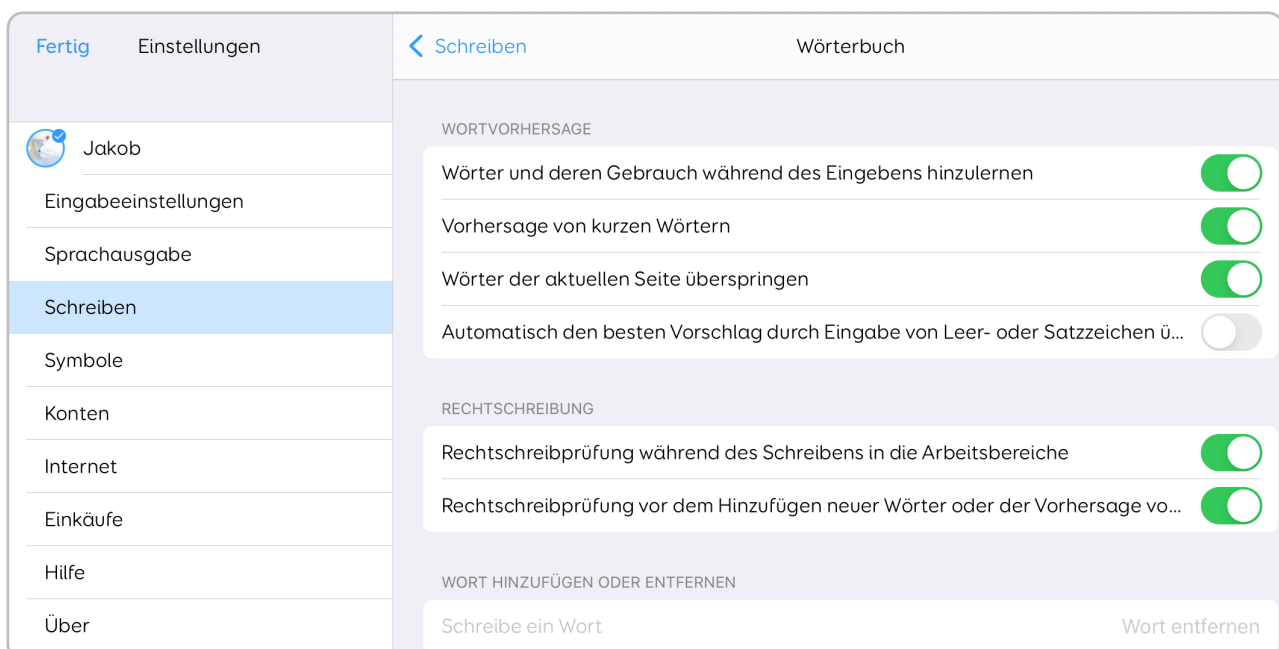

## **Wörter und deren Gebrauch während der Eingabe hinzulernen**

Wenn Sie neue Wörter einführen lernt Grid, wie oft und wann sie verwendet werden und schlägt sie im passenden Moment vor. Dies geschieht bei eingeschaltetem **Lernen mit Wortvorhersage**.

### **Vorhersage von kurzen Wörtern**

Steuert, ob kurze Worte wie „bin“ und „mein“ (Definition in den Einstellungen **Kleine Wörter**) auch vorgeschlagen werden.

### **Wörter der aktuellen Seite überspringen**

Wenn ein Wort bereits auf der aktuellen Seite erscheint, wird es nicht in den Vorhersage-Feldern angezeigt. Das hilft, wenn Sie mehrere Seitensets auf Symbolbasis verwenden.

### **Automatisch den besten Vorschlag durch Eingabe von Leer- oder Satzzeichen übernehmen**

Beim Eingeben Ihrer Nachricht wird die wahrscheinlichste Vorhersage hervorgehoben. Mit der Leertaste nehmen Sie die Vorhersage an und sie wird in Ihr Schreibfeld kopiert.

## **Rechtschreibung**

Mit den Einstellungen für Rechtschreibung können Sie entscheiden, ob die Rechtschreibprüfung aktiv sein soll und ob Vorhersagen erlernt werden.

### **Rechtschreibprüfung während des Schreibens in die Arbeitsbereiche**

Hier können Sie die Rechtschreibprüfung aktivieren. Wenn sie aktiv ist, unterstreicht Grid Fehler in rot.

### **Rechtschreibprüfung vor dem Hinzufügen neuer Wörter**

Wenn Grid einen Rechtschreibfehler hervorhebt, wird er nicht erlernt oder vorgeschlagen.

## Wörter hinzufügen und entfernen

Sie können ein Wort manuell hinzufügen. Tippen Sie in den Kasten **Wort hinzufügen** und geben Sie Ihren Text ein. Tippen Sie auf **Wort hinzufügen** und es wird in Ihr Wörterbuch aufgenommen. Hinzugefügte Wörter sind Teil Ihrer Benutzereinstellungen und sie werden in allen Sprachen ergänzt, die Sie verwenden.

Um ein Wort zu entfernen, geben Sie das Wort ein und tippen Sie auf **Entfernen**.

## b. Gesprächsverlauf

Der Gesprächsverlauf zeichnet Ihre Sätze und Ausdrücke auf, sodass man sie schnell noch einmal sagen kann. Grid erinnert sich daran, was Sie sagen und wo Sie waren, als es gesagt wurde. So sind Vorschläge noch genauer.

Grid speichert automatisch jede Nachricht, die ins Schreibfeld eingegeben wird.

Im **Privatmodus** können Sie diese Aufzeichnung innerhalb eines Seitensets ein- oder ausschalten.

## Geschriebene Sätze hinzulernen

Die Funktion, aus dem Gesprächsverlauf zu lernen, kann ein- und ausgeschaltet werden. Grid bietet weiterhin Vorschläge aus Ihren bestehenden Gesprächsinhalten an.

## Standortaktivität speichern

Steuern Sie, ob der Standort mit Ihrer Nachricht gespeichert wird. Standortdaten sind mit jeder Nachricht einzeln verknüpft.

## Gesprächsinhalte

Durch Drücken von **Gesprächsinhalte** erscheint die gesamte Chat History. Grid hat eine voreingestellte Liste mit über 3000 häufigen Ausdrücken.

Neben jedem Ausdruck sieht man, wie oft er verwendet wurde. Wenn Sie mit einem leeren Gesprächsverlauf beginnen möchten, leeren Sie Ihr Benutzerprofil mit **Alles entfernen**. Diese Aktion müssen Sie bestätigen, da man den Gesprächsverlauf nur mit einer Sicherungskopie des Benutzers wiederherstellen kann.

Im Suchfeld können Sie nach Nachrichten suchen.

Mit **Bearbeiten** können Sie spezifische Nachrichten aus Ihrem Gesprächsverlauf entfernen.

## Sprachen

Jede Sprache, die Grid unterstützt, hat eine eigene Gesprächsverlauf-Bibliothek.

Wenn Sie mehr als eine Sprache sprechen, können Sie zwischen Gesprächsverläufen umschalten.

## c. Kurze Wörter

Kurze Wörter sind häufige Begriffe, die im Schreibfeld ohne Symbol erscheinen.

So können sich Symbole auf die Schlüsselwörter Ihrer Nachricht konzentrieren.

Sie können sich Ihre aktuelle Liste **kurzer Wörter** ansehen.

Wenn Sie auf **Bearbeiten** tippen können Sie jegliche Wörter aus der Liste löschen.

Mit dem + Icon können Sie ein Wort hinzufügen.

## d. Großschreibung

Mit **Großschreibung** legen Sie Wörter fest, die automatisch groß geschrieben werden sollten, wenn sie klein eingegeben werden.

Dieses ist für häufig verwendete Namen und Orte sehr hilfreich.

Gehen Sie auf **+**, um ein großgeschriebenes Wort hinzuzufügen.

Mit **Bearbeiten** können Sie Wörter aus der Liste löschen.

## e. Abkürzungen

Mit der Option **Abkürzungen** können Sie in Grid schnell Nachrichten schreiben.

Sie können Abkürzungen wie „z.B.“ in die Liste aufnehmen und einstellen, dass sie „zum Beispiel“ ausgesprochen wird.


Eine Liste Ihrer Abkürzungen wird angezeigt.

Mit **+** können Sie eine neue Abkürzung hinzufügen.

Geben Sie im Abkürzungsfeld eine kurze Buchstabenkombination ein, die für einen Ausdruck steht, z.B. „Mfg“, „usw“ oder „bzw.“.

Im Erweiterungsfeld geben Sie den Ausdruck ausgeschrieben ein, also

„Mit freundlichen Grüßen“, „und so weiter“ oder „beziehungsweise“ und tippen auf Speichern.

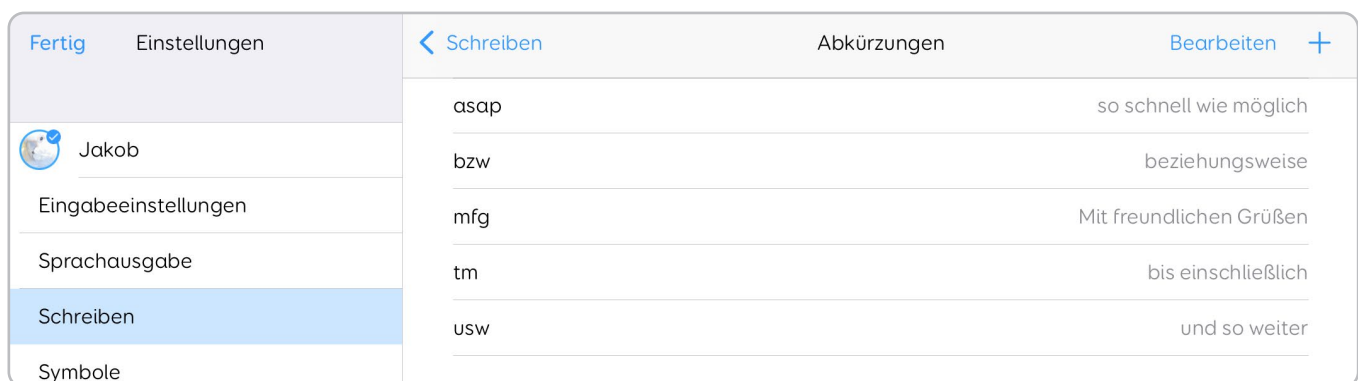

Gehen Sie auf **Bearbeiten**, um Abkürzungen zu entfernen.


## f. Automatische Korrektur

Ausdrücke, die automatisch korrigiert werden, sind vom Seitenset und nicht vom Benutzer abhängig.

Mit **Automatische Korrektur** können kleine Grammatikfehler verbessert werden, die bei der Verwendung von **Nachsilben** und **Vorsilben** zur Wortanpassung entstehen.

In Super Core kann man z.B. einfach das Wort „**Museum**“ zu „**Museums**“ ändern und es dann mit **Automatische Korrektur** zu „**Museen**“

Geben Sie den ursprünglichen Satz ein. Dann Drücken Sie **Ersetzen**. Bei Eingabe eines Satzes können Sie nun die gewünschten Symbole wählen.

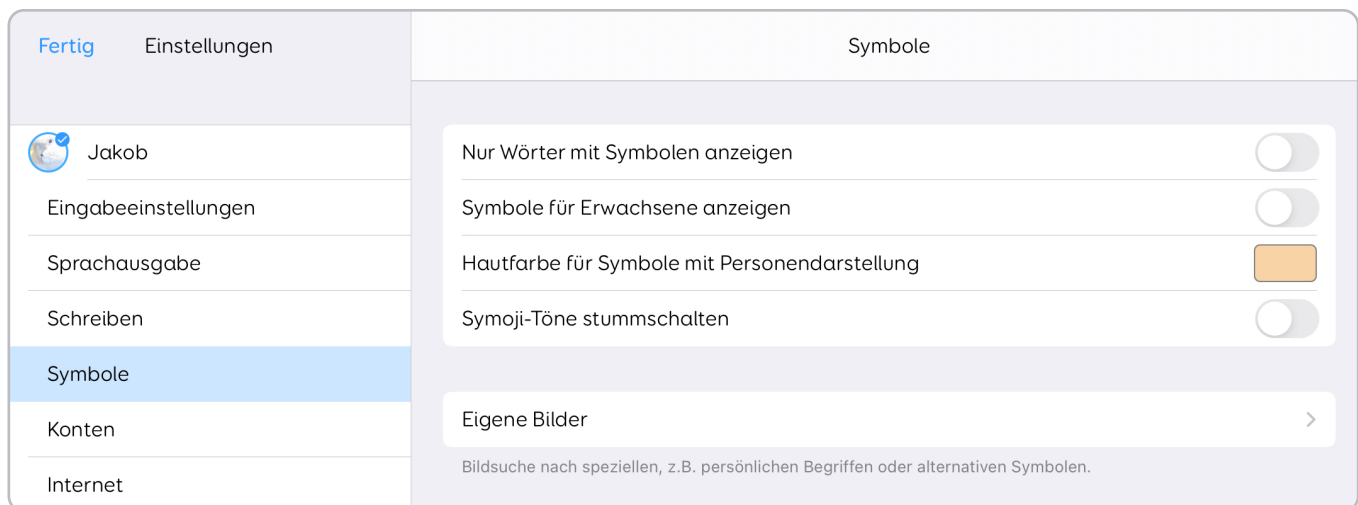

**Symboleinstellungen** steuern, wie ein Symbol in Ihrem Schreibfeld und Seitenset angezeigt wird.

## Nur Wörter mit Symbolen anzeigen

Es werden nur Wörter, die mit Symbolen verbunden sind, in den Vorhersage-Feldern angeboten. Das hängt davon ab, welche Symbol-Bibliotheken Sie installiert haben. Wenn Sie ein Wort nicht finden, müssen Sie Ihrem Seitenset evtl. mehr Symbol-Bibliotheken hinzufügen.

Die Reihenfolge der Symbol-Bibliotheken in Ihrem Seitenset beeinflusst, in welcher Reihenfolge Symbole angezeigt werden, wenn es mehrere für ein Wort gibt.

## Symbole für Erwachsene anzeigen

Sie können **Symbole für Erwachsene** ein- und ausschalten. Bitte beachten Sie, dass viele Symbol-Bibliotheken Sprache und Bilder beinhalten, die nicht unbeaufsichtigt ein gesehen werden sollten.

# Hautfarbe für Symbole mit Personendarstellung

Die **Hautfarbe der Symbole** kann angepasst werden. Damit wird die Hautfarbe aller Symbole in Ihrer Bibliothek entsprechend geändert. Um die Originalfarbe der Symbole angezeigt zu bekommen, wählen Sie **Symbol-Standard**.

## Eigene Bilder

Mit den Einstellungen von **Eigene Bilder** können Sie spezielle Bilder für Wörter aussuchen, die Sie oft verwenden.

So erscheinen auch Bilder von persönlichen Gegenständen, Freunden und Familienmitgliedern im Schreibfeld.

Eine Liste Ihrer aktuellen Wörter wird angezeigt.

Tippen sie auf **+**, um ein neues Wort hinzuzufügen.

Geben Sie Ihr Wort ein und tippen Sie auf **Ändern**, um ein neues Bild zu wählen.


Sie können die installierten Symbol-Bibliotheken oder Ihre Foto-Bibliothek durchsuchen, im Internet suchen oder die Kamera benutzen, um ein Bild aufzunehmen.

Zum Schluss tippen Sie auf Speichern.

Sie können auf ein Wort tippen, um das Bild zu bearbeiten. Mit **Bearbeiten** können Sie ein benutzerdefiniertes Wort entfernen.

Ihre benutzerdefinierten Wörter werden in allen Sprachen angezeigt.

**Beachten Sie, wenn Sie das Bild für ein Wort ändern, wird es auf keinen bestehenden Seitensets ersetzt. Wenn Sie jedoch ein neues Schreibfeld mit Ihrem Wort erstellen, wird automatisch Ihr benutzerdefiniertes Bild eingefügt.**

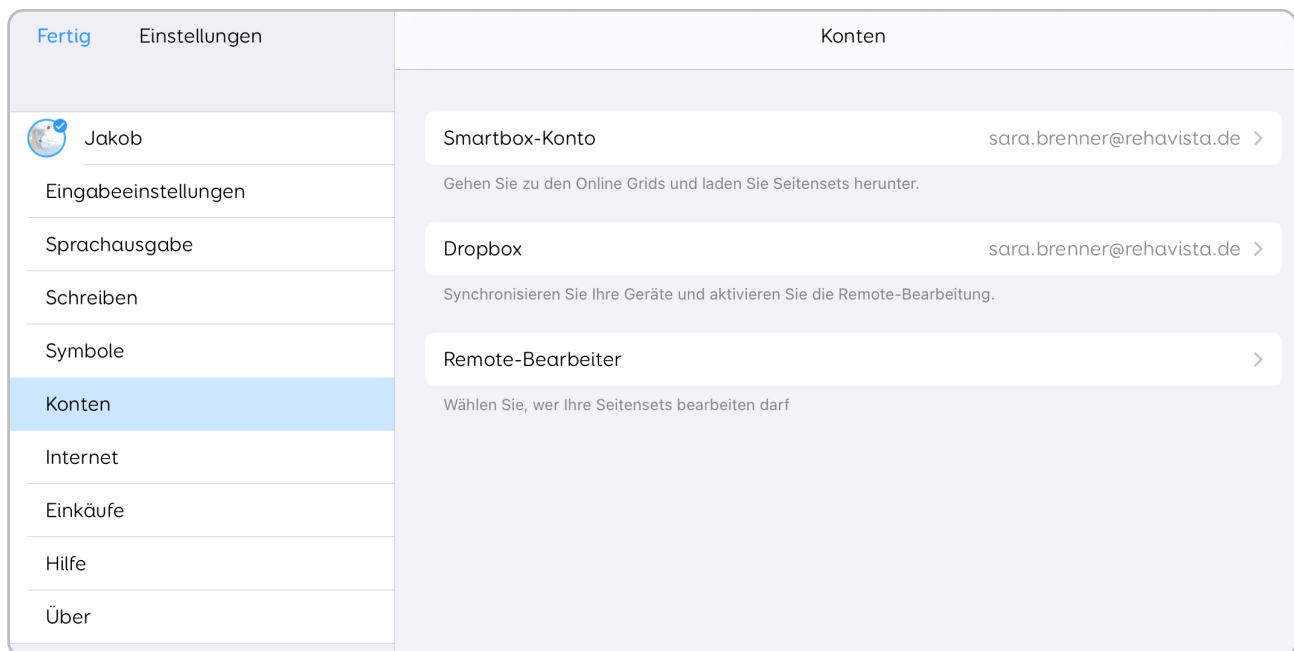

Verwalten Sie die mit Ihrem Grid for iPad Benutzer verbundenen Konten.

## Smartbox-Konto

Ihr Smartbox-Konto-Passwort können Sie hier zurücksetzen.

Loggen Sie sich unter [grids.thinksmartbox.com](https://grids.thinksmartbox.com), um ihre Kontoeinstellungen zu verwalten.

## Dropbox

Verbinden Sie Ihr **Smartbox-Konto** mit Ihrem **Dropbox-Konto**. Dann werden Ihre Seitensets und Sprachaufnahmen gesichert und die Remote-Bearbeitung ermöglicht.

Dropbox **synchronisiert ihre Seitensets automatisch** zwischen Geräten, wenn Sie mehrere verwenden.

Ein **orangefarbener Ring** erscheint um Ihr Benutzersymbol, wenn das Gerät gerade Dateien synchronisiert.

Wenn Ihr Gerät synchronisiert ist, erscheint ein **blauer Haken**.

Dropbox legt in Ihrem Konto einen Ordner für **Smartbox-Seiten** an, von wo aus Ihre Dateien gesichert und synchronisiert werden. **Grid hat auf keinen Bereich von Dropbox Zugriff.**

Wenn Sie mit Dropbox verbunden sind, können Sie die **Verbindung trennen**. So deaktivieren Sie Remote-Bearbeitung, **entfernen jedoch keine Dateien** aus Ihrer Dropbox.

## Remote-Bearbeiter

Remote-Bearbeitung ermöglicht es **Grid 3-Benutzern, auf ihre Seitensets zuzugreifen** und Änderungen vorzunehmen.

Sie müssen jedem Remote-Bearbeiter Zugriff auf Ihre Seitensets ermöglichen.


Mit **+** können Sie einen Remote-Bearbeiter hinzufügen.

Geben Sie die **E-Mail Adresse** des Bearbeiters ein.

Wenn mit dieser E-Mail Adresse ein **Smartbox-Konto** verbunden ist, erhält der Bearbeiter eine E-Mail Benachrichtigung, dass Sie ihm Zugriff ermöglicht haben und er mit Grid 3 auf Ihre Seitensets zugreifen kann.

Wenn die E-Mail Adresse nicht mit einem Smartbox-Konto verbunden ist, wird der Bearbeiter dazu eingeladen, sich eines **einzurichten**.

Es wird keine Grid 3-Lizenz benötigt, um die Funktion **Remote-Bearbeitung** zu verwenden.

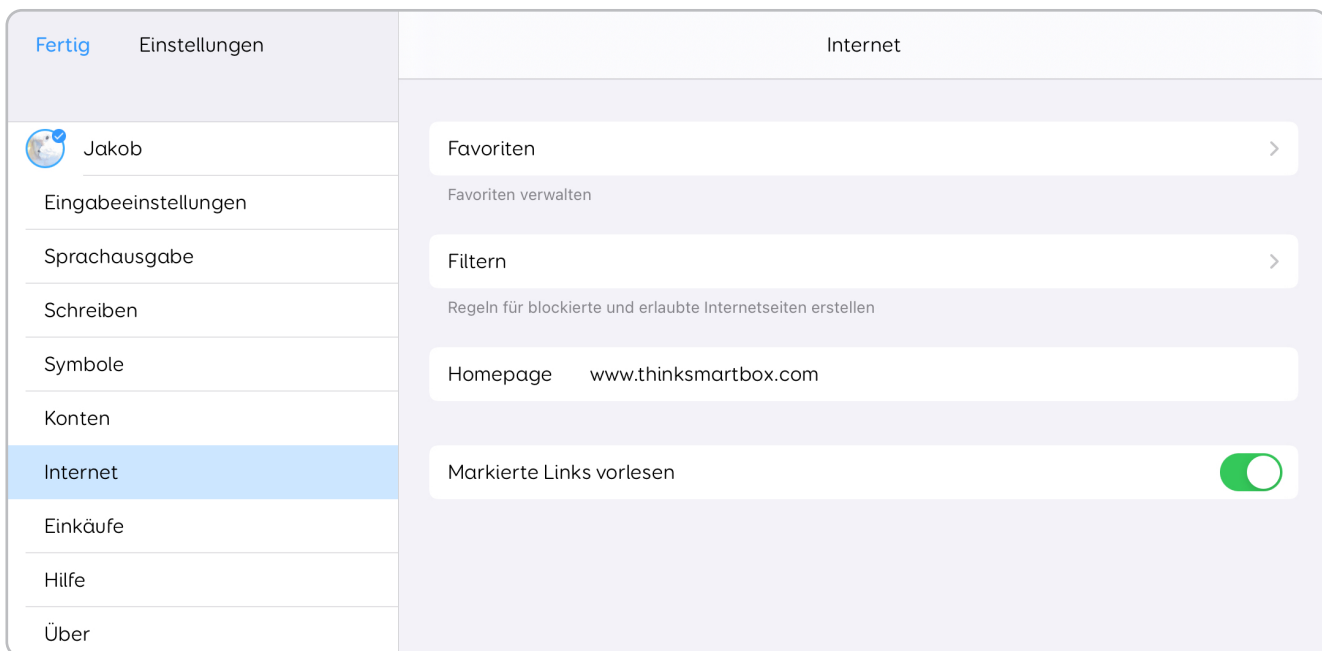

Einstellungen bezüglich des Internetzugriffs, wenn Sie die App mit Web-Browser Zugriff benutzen.

## Favoriten

Verwalten Sie die Liste Ihrer Lieblingsseiten. Diese befüllt **Auto-Inhalt Felder zu Lieblingsseiten**.

Mit **+** fügen Sie einen neuen Favoriten hinzu.

Geben Sie die Webadresse (URL) Ihrer Seite ein. Die meisten URLs beginnen mit **https://**.

**Beschriften** Sie Ihren Favoriten.

Unter Ihrer **Beschriftung** erscheint ein kleines Icon von der Website, das Sie antippen und zu Ihrem eigenen Bild abändern können.

Zum Schluss auf **Speichern** tippen.

Einen Favoriten bearbeiten Sie, indem Sie ihn aus der Liste auswählen und dann die **URL, Beschriftung** und das **Bild** ändern.

Mit **Bearbeiten** können Sie Favoriten aus Ihrer Liste entfernen.

## Filtern

**Filtern** ermöglicht es, Regeln für blockierte und erlaubte Internetseiten zu erstellen.

Mit „**Diese Webseiten blockieren**“ verhindern Sie Zugriff auf gewisse Seiten, oder wählen Sie „**Nur diese Webseiten zulassen**“, um Zugriff nur auf Seiten auf Ihrer Liste zu gewähren.

Sie können auch **nur diese Webseiten Zulassen** auswählen, was alle Webseiten ausschließt, die nicht auf Ihrer Liste stehen.

Mit **+** fügen Sie eine Seite zur Filterliste hinzu.

Geben Sie die Webadresse (URL) Ihrer Seite ein. Die meisten URLs beginnen mit **https://**.

Zum Schluss auf **Speichern** tippen.

Mit **Bearbeiten** können Sie Webseiten aus Ihrer Liste entfernen.

## Homepage

Ihre Startseite wird geladen, wenn Sie eine Seite öffnen und es einen Web-Browser gibt.


Wenn Sie zu einer spezifischen Webseite navigieren möchten, die nicht Ihre Homepage ist, geben Sie mit den **Seiten-Befehlen** die Webseite an, sobald sich eine Seite öffnet.

## Markierte Links vorlesen


Wenn Sie mit dem Web Browser zu einer Seite navigieren, können Links vorgelesen werden, da sie mit dem Befehl **Nächster Link** und **Vorheriger Link** hervorgehoben werden.

## 3.9

# Seitenset

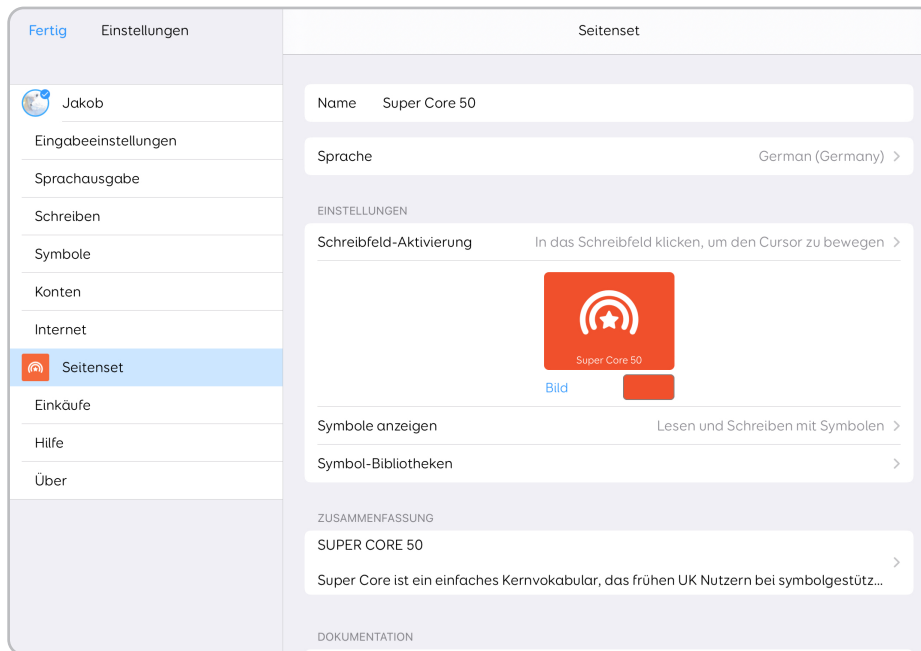


Diesen Menüpunkt sehen Sie nur, wenn Sie **bei geöffnetem Seitenset** in die Einstellungen wechseln! Hier können Sie Einstellungen für das spezifische Seitenset vornehmen.

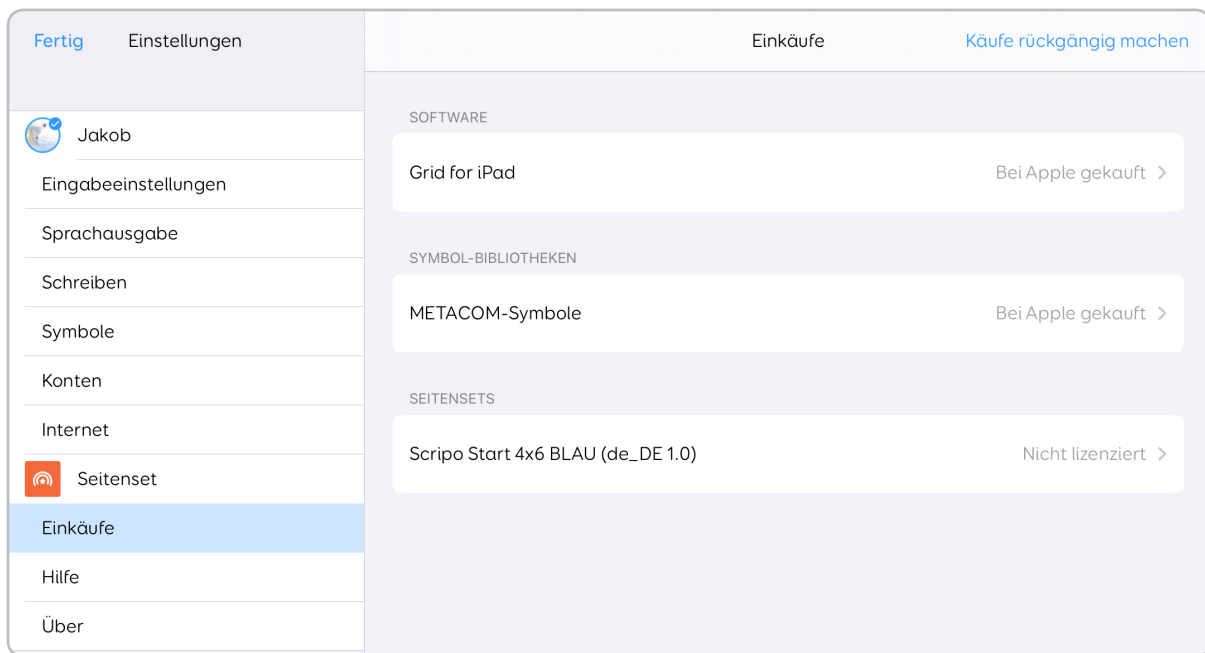

Der Bereich **Einkäufe** beinhaltet Angaben zu Ihren erworbenen Lizenzen, zusätzlichen Seiten und anderen Einkäufen im App Store.

Gehen Sie auf einen **Einkauf**, um mehr darüber zu erfahren, wann er aktiviert wurde.

Wenn Sie Grid for iPad mit einem Smartbox-Konto aktiviert haben, loggen Sie sich bei Online Grids unter [grids.thinksmartbox.com](https://grids.thinksmartbox.com) ein, um hier die Angaben zu Ihrer Lizenz einzusehen.

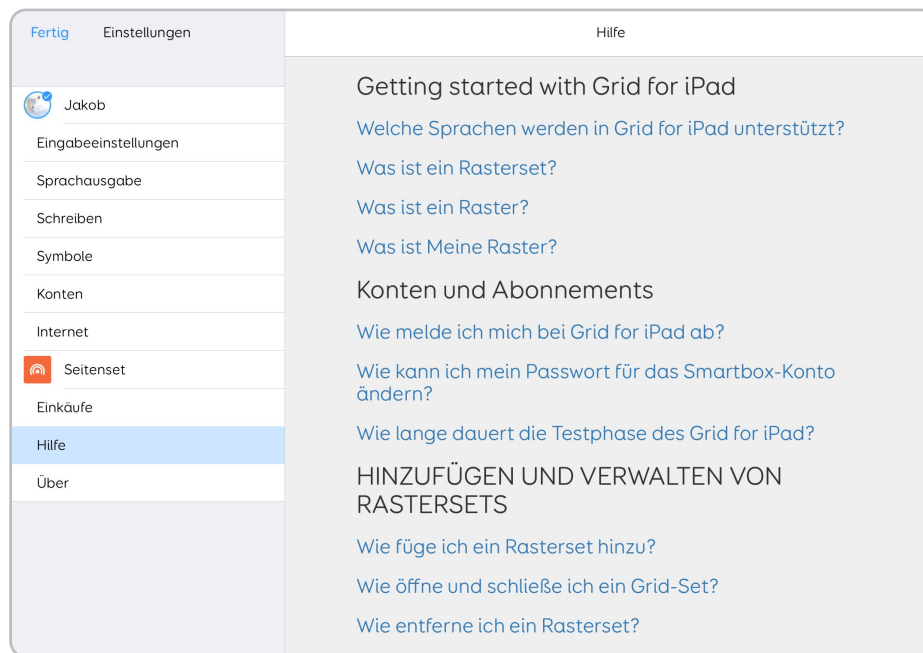

Unter **Hilfe** werden Ihnen häufig gestellte Fragen über Grid for iPad angezeigt.

Ihr iPad muss online sein, um diese Informationen einzusehen.

Informationen über die Grid for iPad App.

## Über Grid

Gehen Sie auf **Über Grid** und finden Ihre Versionsnummer und andere Angaben zu Übereinstimmung, Nutzungslizenzen und mehr.

## Versionsverlauf


Hier finden Sie Fehlerbehebungen und Neuerungen der Softwareversionen von Grid for iPad.

Mehr Angaben zu Updates finden Sie auf der Smartbox-Webseite unter [thinksmartbox.com](http://thinksmartbox.com).

## Protokoll übermitteln

**Protokolle** geben darüber Auskunft, wie Grid for iPad läuft und können für unser Support- und Entwicklungsteam bei der Fehler- und Problemsuche für unsere Benutzer sehr hilfreich sein.

Das Smartbox Support Team fordert manchmal Protokolle an, wenn sie an der Behebung von Problemen arbeiten.

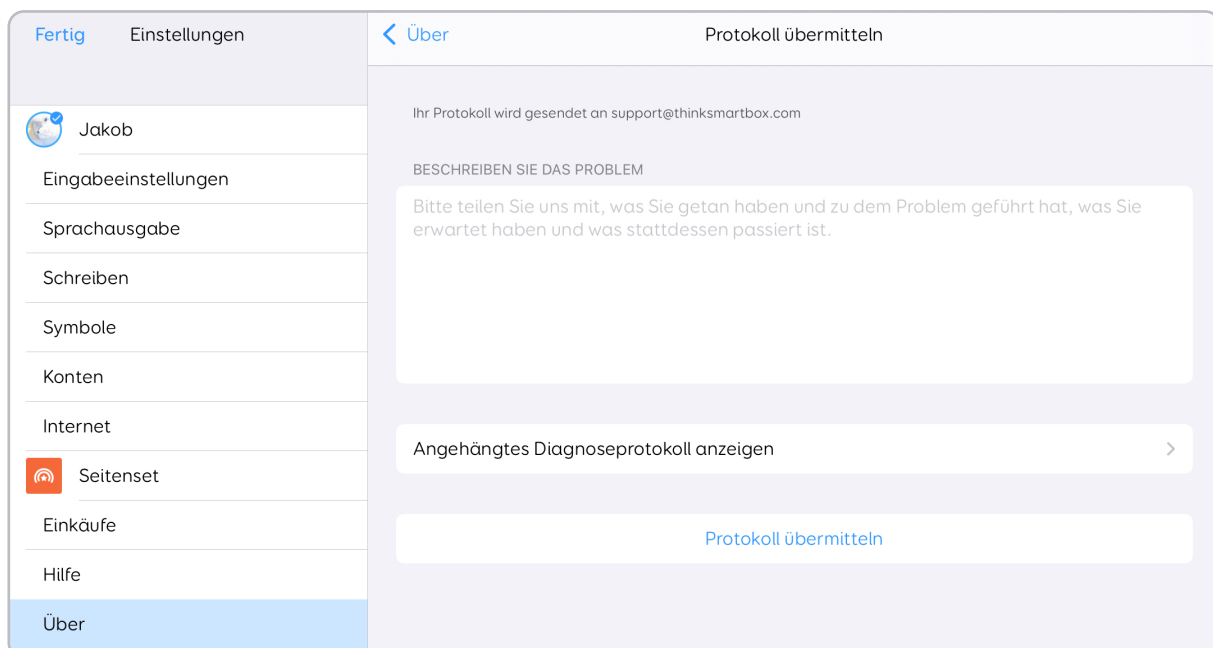

Bei Schwierigkeiten mit Grid for iPad wenden Sie sich an den Support Ihres Vertragshändlers oder direkt an das Smartbox Support Team.

[thinksmartbox.com/support](https://thinksmartbox.com/support)

Wenn Sie ein **Protokoll** bei Smartbox einreichen, wird auch die E-Mail Adresse Ihres **Smartbox-Kontos** weitergegeben.

## Beschreiben Sie Ihr Problem

In diesem Feld können Sie Ihre Softwareprobleme kurz erläutern und Ihre Schwierigkeiten kurz beschreiben.

Beschreiben Sie die Situation so genau wie möglich, da unser Team so Probleme erkennen kann.

## Angehängtes Diagnoseprotokoll anzeigen

Sie können auf **Angehängtes Diagnoseprotokoll anzeigen** tippen, um Ihr Protokoll einzusehen.

Mit iOS-Gesten wie Antippen und Halten können Sie gewisse Bereiche markieren und kopieren oder den Text in anderen Apps teilen.

## Protokoll übermitteln

Gehen Sie auf Protokoll übermitteln und reichen Sie Ihr Protokoll mit Ihrer Beschreibung im Anhang bei Smartbox ein.

## 3.13


# iPad OS-Einstellungen

Grid for iPad hat verschiedene Einstellungen, auf die in der **Einstellungen-App** von iPad OS zugegriffen werden kann.

Öffnen Sie die **Einstellungen-App**.



Scrollen Sie nach unten, um Ihre Grid App zu finden.

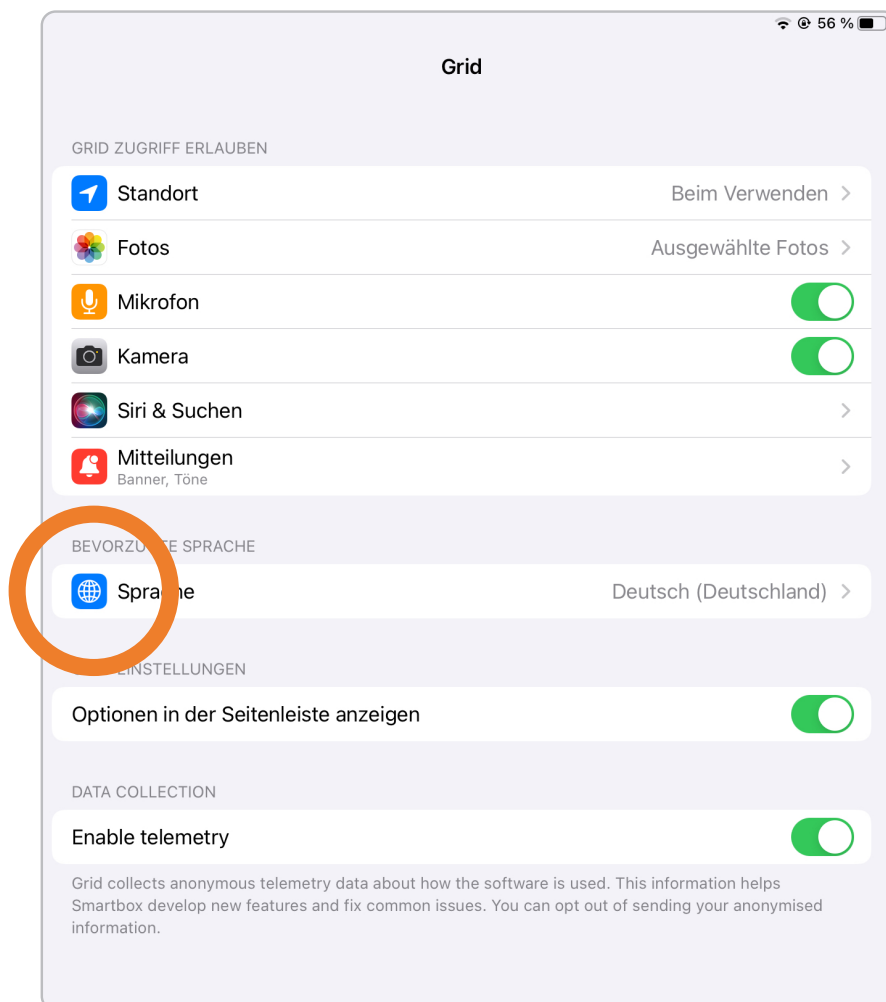

## Genehmigungen


Unter der Rubrik **Grid Zugriff erlauben** können Sie anpassen, auf was Grid for iPad zugreifen darf.

# Grid-Einstellungen


## Optionen in der Menüleiste anzeigen

Diese Einstellung ist nützlich, wenn man die Grid for iPad-App eingestellt hat und vermeiden will, dass ein Benutzer auf die Einstellungen zugreifen und sie ändern kann.

Hinweis: Wenn diese Einstellung abgeschaltet wird, haben Sie keinen Zugriff auf das Optionen-Menü in Grid for iPad.

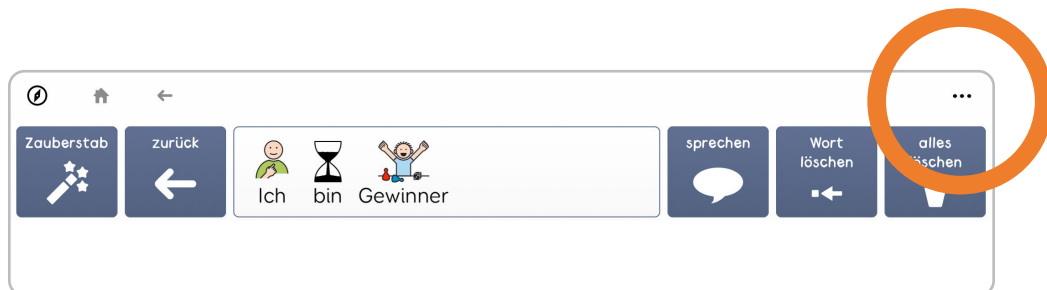

Optionen in der Seitenleiste anzeigen **AN**

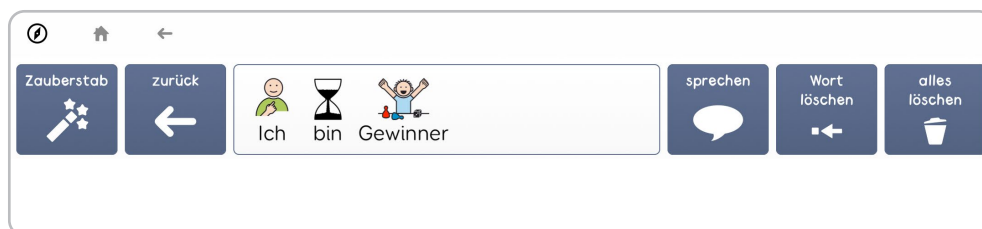

Optionen in der Seitenleiste anzeigen **AUS**

## Enable telemetry

Grid sammelt anonymisierte Daten über das Nutzungsverhalten der App, die den Entwicklern bei der Verbesserung der App helfen. Sie können die Datenerhebung hier ein- und ausschalten.



4

# Support

**Wo Sie für Grid for iPad Hilfe erhalten können**

4.1	iPad OS-Einstellungen	150
4.2	Aktualisierung von Grid for iPad	152
4.3	Unterstützung	153
4.4	Sicherheitshinweise	154
4.5	iPad Systemanforderungen	156

## 4.1

# Grid for iPad Versionen

Wenn Sie im App Store Grid for iPad suchen, finden Sie zwei Versionen.

Die VPP-Version ist für Einrichtungen gedacht, die mehrere Kopien erwerben. Ansonsten sind beide Versionen identisch.

## Grid for iPad - UK



Diese Version der App ist ideal für Anwender, die vor dem Kauf die App testen oder auf das monatliche Abo zugreifen möchten.

Der endgültige Erwerb wird **in der App** auf dem Startbildschirm abgeschlossen.

## Abos

Mit dem Abonnement bieten wir die App **30 Tage gratis zur Probe** an. Danach wird das Konto automatisch auf monatliche Zahlung umgestellt.

Abos werden von Apple verwaltet. Sie können Ihr Abo in der App **Apple Einstellungen** unter Ihrer Apple ID verwalten. Kündigen Sie Ihr Abo, können Sie die App noch bis Ende des bezahlten Monats verwenden.

## Smartbox Account

Grid for iPad kann mit Ihrem **Smartbox Account** aktiviert werden.

Dafür muss Ihrem Smartbox Account über Online Grids ([grids.thinksmartbox.com](https://grids.thinksmartbox.com)) ein Lizenzcode hinzugefügt werden.

Wenn die Aktivierung für Grid for iPad in Ihrem Smartbox Account verfügbar ist, melden Sie sich im Grid for iPad Startbildschirm an und erhalten so Zugang zur App.

## Grid for iPad - VPP



Diese Version der App ist für Schulen, Krankenhäuser und andere Einrichtungen geeignet, die für mehrere iPads einkaufen.

VPP steht für **Volume Purchase Program**. Dieses Tool benutzt Apple für Unternehmen und Einrichtungen, die Apps in großen Mengen kaufen und in ihrem Netzwerk verteilen. Diese Version der App hat **keinen** Abo- oder Kaufbildschirm und kann direkt im App Store erworben werden.

Wenn Sie in großen Mengen kaufen, können Sie zum Erwerb von Grid for iPad - VPP den Apple VPP Store und Ihr eigenes Netzwerk zur Verteilung von Apps nutzen.

## 4.2


# Aktualisierung von Grid for iPad

Grid wird stets weiterentwickelt, um neue Funktionen, Inhalte und Korrekturen zur Verfügung zu stellen. Darum empfehlen wir, Grid immer auf dem neusten Stand zu halten.

## Automatische Updates

Ob Updates automatisch ausgeführt werden, hängt von den Einstellungen ab.

Das können Sie in Ihrer iPad **Einstellungen-App** im App Store verwalten.

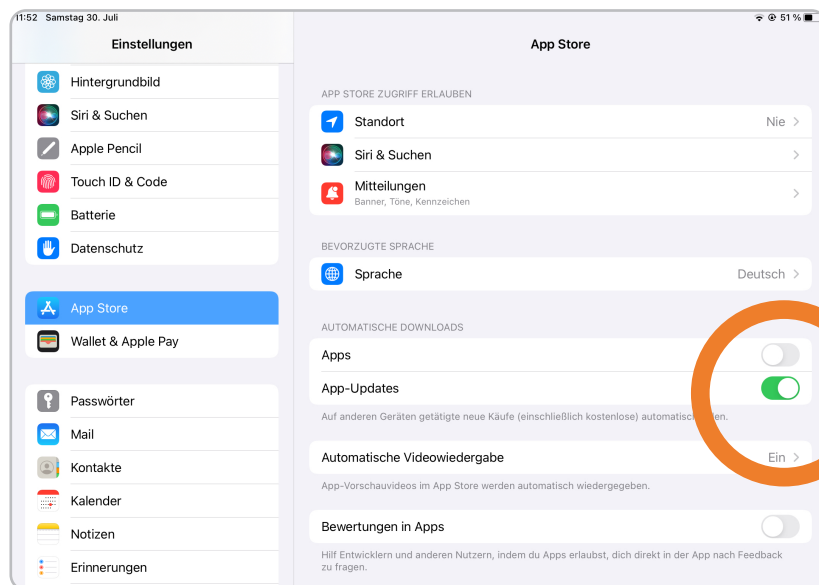

Wenn Sie **App Updates einschalten**, werden Updates für jede installierte App automatisch zugelassen.

## Updates mit dem App Store durchführen

Sie können im **Apple App Store** ein Update zur aktuellsten Version von Grid for iPad durchführen.

Öffnen Sie den **App Store** und rufen die installierten Apps auf. Sollte ein Update verfügbar sein, können Sie die App hier aktualisieren.

## 4.3

# Unterstützung

Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter.

## Online chat

[thinksmartbox.com](https://thinksmartbox.com)

## Email

[support@thinksmartbox.com](mailto:support@thinksmartbox.com)

## Phone

**UK:** +44 (0) 1684 578868

**US:** +1 (844) 341-7386 (Kostenfrei)

Wenn Sie Grid for iPad in einem anderen Land erworben haben, wenden Sie sich an Ihren lokalen Smartbox Partner.

Ein Verzeichnis unserer internationalen Partner finden Sie auf unserer Website: [thinksmartbox.com/where-to-buy](https://thinksmartbox.com/where-to-buy).

## Verwendungszweck

Grid for iPad wird als Sprachausgabe-Kommunikationshilfe (Voice Output Communication Aid, VOCA) verwendet.

## Bestimmungsgemäße Nutzergruppe

Grid for iPad ist geeignet für Personen mit komplexen Bedürfnissen hinsichtlich der Kommunikation oder Eingabe.

## Bestimmungsgemäße Verwendungsumgebung

Grid for iPad kann in verschiedensten Kontexten eingesetzt werden:

- Privatwohnungen
- Betreutes Wohnen
- Pflegeeinrichtungen
- Schulen, Hochschulen, Universitäten
- im öffentlichen Raum, z.B. Geschäfte und Restaurants
- Krankenhäuser (Akutversorgung, Rehabilitation und Gemeinde)

## Wichtige Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Grid for iPad soll ausdrucksstarke Kommunikation stützen. Grid for iPad sollte in Kombination mit einer Reihe von Methoden zur Unterstützten Kommunikation (UK) verwendet werden. Es sollte nicht das alleinige Mittel zur Unterstützung ausdrucksstarker Kommunikation sein.

Weitere Methoden der Unterstützten Kommunikation sind z.B. Tafeln oder Karten in Papierform, Zeichensprache, oder Buchstabentafeln.

Denn trotz einer robusten und funktionssicheren Bauweise kann es zu Funktionsausfällen kommen wegen z.B. Energieverlust oder anderer technischer Probleme.

Aus diesem Grund sollte Grid for iPad nicht verwendet werden:

- als Gerät für lebensnotwendige Zwecke
- erforderlich zur Erhaltung der Gesundheit
- um einen Notruf abzusetzen
- zur Medikamentenversorgung
- alleiniges Mittel zur Umfeldsteuerung

Grid for iPad sollte ebenfalls nicht zur Bereitstellung von Informationen zur Entscheidung über diagnostische oder therapeutische Zwecke verwendet werden.

## 4.5

# iPad Systemanforderungen

## Unterstützte iPads

iPad (ab 5. Generation)

ab iPad Mini 2

ab iPad Air 2

iPad Pro

App Größe: 2GB+ Speicherplatz

Betriebssystem: iPadOS 12.2









[thinksmartbox.com](http://thinksmartbox.com)

Smartbox

Grid for iPad - Manual - DE - C  
GB-IT4116  
March 2025

© 2025 Smartbox Assistive Technology